

BIOGROUP MEDICAL SYSTEM S.r.l. Loc. Campiano 9/b Talamello (RN) P.Iva 00964170419 Divisione Prove Interlaboratorio 	Istruzioni di uso COAGULAZIONE	I.O.06 - IFU Rev. 00 Data 04/2019
--	--	--



REF: MSQSC4
REF: MSQSC12

Contenuto :

MSQSC4, 4 flaconi MSQSC12, 12 flaconi

Plasma liofilo da Ricostituire con 1 ml di acqua distillata

Il controllo contiene materiale di origine umana.

L'Antigene di superficie dell'Epatite B, l'Antigene dell'Epatite C, e gli Anticorpi Anti HTLV/HIV sono risultati non rilevabili ai test analitici di ultima generazione.

Consigliamo comunque l'adozione di procedure atte a ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettanti, trattando il materiale come potenzialmente infetto.

Conservazione e stabilità:

Conservare il kit a 2-8 °C

Il Plasma ricostituito è stabile per 4 ore a 2-8 °C e 20 giorni a -20°C

ISTRUZIONI


- Aggiungere ad ogni flacone di liofilo **1ml** di acqua distillata.
- Prima dell'uso mantenere il prodotto a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
- Chiudere il flacone ed agitare per inversione delicatamente fino a completa dissoluzione del liofilo. Evitare accuratamente la formazione di schiuma.
- Eseguire il saggio entro 4 ore.
- Inserire i dati ottenuti sul sito WEB QS qs-veq.it

Si prega di porre particolare attenzione alla data di inserimento risultati, entro e non oltre la fine del mese in cui si svolge la prova valutativa.

N.B. ATTENZIONE I FLACONI CONTENGONO MATERIALE DI ORIGINE UMANA. SI RACCOMANDA DI ATTUARE TUTTE LE PROCEDURE CONSIGLIATE A SCOPO DI PREVENZIONE E SMALTIMENTO

	Consultare istruzioni per l'uso / Read instructions for use		Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro medical device
	Scadenza / Expiry	REF	Numero di catalogo / Catalog Number
	Limiti temperatura di conservazione/ Storing temperature limits		Fabbricante / Producer
	Marchio CE (prodotto conforme ai requisiti della Dir. 98/79/CE)		Dimensione / Numero test / Dimension / Number tes
	Numero di lotto / Lot Number		

BIOGROUP MEDICAL SYSTEM S.r.l. Loc. Campiano 9/b Talamello (RN) P.Iva 00964170419 Divisione Prove Interlaboratorio 	Instructions for Use COAGULATION	I.O. 06 - IFU
		Rev. 00
		Data 04/2019

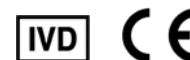

REF: MSEQSCO1
 REF: MSEQSC4
 REF: MSEQSC12

Includes:

MSEQSCO1, 1 vial - MSEQSC4, 4 vials - MSEQSC12, 12 vials

Human lyophilized plasma. Reconstitute with 1mL of distilled water

The plasma has been tested for Human Immunodeficiency Virus (HIV) antibody, Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg), and Hepatitis C Virus (HCV) antibody and found to be NON-REACTIVE. However this material should be handled carefully.

STORAGE AND STABILITY

Store the kit at 2-8 °C

The reconstituted plasma stability is **4 hours** at 2-8 °C and **20 days** at -20°C

INSTRUCTIONS:

- Open vial and add **1 ml** of distilled water
- Let reconstitute serum for 30 minutes at room temperature
- Shake gently until the complete dissolving avoiding foam formation
- Analyze plasma like human sample in 4
- Input data in QS WEB SITE qs-veq.it

**ATTENTION PLEASE WE ASK FOR A PARTICULAR CARE ENTERING ON THE WEB SITE
THE MONTH LOT AND OF ASSAY**

N.B. ATTENTION THE BOTTLES CONTAIN MATERIAL OF HUMAN ORIGIN. IT IS RECOMMENDED TO IMPLEMENT ALL THE RECOMMENDED PROCEDURES FOR THE PURPOSE OF PREVENTION AND DISPOSAL

	Consultare istruzioni per l'uso / Read instructions for use		Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro medical device
	Scadenza / Expiry		Numero di catalogo / Catalog Number
	Limiti temperatura di conservazione/ Storing temperature limits		Fabbricante / Producer
	Marchio CE (prodotto conforme ai requisiti della Dir. 98/79/CE)		Dimensione / Numero test / Dimension / Number tes
	Numero di lotto / Lot Number		