

Instrucțiuni de utilizare: Sort de protecție

Pasul 1: Înainte de a utiliza șorțul de siguranță, asigurați-vă că este curat și că nu prezintă defecte sau deteriorări. Dacă este deteriorat, nu îl utilizați și înlocuiți-l cu unul nou.

Pasul 2: Puneți șorțul de siguranță. Glisați șorțul peste cap și reglați curelele din spatele gâtului și din jurul taliei pentru a vă potrivi confortabil și sigur.

Pasul 3: Fixați orice caracteristici suplimentare ale șorțului, cum ar fi închizătorile sau nasturii, dacă este cazul.

Pasul 4: Atunci când lucrați cu un șorț, asigurați-vă că șorțul vă acoperă trunchiul și picioarele, protejându-vă de eventualele stropi sau resturi.

Pasul 5: După finalizarea sarcinii, scoateți cu grijă șorțul și evitați să atingeți orice zonă contaminată.

Pasul 6: Curățați șorțul de siguranță după fiecare utilizare cu apă și săpun sau cu o soluție dezinfectantă pentru a preveni răspândirea bacteriilor sau a germenilor.

Pasul 7: Depozitați șorțul de protecție într-o zonă curată și uscată, departe de orice sursă potențială de contaminare.