

5. **Capul pompei de flux de ieșire** – Încărcați aici setul de tubulatură de ieșire. Controlează debitul fluxului de ieșire de fluid din canulă sau raclor în recipientul de aspirație a deșeurilor.
6. **Supapa de transfer** – Comută fluxul de ieșire de fluid între canulă și raclor.
7. **Zăvorul tubulaturii la supapa de transfer** – Se folosește pentru zăvorârea securizată a clapetei casetei setului de tubulatură în supapa de transfer.
8. **Interfața grafică cu utilizatorul (GUI)** – Ecran tactil color care permite reglarea de către utilizator a presiunii în mmHg sau LH2O pentru procedurile artroscopice. De asemenea, afișează informații pentru utilizator sau instrucțiuni speciale. Permite selectarea tipului procedurii, ajustarea setărilor utilizatorului și presetărilor chirurgului, precum și a procedurii de pomire/oprire, drenării, clătirii, tamponării, controlului debitelor de ieșire și de aspirație, modului Undă și exportării/importării de date.

2.2 Panoul din spate al consolei de irigare CrystalView™ Pro



1. **Portul de intrare al senzorului de raclor** – Conectați aici senzorul de raclor (24k900) sau cablul de interfață al pompei (D4024) ori cablul prelungitor al senzorului de raclor (24k191). Acest senzor semnalizează consolei utilizarea unei piese de mână pentru raclor. Aspirația raclorului nu funcționează fără senzorul conectat.
2. **Port USB Type-A** – Atașați aici un dispozitiv de memorie compatibil USB 2.0 pentru a importa/exporta setări de sistem și presetări ale chirurgului.
3. **Port USB Type-B** – Se folosește numai pentru service.
4. **Conector de potențial ISO** – Se folosește pentru interconectarea echipamentelor în scopul asigurării faptului că toate echipamentele se află la același potențial sau au aceeași împământare.
5. **Priză de curent** – Acceptă cablul de alimentare furnizat și asigură alimentarea cu curent alternativ.
6. **Modul de siguranțe fuzibile** – Găzduiește siguranțele fuzibile. Consultați secțiunile „5.5 Înlocuirea siguranțelor fuzibile” și „6.0 SPECIFICAȚII TEHNICE” pentru mai multe informații.

AVERTIZARE: Cu excepția dispozitivelor de memorie USB alimentate non-extern, conectați numai dispozitivele conforme cu IEC 60950 și IEC 60601 la porturile de semnal de intrare și ieșire.

