

# PROTEAZONE®

## SOLUȚIE DE CURĂȚARE ȘI DECONTAMINARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE INVAZIVE ȘI NON-INVAZIVE

**Descriere:** formulă concentrată echilibrată de dezinfectare micobacterică, bacterică, virucidă, fungică cu agent tensioactiv, care acționează în sinergie cu Adazone®. Specifică pentru îndepărtarea biofilmului microbial.

**Compoziție:** Adazone® 0,025 g, amestec multi-enzimatic 2,0 g, complex tensioactiv microbicid cu spumare redusă 25,0 g, DTPA 0,07 g (acid pentaacetic dietilen triamină), coformulanți și apă purificată, necesare pentru a obține 100 ml.

**Mod de utilizare:** folosiți diluat 1:400.

**Instrucțiuni de utilizare:** introduceți instrumentele timp de 5 minute, apoi clătiți și uscați înainte de următoarea sterilizare.

**Avertismente:** Pericol. Produsul trebuie manipulat de personal instruit în conformitate cu normele de siguranță. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se depozita într-un loc uscat, la temperatura camerei departe de sursele de căldură. Data de expirare se referă la produsul nedeschis depozitat în condiții adecvate. A nu se utiliza produsul după expirarea termenului de valabilitate.

(H) Frază de pericol: (H226) Lichid și vapori inflamabili. (H302): Nociv în caz de înghițire. (H318):

Provoacă leziuni oculare grave. (H315): Provoacă iritarea pielii. (H412): Nociv pentru mediul

acvatic cu efecte pe termen lung. (EUH208): Conține: SUBSTANȚĂ DANGEROUSĂ. Poate cauza reacții alergice.

(P) Frază de precauție: (P210): A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei,

flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. (P280): Purtați mănuși de

protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție

a feței. (P305+P351+P338): ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți bine cu apă timp de câteva

minute. Scoateți lentilele de contact, dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să

clătiți. (P310): Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. (P501): Aruncați

conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările

locale/regionale/nationale/internationale.

**Conține:** CLORURĂ DE DECILDIMETIL AMONIU POLI (OSS-1,2-etanedil), ALFA-Tridecil-OMEGA-

HIDROXI-RAMIFICAT.

**Biodegradabilitate:** Produsul în condițiile sale de lucru nu prezintă efecte negative.

Conținut: 1 l e



8 011517 140105

Număr de urgență: +39.069145399

CANTEL MEDICAL

CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.  
Via Laurentina, 169  
00071 POMEZIA (RM) - Italia  
Tel.: +39.06.9145399  
Fax: +39.06.9146099  
www.cantelmedical.it



LOT



Cod. 000000 Rev. 1 - 09/2019