



Lampa bactericida UVC, putere 1*15W, pentru sterilizare, cu sau fără suport portabil. Manual de instrucțiuni

Lampa UVC este recomandată pentru incinte și spații mici (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc) cu o suprafață de sterilizare de până la 20mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 8000-10800 ore;
- Tip montare :perete sau suport portabil;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare cu întrerupător on/off sau conectare la rețeaua existentă;
- Termen de garanție 12 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE:

Suprafața Timp sterilizare

- 0-20 mp 15 min
- 30 mp 45 min

• APLICATII:

- Dezinfectia aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mușci, drojdii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE:

1. Îndepărtați corpul protector și tubul bactericid.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul cutiei veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete.
4. După montare puteți porni tensiunea de alimentare a instalației electrice.

ATENȚIE!!!

1. Înainte de a porni lampa asigurați-vă că în camera respectivă nu au rămas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioletă reflectată dintr-o oglindă de exemplu poate fi la fel de daunătoare pentru piele și ochi.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, la îndemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai bine închideți cu cheia camera în care acesta funcționează).
4. Lumina ultravioletă UV-C directă este daunătoare pentru piele și mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu vă dezinfectați mainile cu această lampă, folosiți lumina ultravioletă UV-C doar pentru dezinfectia obiectelor. Pentru maini folosiți săpunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviți direct la lampa în timpul utilizării.
7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii și în general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate să fie expuse la lumina directă a lampii UV-C.
8. Opriți lampa atunci când doriți să o curățați.
9. Dacă temperatura camerei este mai mică de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. După ce s-a încheiat ciclul de sterilizare al încăperii nu intrați imediat, încănta trebuie aerisită minim 15-30 minute.
11. Nu lăsați copii în preajma dispozitivului.

Acest simbol indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și centrale de colectare autorizate în acest sens.