



[www.litpolmebel.com](http://www.litpolmebel.com)

## **ПАСПОРТ изделия**

**(инструкция,  
эксплуатационно-технические  
характеристики)**

**Шкаф медицинский Sml 323 RAL 9010**



**Виробник ТОВ «ЛІТПОЛ-УКРАЇНА»  
Адреса виробничих потужностей: м. Харків, вул.  
Велика Панасівська, 181**

### **Назначение изделия.**

Назначение – для хранения медикаментов, перевязочного материала, лекарственных препаратов, нестерильного инструмента и других приборов для проведения консультаций, медицинских манипуляций.

### **Технические характеристики.**

Шкаф представляет собой цельнометаллическую конструкцию. Материал – листовая сталь толщиной 0,7 мм.

Габариты шкафа:

Высота, мм: 1750/1900;

Ширина, мм: 800;

Глубина, мм: 400.

Шкаф разделен на два независимых отделения. Верхнее отделение – оборудовано двумя полками и двумя дверями из стекла. Нижнее – оборудовано двумя металлическими дверями и двумя полками.

- стекло двери — 4 мм

- стекло полка — 5 мм

- нагрузка на полку стекло - 30 кг

- нагрузка на полку металл - 50 кг

- закрывание двери металл - замок

- закрывание двери стекло - хромированный замок с магнитом.

Шкаф установлен на четыре регулируемых ножки (высота-150 мм).

Покрывается порошковой краской. Стандартный цвет окраски – RAL 9010 белый.

### **Інструкція.**

Используйте шкаф строго по функциональному назначению.

Запрещается удерживать шкаф в условиях крайней влажности (более 70%), нельзя допускать, чтобы на шкаф постоянно попадали брызги воды.

Не допускать, чтобы шкаф постоянно стоял на мокром полу.

Не допускать попадания на шкаф агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.).

Избегайте механических повреждений элементов шкафа.

Условия эксплуатации: температура от 0°C до 35°C  
относительная влажность от 20% до 70%.

**Гарантія виробника.**

Срок гарантійного обслуговування - 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.

Сервісні центри:

- 1.Україна,г.Харьков, ул.Большая Панасовская, д.181  
тел. +38(057) 754-69-33, тел./факс 754-69-34
- 2.Молдова,г.Кишинёв, LIMANI-GRUP S.R.L.  
тел.+373(79) 476449



ВТК \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_ **2026** р

Номер \_\_\_\_\_