



Istruzioni di uso

PROTEINE SPECIFICHE

I.O. 06 - IFU

Rev. 00

Data 04/2019



REF:MSQUALITYPS - MSQSPS12

Contenuto : siero pronto all'uso 1mL

Il siero utilizzato per il controllo QUALITY SYSTEM è stato accuratamente selezionato e validato. Il siero è stato testato con risultati negativi per gli anticorpi : HIV - HCV ed HBsAg. Si consiglia comunque di trattare il prodotto con le precauzioni usate per i materiali potenzialmente infetti.

PROCEDURA:

Il campione è pronto all'uso.

Uso

Campione per l'analisi delle proteine sieriche in elettroforesi capillare ed immunoturbidimetria.

Conservazione, stabilità e segni di deterioramento

Conservare il campione a temperatura a 2°/8 °C. La soluzione è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola del kit o sull'etichetta del flacone di tampone. Non conservare il campione in prossimità di una finestra o di una fonte di calore.


NOTA : Se il campione è conservato tra 2 e 8 °C, prima dell'uso si raccomanda di portarlo a temperatura ambiente. Non congelare.

Inserire i valori ottenuti (o la media di essi se sono stati eseguiti più saggi) sul sito web:

qs-veq.it

N.B. ATTENZIONE I FLACONI CONTENGONO MATERIALE DI ORIGINE UMANA. SI RACCOMANDA DI ATTUARE TUTTE LE PROCEDURE CONSIGLIATE A SCOPO DI PREVENZIONE.

	Consultare istruzioni per l'uso / Read instructions for use		Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro medical device
	Scadenza / Expiry		Numero di catalogo / Catalog Number
	Limiti temperatura di conservazione/ Storing temperature limits		Fabbricante / Producer
	Marchio CE (prodotto conforme ai requisiti della Dir. 98/79/CE)		Dimensione / Numero test / Dimension / Number tes
	Numero di lotto / Lot Number		

BIOGROUP MEDICAL SYSTEM S.r.l. Loc. Campiano 9/b Talamello (RN) P.Iva 00964170419 Divisione Prove Interlaboratorio 	<div> Instruction for use SPECIFIC PROTEINS </div>	<div> I.O. 06 - IFU <hr/> Rev. 00 <hr/> Data 04/2019 </div>
--	--	---



REF: MSEQSPS1-MSEQUALITYPS-MSEQSPS12

Includes: Human SERUM 1mL

Ready to use

The serum has been tested for Human Immunodeficiency Virus (HIV) antibody, Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg), and Hepatitis C Virus (HCV) antibody and found to be NON-REACTIVE. However this material should be handled carefully.

Storage and stability:

Store kit at 2-8°C

PROCEDURE:

- Run determinations using control as a routine human sample

Input data in QS WEB SITE qs-veq.it

N.B. ATTENTION THE BOTTLES CONTAIN MATERIAL OF HUMAN ORIGIN. IT IS RECOMMENDED TO IMPLEMENT ALL THE RECOMMENDED PROCEDURES FOR THE PURPOSE OF PREVENTION AND DISPOSAL

	Consultare istruzioni per l'uso / Read instructions for use		Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro medical device
	Scadenza / Expiry	REF	Numero di catalogo / Catalog Number
	Limiti temperatura di conservazione/ Storing temperature limits		Fabbricante / Producer
	Marchio CE (prodotto conforme ai requisiti della Dir. 98/79/CE)		Dimensione / Numero test / Dimension / Number tes
	Numero di lotto / Lot Number		