

## Instrucțiune de utilizare a produsului dezinfectant

# Viruton® Extra

**Concentrat enzimatic pentru curățarea și  
dezinfectarea instrumentelor**



**Viruton Extra** este o formulă extrem de eficientă pentru curățarea și dezinfectarea simultană a instrumentelor medicale și chirurgicale de toate tipurile. Formula modernă oferă efecte excelente de curățare chiar și în caz de încărcare proteică semnificativă în timp de expoziție scurt. Viruton Extra are proprietăți bune

de curățare și spectru microbiologic larg combinat cu timpul scurt de acțiune. Este conceput pentru dezinfectarea manuală și dezinfectarea în dispozitive cu ultrasunet. Produsul prezintă proprietăți anticorozive și compatibilitate bună cu materialele. Este recomandat pentru instrumente fabricate din oțel inoxidabil, nichel, cupru, aluminiu, cauciuc, porțelan, sticlă și plastic.

**Indicații de utilizare:** Se prepară soluția de lucru diluând concentratul cu apă în concentrația dorită specificată mai jos. Pentru a obține concentrația de 0,5% se diluează 5 ml de concentrat în 995 ml apă. Se scufundă instrumentele în soluție imediat după folosirea lor. Toate componentele și cavitățile trebuie să fie acoperite de soluție. Instrumentele dezinfectate trebuiesc clătite și uscate. Soluția de lucru este valabilă timp de 14 zile. Din motive igienice se recomandă schimbarea zilnică a soluției. Nu se combină cu alți detergenți sau dezinfecțanți. Produsul este destinat pentru uz profesional.


**Substanțe active: 100 g conțin:** amine, săruri cuaternare de amoniu, enzime - proteaze: 11,50 g of N- (3-aminopropil) -N-dodeciloopropano-1,3-diamină (CAS: 2372-82-9), 3,12 g de poli (oxi-1,2-etanodilo),. alfa .- [2- (didecilmetilamino) etil] -. Omega.- hidroxi-, propanoat (sare) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g de clorură de didecildimetilamoniu (CAS: 7173-51-5)

**Ambalaj:** flacon 1 L. cu dozator; canistra 5 L.




### Activitatea microbiologică:

Eficacitatea:	EN 14885	15 min.	30 min.
Bacteria (inclusiv MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Fungi (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Mycobacteria (M. avium, M.terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Virusuri încapsulate (Vaccinia și BVDV și altele ca: HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, Influenza de tip A, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno virus	EN 14476	0,5%*	0,5%
Polio virus	EN 14476	1%	0,5%*

\*condiții de curățenie

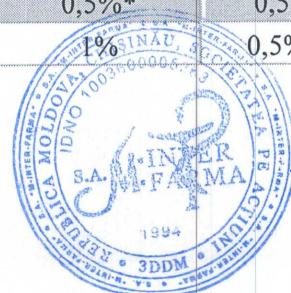

## DOMENII DE APLICARE

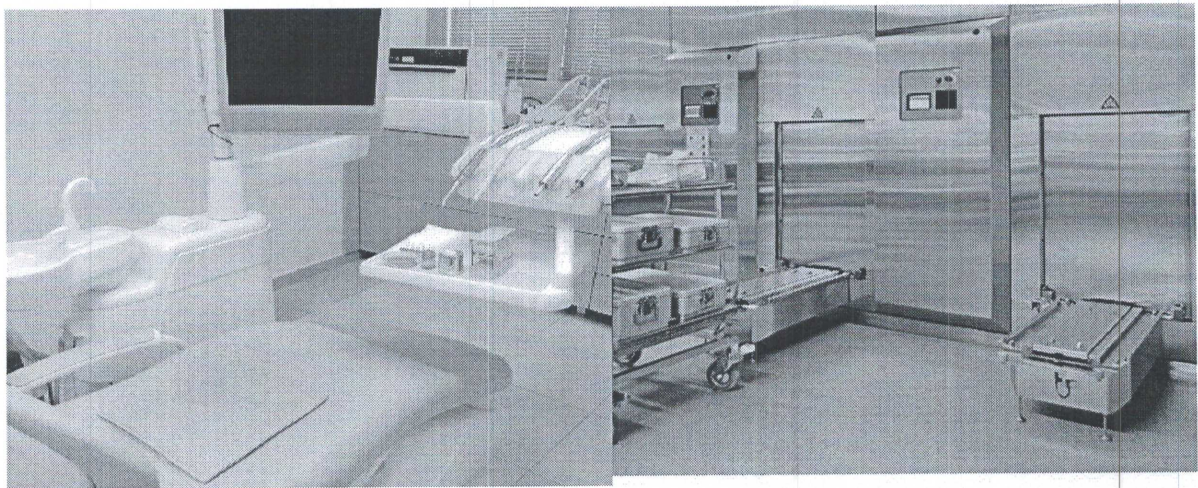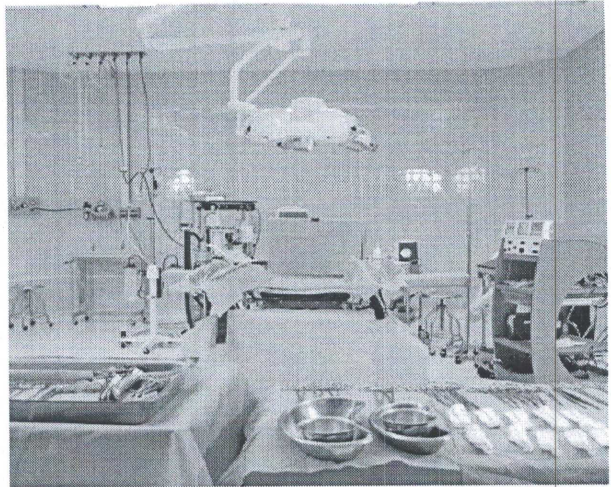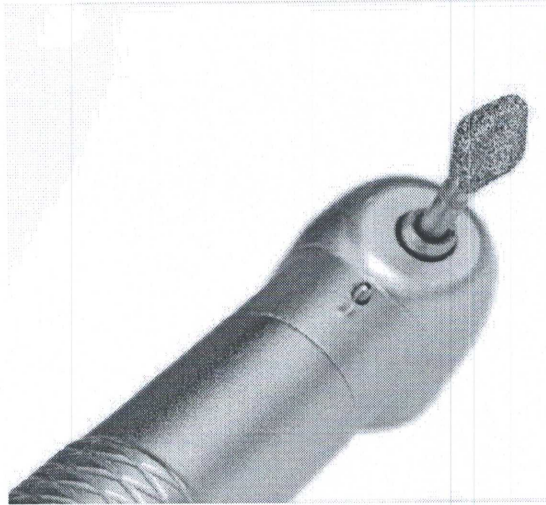

**Importator si Reprezentant oficial in Republica MOLDOVA:**



**S.A. M-INTER-FARMA**

**MD 2025 Mun. Chisinau, str. Grenoble 23  
Tel: (022) 904 - 006, 904 - 005, Fax: 904 - 007**

**Număr de înregistrare de stat a dispozitivelor medicale Nr. DM000037751, DM000037752**

