

Sterilizarea cu aburi (autoclavă)

Ciclul selectat depinde de echipament și de protocolul spitalicesc. Instrucțiunile generale sunt:

Ciclul metodei	Ciclu	Temperatură minimă	Timp minim de expunere	Timp minim de uscare
Abur (înfășurat)	Pre-vid	132°C	4 minute	30 minute
Abur (înfășurat)	Gravitate	121°C	30 minute	30 minute

Notă: În practica Sterilizării imediate cu aburi (IUSS), înfășurat sau neînfășurat, fără ciclu de uscare, parametrii de timp și temperatură ai expunerii, așa cum se arată mai sus pentru dispozitivele înfășurate, asigură sterilizarea în cameră. Menținerea sterilității după ciclu pentru un dispozitiv procesat de IUSS înfășurat sau neînfășurat depinde de manipularea și livrarea aseptică în câmp steril.

Sterilizarea cu peroxid de hidrogen (metoda STERRAD®)

Deconectați toate adaptoarele din fibră optică înainte de a executa procesul de sterilizare STERRAD®. Cablurile din fibră optică pot fi sterilizate cu următoarele sisteme STERRAD®:

Sisteme STERRAD®	Ciclu
STERRAD® 100S	Scurt, lung
STERRAD® NX®	Standard, avansat
STERRAD® 100NX™	Standard

Respectați specificațiile producătorului (ASP) referitoare la metoda corespunzătoare.

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: Utilizarea sterilizării STERRAD poate afecta aspectul cosmetic al unor finisaje metalice.

AMBALARE ȘI ETICHETARE

1. La prima utilizare, ghidul de lumină trebuie utilizat numai dacă ambalajul original și eticheta sunt intacte.
2. Dacă ambalajul ghidului de lumină a fost deschis sau modificat, contactați reprezentantul dvs. regional de vânzări CONMED sau în S.U.A. contactați Departamentul de Relații cu Clienții (1-800-448-6506).

GARANȚIA

CONMED va înlocui, la alegerea noastră, orice ghid de lumină la care s-au constatat defecte de fabricație sau materiale care cauzează defectarea ghidului de lumină în timpul utilizării normale timp de 6 luni de la cumpărare.

Garanția nu se aplică produselor modificate, produselor reparate anterior de entități neautorizate (entități altele decât CONMED Corporation) și produse deteriorate prin utilizarea necorespunzătoare a clientului. CONMED acceptă numai produse care sunt curate și sigure.

Criterii de înlocuire

1. Evaluați integritatea mănunchiului de fibre optice ale ghidului de lumină prin direcționarea capătului distal către o lumină de intensitate scăzută și examinând capătul proximal.
2. Observați cantitatea de puncte negre (fibrele deteriorate) la capătul proximal. Dacă sunt deteriorate (rupte) aproximativ 1/3 sau mai multe fibre luminoase, ghidul de lumină trebuie înlocuit.

Accesorii / Echipamente compatibile

C3278 Adaptoare de montaj pentru surse de lumină

- 7455 Montaj sursă de lumină Wolf, Dyonics
- 7456 Montaj sursă de lumină ACMI
- 7457 Montaj sursă de lumină Storz
- 7458 Montaj sursă de lumină Olympus