

8. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instalarea – Testarea funcțională preoperatorie

Înainte de a utiliza capul de cameră, efectuați următoarele teste:

1. Porniți sistemul Looking Glass apăsând pe butonul de alimentare. Asigurați-vă că modelul barei de culori apare pe monitor.
2. Asigurați-vă că inelul colorat al LED-ului conectorului capului de cameră este iluminat verde.
3. Conectați cablul capului de cameră la interfața conectorului de cablu.
4. Asigurați-vă că inelul colorat al LED-ului conectorului capului de cameră este iluminat albastru.
5. Îndreptați capul de cameră spre un obiect staționar și verificați dacă există transmisie video în timp real pe monitor.

Dacă imaginea video nu este prezentă sau este întreruptă, asigurați conectarea corectă a cablului capului de cameră la interfața conectorului de cablu. Dacă problema persistă, consultați secțiunea Depanare din manualul sistemului Looking Glass. Dacă nu se găsesc soluții, contactați reprezentantul de service CONMED sau serviciul de asistență pentru produse la numărul 1-866-426-6633.

Operarea – Cuplajul artroscopului (stil vizor)

Cuplarea – pentru a cupla artroscopul, efectuați următoarele:

1. Orientați capul de cameră astfel încât butoanele să fie îndreptate în sus și cuplajul să fie îndreptat în partea opusă.
2. Rotiți cuplajul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide lamelele de reținere.
3. Introduceți un artroscop cu vizor standard în deschizătură.
4. Eliberați cuplajul.
 - a. Asigurați-vă că artroscopul este așezat complet în cuplaj.
 - b. Asigurați-vă că artroscopul se poate roti liber.

Blocarea – pentru a bloca artroscopul, efectuați următoarele:

1. Continuați rotirea cuplajului în sens invers acelor de ceasornic.
2. Un clic sonor va confirma faptul că artroscopul este în etapa de blocare.
3. Continuați rotirea cuplajului în sens invers acelor de ceasornic până când se atinge tensiunea dorită.

Deblocarea – pentru a debloca artroscopul, efectuați următoarele:

1. Rotiți cuplajul în sensul acelor de ceasornic pentru a readuce artroscopul la poziția de rotire liberă.
 - a. Nu trebuie să rotiți foarte mult pentru aceasta.
 - b. Poate exista un clic sonor în funcție de cât de puternică este mișcarea de rotire.

Decuplarea – pentru a decupla artroscopul, efectuați următoarele:

1. Asigurați-vă că țineți o mână pe artroscop pentru a-l împiedica să cadă.
2. Continuați rotirea cuplajului în sensul acelor de ceasornic până când artroscopul poate fi scos.
 - a. Poate exista un clic sonor în funcție de cât de strâns a fost fixat artroscopul.



Figura 1: Vedere a cuplajului

Operarea – Inelul de focalizare

Inelul de focalizare este amplasat direct în spatele cuplajului artroscopului. Rotiți inelul de focalizare până când imaginea este clară. Poate fi necesar să repetați focalizarea la distanțe foarte mari și foarte mici.

Operarea – Butoanele și navigarea în meniu

Utilizați butoanele pentru a naviga prin interfața grafică cu utilizatorul (GUI) a sistemului Looking Glass. Pentru confortul utilizatorului, anumite funcții utilizate frecvent pot fi programate și activate prin intermediul butoanelor capului de cameră. Consultați manualul sistemului Looking Glass pentru instrucțiuni privind programarea butoanelor.