



**LISMEDFARM S.R.L.**

Șos. Muncești, 167/B, MD – 2002, mun. Chișinău, Republica Moldova  
tel.: 022-80-47-98, 022-55-64-38, 022-56-94-91, e-mail: [oficiu@lismedfarm.md](mailto:oficiu@lismedfarm.md),  
web: <https://lismedfarm.md>, c/f: 1003600113573, TVA: 0304618, director – Ecaterina Chitic

# Mască medicală

## Instrucțiune de utilizare



**Caracteristici:**

Culoare: albastră la exterior, albă la interior

Nivel de filtrare:  $\geq 98\%$

Numărul de straturi: 3 (trei)

Nivel de protective egal II (EN 14683:2019)

Fabricat conform standardului EN 14683:2019

Directiva europeana: 93/42/EEC – Privind dispozitivele medicale

**Mod de utilizare:**

1. Spălați-va mâinile cu apă și săpun înainte de a utiliza masca medicală.
2. Scoateți masca medicală din cutie folosind benzile elastice, fără a atinge interiorul.
3. Desfaceți masca medicală înainte de aplicare.
4. Aplicați masca medicală folosind benzile elastice, aplicați-le după urechi.
5. Fixați clema din plastic, pentru a se potrivi perfect masca pe față.
6. Purtați masca medicală 2 ore, în funcție de umiditatea mediului.

**⚠️ Atenție:**

1. Nu refolosiți masca medicală.
2. Nu purtați masca medicală dacă vă este greu să respirați. Acest lucru poate duce la complicații respiratorii.
3. Nu lăsați alte persoane să vă folosească masca medicală.
4. Nu folosiți o mască medicală mai mult decât se recomandă.
5. Nu purtați masca medicală umedă.
6. Se interzice masca medicală copiilor sub 2 ani.

**Se recomandă:**

1. Evitați să atingeți masca medicală în timp ce o purtați, se murdărește ușor.
2. Cel mai optim efect de protecție împotriva virusului, este demonstrat de o combinație între utilizarea corectă a măștii medicale în conformitate cu igiena personală și distanța socială.

**Certificate de calitate:**

- Numărul declarației de conformitate IDN – 210415DoC din 15.04.2021.
- Certificat ISO 13485 Q6 080946 0012 Rev. 01 din 24.11.2019.
- Pașaportul de calitate a lotului corespunde cu cutia colectivă.

**Informație despre producător:**

Denumirea companiei: Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.

Adresa juridică a producătorului: F16, Building C, Anji Chamber of Commerce Mansion, No. 99 Tianhuangping South Road, 313300 Anji County, Zhejiang Province, People's Republic of China  
Reprezentanța în UE: SUNGO Europe B. V.

Adresa reprezentanței: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, The Netherlands.

**Informație pentru comenzi în RM:**

Denumirea companiei: Lismedfarm S.R.L.

Adresa juridică și de amplasare: sos. Muncești 167/B, MD-2002 Chișinău, Moldova.

Telefoane de contact: +373-22-56-94-91, +373-22-56-94-90.

E-mail: [oficiu@lismedfarm.md](mailto:oficiu@lismedfarm.md)

Pentru reclamații: [calitate@lismedfarm.md](mailto:calitate@lismedfarm.md), +373-22-80-47-98