

## INSTRUCTIUNI UTILIZARE INDICATORI STERILIZARE

### INDICATOR DE ABUR AUTOADEZIV TIP 4

---

- PRODUCT CODE** : 4AC4I
- STANDARDE CONEXE** : Indicator medical cu abur 4A, indicatorul este clasificat ca Tip 4 conform standardului ISO 11140-1.
- UTILIZAREA PREVĂZUTĂ** : Indicatorii medicali cu abur 4A de tip 4 permit utilizatorului final să identifice ambalarea incorectă, problemele de încărcare și defecțiunile de sterilizare. Este ușor de documentat datorită proprietăților sale autoadezive.
- CONDIȚII DE FUNCȚIONARE** : Indicatoarele medicale de abur 4A de tip 4 sunt proiectate să funcționeze la ciclul de abur.
- INSTRUCTIUNI:**
1. Introduceți o banda strip și continuați cu sterilizarea
  2. Timpul procesului de sterilizare: 3,5-5 minute la 134 °C / 15-20 minute la 121 °C/45 min la 120 °C/ 60 min la 180 °C
  3. Finalizați ciclul și verificați pe indicator virarea culorii de la albastru la gri-închis / negru după încheierea cu succes a unui ciclu de sterilizare.

Înainte de sterilizare



După sterilizare



- PRODUCĂTOR** : **DORT-A TIP MALZEMELERI SAN. ITH. IHR. TIC. LTD. STI.**  
Balıkhisar Mahallesi, Köyiçi Serpmeleri, No:795 Akyurt, Ankara, Turkey  
Tel: +90 312 363 50 52 / 53 Fax: +90 312 363 52 10  
Web: <http://www.4amedical.com> E-mail: [export@4amedical.com](mailto:export@4amedical.com)