


CHEMIDES PULVER

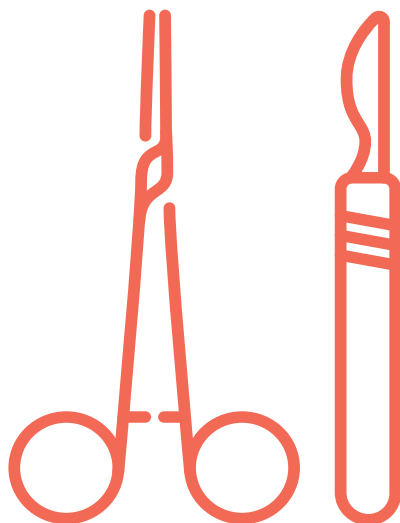

RO/MD

Agent de curățare, dezinfectare de nivel înalt pentru toate suprafețele tolerante la apă

1 Kg

LOT 30230822

08/2024

RO/MD CHEMIDES PULVER este un agent de curățare și dezinfectie pentru realizarea unei soluții dezinfectante de nivel înalt pentru toate suprafețele tolerante la apă. Produsul nu este potrivit pentru utilizare pe suprafețe din cupru, staniu, bronz, alamă și aluminiu.

UTILIZARE: Pregătiți soluția de lucru dizolvând pulberea în apă caldă. Pentru un litru de soluție de lucru adăugați 17,5 grame de pulbere (o lingură dozatoare într-un litru de apă). Amestecați bine soluția (2-3 minute) până când cea mai mare parte a pulberii este dizolvată și așteptați 15 minute pentru a activa soluția. Timpul de expunere este de 15 minute. Pentru curățarea și dezinfectia suprafețelor, pregătiți soluția de lucru. Utilizați metode de ștergere umedă, pulverizare, scufundare, înmuiere sau umplere pentru dezinfectarea suprafețelor cu soluția de lucru. Clătiți cu apă sterilă, dacă este necesar. Soluția trebuie înlocuită la fiecare 8 ore sau atunci când aspectul, culoarea sau transparența soluției au fost schimbate. Utilizați benzi de testare pentru a verifica activitatea soluției.

INGREDIENTE: 100g Chemides Pulver contains: Sodium Percarbonate 41g; Tetra Acetyle Ethylene Diamine (activator) 25g.

PERICOL. Toxicitate acută 4:H302+H312 – Nociv dacă este înghițit sau se află în contact cu pielea. Toxic cronic pentru mediu acvatic 3: H412 - Toxic pentru mediu acvatic cu efecte de lungă durată. Pericol pentru ochi 1: H318 – Provoacă leziuni oculare grave. P264: Spălați bine după manipulare. P270: Nu mâncați, beți sau fumați când utilizați acest produs. P273: A se evita eliberarea în mediu. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ecipament de protecție/ecipament de protecție pentru față.

P305+P351+P338+ P310: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și este ușor de făcut. Apelați imediat un centru medical/medic. P402+P404: A se păstra la loc uscat. A se păstra în recipient bine închis. P501: Aruncați conținutul/recipientele în conformitate cu prevederile legislației curente privind tratarea deșeurilor.

MICROORGANISM	EXPOSURE TIME / CONCENTRATION	
	5 min	15 min
Bacteria and yeast (C.albicans)	1,5%	
Mycobacterium - M.avium		1,5%
Mycobacterium - M.terrae		1,75%
Enveloped viruses, Norovirus, Adenovirus	0,5%	
Poliovirus		1,75%
Spore C.difficile		1,5%
Mould A.niger		1,75%
Spore B.subtilis		1,75%

AS Chemi-Pharm Tânăsnila tee 11, Tânăsnila küla, Saku vald, Harjumaa, 76406, Eesti, www.chemi-pharm.com, tel: +372 6778806

Distribuit în Republica Moldova prin: DitaEstFarm SRL
Sediul social: mun. Chișinău, str.-la Burebista 23, MD-2032
Tel.: +37322405419, e-mail: office@dita.md



+5°C +30°C



081138