

Instrucțiuni de utilizare pentru Fotoliu recoltare a sîngelui

Fotoliu pentru recoltare a sîngelui: model: FT -02

Fotoliu de recoltare destinat examinării clinice și manevrelor ușoare în cabinete și secții spitalicești. Cadru robust din oțel vopsit în câmp electrostatic, stabil și ușor de igienizat. Saltea din burete de densitate medie, tapițată cu piele artificială (lavabilă și rezistentă la dezinfectanți). Secțiuni reglabile în zona spatelui și a genunchilor pentru confortul pacientului. Suporturi de brațe(cotiere) reglabile pe înălțime.

Indicații de utilizare: examinări clinice, proceduri ambulatorii, pansamente, recoltări.

Contraindicații: niciuna, dacă sunt respectate instrucțiunile de utilizare, nu se utilizează pentru transportul pacienților.

Atenționare: verificați stabilitatea pe pardoseală și fixarea cotierelor înainte de utilizare, nu depășiți sarcina maximă, curățați și dezinfectați după fiecare pacient.

Denumirea principalilor parametri și dimensiuni	FT- 02
Structura carcasei	Cadru - oțel vopsit polimer
Lungimea în poziția orizontală	1600mm
Lățimea fotoliului	600mm
Înălțimea fotoliului	520mm
Secțiuni	3
Suporturi de brațe(cotiere) reglabile pe înălțime	da
Suport picioare reglabil manual	da
Spătarul și suportul pentru picioare sunt reglabile până la poziția orizontală a scaunului	da
Greutatea maximă de exploatare	200kg
Culoarea tapiteriei	la alegere
Material la tapițerie	Piele artificială

Reguli pentru utilizarea echipamentului

1. Transportul, depozitarea și operarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii fotoliului de recoltare.
2. Fotoliu de recoltare trebuie utilizat în încăperi închise și uscate, cu o temperatură care să nu fie mai mică de +2°C și mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Fotoliul de recoltare trebuie instalat la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.
5. Protejați echipamentul de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive. Fiți atenți la manipularea substanțelor care lasă pete indelebile.
6. Nu utilizați obiecte ascuțite, acizi, soluții alcaline sau agenți abrazivi pentru curățarea vaselor și a obiectelor sanitare

Îngrijirea suprafețelor

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.
4. Utilizați o cârpă ușor umedă și detergenți normali pentru a curăța țesătura. Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice agresive

Condiții de garanție

- Perioada de garanție este de 24 de luni de la data vânzării produsului.
- **Produsul este scos din serviciul de garanție dacă:** cumpărătorul a încercat să repare singur produsul;
 - au fost detectate modificări neautorizate în proiectarea produsului;
 - daune mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Garanția nu se aplică elementelor de fixare și altor produse achiziționate care nu sunt fabricate de această societate.



Producător: Caravan Express SRL
Republica Moldova
or. Cimișlia, MD-4101



Maraca comerciala ALICOM