

Suprafață

Apă potabilă

Bucătărie

Bazin

Faianță sanitară



PASDEZ

PASDEZ – pastile eficiente, complet solubile în apă, pe bază de dicloroizocianurat de natriu.

Soluția de lucru are efecte : bactericid/levuricid (EN1040, EN 1276:2009/AC:2010, EN 13623:2010, EN 13727:2012+A2:2015, EN 13697:2015+A1:2019), tuberculocid (EN 14348, Mycobacterium terrae), fungicide (EN 1275, EN 13624:2013, EN 1650:2008+A1:2013, EN 13697:2015+A1:2019), virucid (EN 14476 +A1), sporicid (EN 14347, Bacillus subtilis) și algicid.

Domeniul de aplicare: Dezinfectarea suprafețelor ce pot fi spălate în unități medicale, industria cosmetică și farmaceutică, ustensile și sticlărie de laborator, obiecte pentru îngrijirea pacienților, materiale textile albe (lenjerie, îmbrăcăminte de lucru etc.) în cadrul unităților medicale, obiecte de uz industrial și comercial, bariere dezinfectante, coșul de gunoi în industria farmaceutică și cosmetică. Pentru dezinfectarea prin ștergere, imersie, stropire a oualelor, vesele, mijloacelor de transport produse alimentare și a suprafețelor din industria alimentară. Activitatea de dezinfectant chimic pentru sistemele de apă și a purifica apa de alimentare pentru a fi potabilă.

Aplicație practică al preparatului: PASDEZ

Aplicație: Metoda de dezinfectare:	Concetrația: Pastile	Timpul de expunere:	Spectrul de activitate:
Suprafețe din spitale și alte unități medicale (prin ștergere)	1 pastilă/10L de apă	10 min	Bactericidă
	2 pastile/10L de apă	5 min	Bactericidă (<i>Escherichia coli</i>)
	1 pastilă/10L de apă	30 min	Fungicidă
	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
	4 pastile /10 L de apa	30 min.	sporicidă
Dezinfectarea prin ștergere, imersie, stropire a mijloacelor de transport și a suprafețelor din unități medicale	1 pastilă/10L de apă	10 min	Bactericidă
	1 pastilă/10L de apă	30 min	Fungicidă
	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă
Dezinfectarea prin ștergere, imersie, stropire a oualelor, vesele, domeniul alimentar, industrial, gospodăresc și instituțional.	2 pastile/10L de apă	5 min	Bactericidă (<i>Escherichia coli</i>)
	2 pastile/10L de apă	30 min	Bactericidă, levuricidă, fungicidă virucidă, tuberculocidă
Sticlărie de laborator din spitale și alte unități medicale. (prin imersie)	1 pastilă/10L de apă	10 min	Bactericidă
	1 pastilă/10L de apă	30 min	Fungicidă
	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
	4 pastile /10 L de apa	30 min.	sporicidă
Obiecte pentru îngrijirea a pacienților din spitale și alte unități medicale (prin imersie)	1 pastilă/10L de apă	10 min	Bactericidă
	1 pastilă/10L de apă	30 min	Fungicidă
	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
	4 pastile /10 L de apa	30 min.	sporicidă

Materiale textile de culoare alba din unități sanitare. (prin imersie)	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
Utilajul de producere în industria alimentară, farmaceutică, cosmetică.	1 pastilă/10L de apă	10 min	Bactericidă
	1 pastilă/10L de apă	30 min	Fungicidă
	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
Coșuri de gunoi. (Deșeuri medicale)	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
	4 pastile /10 L de apa	30 min.	sporicidă
Barierelor la punctele de trecere	2 pastile /10 L de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă,
Dezinfectarea saunelor, cabine de duș, căzi de baie etc.	1 pastilă/10L de apă	30 min	Bactericidă, Fungicidă
	2 pastile /10 l de apa	30 min.	Bactericidă, fungicidă, virucidă,
Apă potabilă	4 pastile /1m ³ (1000L) de apă	30 min	Anexa nr.4 din Regulamentul 409/2005 Coll
După 30 min de la dezinfecție a apei potabile se masoară concentrația clorului (concentrația recomandată 0,3-1,2mg/l) test «MERK»			
Apă din piscine, inițial de uclere	2-4 pastile/1m ³ (1000L) de apă	24 ore	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă, algicidă.
Apă în bazine de înot, o doză de întreținere	1pastila /1 m ³ de apă	perioada de 5-7 zile	Bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculocidă, algicidă.
	Dacă în urma măsurărilor, clorul activ este de 1.0 vom avea nevoie să îl aducem la concentrația de 1,5 deci pentru o cantitate de 10m ³ se vor mai adăuga 3pastile .		

temperatura soluției de lucru: 23⁰ C

Soluția de lucru pregătită este valabilă 24 de ore.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:

O - oxidant, Xn —nociv, N-periculos pentru mediu

R8: Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu. R22: Nociv în caz de înghițire.

R31: La contact cu acizii degajă gaze toxice. R36/37: Iritant pentru ochi și sistemul respirator.

R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze S: S1/2: A se păstra încuiat și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. S8: A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate. S26: În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

S41: A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. S60: A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos. S61: A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate. 2.3. Alte pericole: nu se recomandă amestecarea cu alte preparate pentru curățare.

CONTINUT

Pastile a 2,7gr, Dicloroizocianurat de sodiu >99%

AMBALAJ

Cutii de plastic 0,5 kg, 1 kg

pH 6,0 (soluția de lucru)

Valabilitate: 3 ani