

Tavă video cu lungime extinsă VP1003 (RADEL)**Tavă video cu nivel unic VP1005 (RADEL)****Tavă video pentru artroscopie VP1006 (RADEL)****Tavă video pentru laparoscopie VP1007 (RADEL)**

Număr de catalog	Descriere
VP1003	Tavă video cu lungime extinsă (RADEL)
VP1005	Tavă video pe un singur nivel (RADEL)
VP1006	Tavă video pentru artroscopie (RADEL)
VP1007	Tavă video pentru laparoscopie (RADEL)

DESCRIERE

Tava video cu lungime extinsă CONMED VP1003 (RADEL), Tava video cu nivel unic VP1005 (RADEL), Tava video pentru artroscopie VP1006 (RADEL) și Tava video pentru laparoscopie VP1007 (RADEL) sunt construite de RADEL și au orificii pentru a facilita penetrarea, evacuarea și uscarea agentului sterilizant. Aceste tăvi sunt concepute să se potrivească cu orice autoclavă standard și sunt fabricate din materiale durabile, biocompatibile, rezistente la coroziune și compatibile cu utilizarea repetată a sterilizării cu abur. Deoarece tăvile prezintă perforații, trebuie să folosiți o folie de sterilizare autorizată de FDA pentru a păstra sterilitatea conținutului. Structurile interioare ale tăvilor au capacitatea de a păstra separat instrumente individuale, pe întreaga durată în care sunt în contact cu tava. Deși aceste tăvi sunt reutilizabile, nu vor face obiectul service-ului sau reparațiilor.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Tava video cu lungime extinsă CONMED VP1003 (RADEL), Tava video cu nivel unic VP1005 (RADEL), Tava video pentru artroscopie VP1006 (RADEL) și Tava video pentru laparoscopie VP1007 (RADEL) sunt destinate ambalării dispozitivelor medicale CONMED (inclusiv instrumente manuale, trocare, capete de cameră, adaptoare, endoscoape, ghiduri de lumină și sisteme punte) care urmează să fie sterilizate de un furnizor de servicii medicale. Acestea sunt concepute astfel încât să permită sterilizarea cu abur a dispozitivelor medicale încastate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Tava video cu lungime extinsă CONMED VP1003 (RADEL), Tava video cu nivel unic VP1005 (RADEL), Tava video pentru artroscopie VP1006 (RADEL) și Tava video pentru laparoscopie VP1007 (RADEL) sunt utilizate pentru încărcarea instrumentelor chirurgicale sau pentru organizarea, sterilizarea, transportul și depozitarea convenabilă a instrumentelor între utilizări.

Tăvile video nu au drept scop păstrarea sterilității, ci trebuie utilizate împreună cu o folie de sterilizare aprobată de FDA, pentru a păstra sterilitatea instrumentelor medicale ambalate.

Tăvi	Metodă	Ciclu	Temperatură	Expunere	Ciclu de uscare	Greutate maximă*	Răcire
VP1003	Abur (învelită)	Previdare	270°F (132°C)	4 minute	35 minute	3,9 lb (1,8 kg)	118 minute
VP1005	Abur (învelită)	Previdare	270°F (132°C)	4 minute	30 minute	9,0 lb (4,1 kg)	67 minute
VP1006	Abur (învelită)	Previdare	270°F (132°C)	4 minute	20 minute	1,1 lb (0,5 kg)	118 minute
VP1007	Abur (învelită)	Previdare	270°F (132°C)	4 minute	25 minute	1,7 lb (0,8 kg)	118 minute

* Greutatea precizată aici se referă la tava încărcată complet și învelită

NOTE:

- Centrul tăvilor este zona cel mai greu de sterilizat și trebuie folosit pentru poziționarea indicatorilor biologici și chimici.
- Validarea a fost efectuată folosind un folie de sterilizare aprobată de FDA.
- Folosiți în timpul procesului de sterilizare numai tăvi care nu sunt stivuite una peste alta.
- Împachetați de două ori tava folosind o folie aprobată de FDA.