

Set de testare rapidă pentru mai multe droguri (Urină)

DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Setul de testare rapidă pentru mai multe droguri (urină) reprezintă un test imunocromatografic rapid pentru detectarea calitativă și simultană a până la șaisprezece dintre următoarele substanțe (droguri) într-o varietate de combinații în urina umană. Concentrațiile limită proiectate pentru aceste droguri sunt după cum urmează:

Test	Cut-off (ng/mL) / Concentrații limită (ng/mL)
Testul AMP (amfetamine)	1000
Testul THC (Marijuana)	50
Testul COC (cocaină)	300
Testul PCP (fenciclidină)	25
Testul MOP/OPI (morfină)	300
Testul MET (metamfamină)	1000
Testul MTD (metadonă)	300
Testul BAR (Secobarbital)	300
Testul BZO benzodiazepine (Oxazepam)	300
Testul TCA (Nortriptilină)	1000
Testul MDMA (Ecstasy)	500
Testul BUP (buprenorfină)	10
Testul EDDP (metabolit metadonă)	100
Testul PPX (propoxifen)	300
Testul ETG (etilglucoronida)	500
Testul K2 (canabis sintetic)	50
Testul TML (Tramadol)	100
Testul MQL (Methaqualone)	300
Testul COT(cotinină)	200
Testul FYL (fentanil)	200
Testul OXY (oxicodonă)	100
Testul KET (Ketamină)	1000

Testul este utilizat pentru a obține un rezultat calitativ vizual și este destinat pentru utilizare de către profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv profesioniștii din punctele de îngrijire, pentru a ajuta la determinarea conformității cu drogurile.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL TESTULUI

Setul de testare rapidă pentru mai multe droguri (urină) este un test imunologic într-o singură etapă în care substanțele marcate chimic (conjugatele drog-proteină) concurează pentru porțiunile limitate de legare a anticorpilor cu drogul, care poate fi prezent în urină. Setul de testare conține benzi de membrană acoperite cu conjugată drog-proteine aplicate pe linia (liniile) de testare. Fiecare bandă, tampon cu aur coloidal conjugat cu anticorpi de drog (substanță) este plasat la un capăt al membranei. În cazul în care drogul/substanța nu este prezent în urină, soluția colorată cu aur coloidal conjugat cu anticorpi, împreună cu soluția eșantionului cromatografic, se deplasează în sus prin acțiune capilară prin membrană către zona imobilizată de conjugat drog-proteină de pe regiunea liniei de testare. Conjugatul colorat anticorp-aur se atașează apoi de conjugatele drog-proteină pentru a forma linii vizibile ca complex de anticorpi cu conjugatul drog (substanță). Prin urmare, formarea precipitantului vizibil în zona de testare are loc atunci

când proba de urină este negativă în ceea ce privește conținutul de drog. Când drogul este prezent în urină, antigenul drog /metabolit concurează cu conjugatul drog-proteină din regiunea liniei de testare pentru anticorpus limitat. Când drogul este prezent în urină, antigenul drog/metabolit concurează cu conjugatul drog-proteină din regiunea benzii de testare pentru anticorpus limitat. În cazul în care drogul este prezent în urină într-o concentrație suficientă, acesta va umple porțiunile limitate de legare a anticorpilor. Acest lucru va preveni atașarea anticorpului colorat (conjugat drog-proteină) și conjugatului de aur coloidal la zona de conjugat drog-proteină din regiunea liniei de testare. Prin urmare, absența liniei colorate pe regiunea de testare indică un rezultat pozitiv. O bandă de control cu o altă reacție antigen/anticorp este adăugată la banda de membrană imunocromatografică în regiunea de control (C) pentru a indica faptul că testul a funcționat corect. Această linie de control ar trebui să apară întotdeauna indiferent de prezența drogului sau a metabolitului. Dacă linia de control nu apare, testul va fi considerat nevalid.

⚠ PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE

- Numai pentru diagnostic profesional in vitro.
- Nu utilizați după data de expirare indicată pe ambalaj. Nu utilizați testul dacă punga din folie este deteriorată. Nu reutilizați testele.
- Acest set conține produse de origine animală. Cunoașterea certificată a originii și/sau a stării sanitare a animalelor nu garantează în totalitate absența agenților patogeni transmisibili. Prin urmare, se recomandă ca aceste produse să fie tratate ca potențial infecțioase și manipulate respectând măsurile de siguranță obișnuite (nu ingerați sau inhalați).
- Evitați contaminarea încrucișată a probelor utilizând un nou recipient de colectare a probelor pentru fiecare specimen obținut.
- Citiți cu atenție întreaga procedură înainte de a efectua orice test.
- Nu mâncați, beți și nu fumați în zona în care sunt manipulate speciile și seturile de testare. Toate probele trebuie manipulate ca și cum ar conține agenți infecțioși. Respectați măsurile de precauție stabilite împotriva pericolelor microbiologice pe parcursul procedurii și urmați procedurile standard pentru eliminarea corectă a probelor. Purtați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi halate de laborator, mănuși de unică folosință și ochelari de protecție la analizarea probelor.
- Umiditatea și temperatura pot afecta negativ rezultatele.
- Materialele de testare utilizate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

COMPOZIȚIE

Materiale furnizate:

- Banda de testare ambalată individual
- Prospectul produsului

Materiale necesare dar care nu sunt furnizate:

- Recipient pentru colectarea probelor
- Cronometru

DEPOZITARE ȘI STABILITATE

- Setul de testare trebuie păstrat la temperaturi de 4-30°C până la data de expirare imprimată pe punga sigilată.
- Păstrați testul în punga sigilată până la utilizare.
- **Nu congelați.**
- Protejați componentele set-ului de contaminare. Nu utilizați dacă există dovezi de contaminare microbiană sau precipitare. Contaminarea biologică a echipamentului de distribuție/dozare, recipientelor sau reactivilor poate duce la rezultate false.


RECOLTAREA SI MANIPULAREA SPECIMENULUI

- Setul de testare rapidă pentru mai multe droguri (urină) este destinat utilizării numai cu mostre de urină umană.
- Poate fi utilizată urina colectată în orice moment al zilei.
- Probele de urină trebuie colectate în recipiente curate și uscate.
- Probele tulburi trebuie centrifugate, filtrate sau lăsate să se depună. Numai supernatantul limpede se va utiliza pentru testare.
- Efectuați testarea imediat după colectarea probei. Nu lăsați speci­me­nele la temperatura camerei pentru perioade îndelungate. Probele de urină pot fi păstrate la 2-8° C timp de până la 2 zile. Pentru depozitarea pe termen lung, probele trebuie păstrate la temperaturi sub -20°C.
- Lăsați probele să ajungă la temperatura camerei înainte de testare. Probele congelate trebuie să fie complet dezghețate și amestecate bine înainte de testare. Evitați congelarea și decongelarea repetată a probelor.
- Dacă speci­me­nele urmează să fie expediate, ambalați-le în conformitate cu toate reglementările aplicabile pentru transportarea agenților etiologici.

PROCEDURA DE TESTARE

Aduceți testele, probele la temperatura camerei (15-30°C) înainte de utilizare.

1. Scoateți testul din punga sigilată și puneți-l pe o suprafață curată și plană. Pentru cele mai bune rezultate, testul trebuie efectuat în termen de o oră.
2. Scoateți capacul de la capătul cardului de testare și scufundați benzile cardului de testare vertical în proba de urină timp de cel puțin 10-15 secunde. Nu atingeți dispozitivul din plastic când scufundați testul.
3. Plasați cardul de testare pe o suprafață plană neabsorbantă, porniți cronometrul și așteptați să apară linia (liniile) roșie. Rezultatele trebuie citite după 5 minute. Nu interpretați rezultatele după 8 minute.

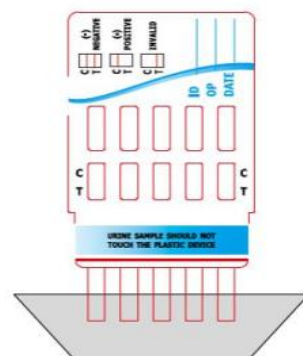

INTERPRETAREA REZULTATELOR




POZITIV:

Doar o linie colorată apare în regiunea de control (C). Nicio linie colorată aparent nu apare în regiunea de testare (T).



NEGATIV:

Pe membrană apar două benzi colorate. O bandă apare în regiunea de control (C) și o altă bandă apare în regiunea de testare (T).

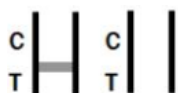

NEVALID:

Linia de control nu apare. Rezultatele oricărui test care nu a produs o linie de control la timpul de citire specificat trebuie să fie eliminate. Vă rugăm să revizuiți procedura și să repetați, utilizând un nou test. Dacă problema persistă, întrerupeți imediat utilizarea setului și contactați distribuitorul local.

NOTĂ:

1. Intensitatea culorii în regiunea de testare (T) poate varia în funcție de concentrația componentelor analizați prezenți în eșantion. Prin urmare, orice nuanță de culoare din regiunea de testare ar trebui să fie considerată că indică un rezultat negativ. Luați aminte că acesta este doar un test calitativ și nu poate determina concentrația de componentelor analizați din eșantion.

2. Volumul insuficient al probei, procedura de operare incorectă sau testele expirate sunt cele mai probabile motive pentru eșecul benzii de control.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

1. Precizie

Au fost efectuate studii de precizie pentru probe cu concentrații de -100% cut-off (concentrații limită), -75% cut-off, -50% cut-off, -25% cut-off, la cut-off, +25% cut-off, +50% cut-off, +75% cut-off și +100% cut-off. Rezultatele obținute sunt rezumate în tabelele de mai jos:

AMP1000

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	47-/3+	24-/26+	49+/1-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	48-/2+	26-/24+	48+/2-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	49-/1+	26-/24+	47+/3-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

THC50

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	49-/1+	24-/26+	47+/3-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	48-/2+	26-/24+	48+/2-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	48-/2+	26-/24+	48+/2-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

COC3

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	48-/2+	24-/26+	47+/3-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	48-/2+	26-/24+	47+/3-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	47-/3+	26-/24+	48+/2-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

PCP25

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

MOR/OPI 300

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

MET 1000

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

MTD300

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

BAR300

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

BZO300

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

TCA1000

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

MDMA500

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

BUP10

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

EDDP100

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

PPX300

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

ETG500

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

K2-50

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	47-/3+	31-/29+	48+/2-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	48-/2+	28-/22+	47+/3-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	47-/3+	28-/22+	49+/1-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

TML100

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

MQL300

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

COT200

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

FYL200

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

OXY100

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

KET1000

Rezultat Drog	-100% cutoff	-75% cutoff	-50% cutoff	-25% cutoff	Cutoff	+25% cutoff	+50% cutoff	+75% cutoff	+100% cutoff
Lot 1	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	24-/26+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 2	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	25-/25+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-
Lot 3	50-/0+	50-/0+	50-/0+	50-/0+	26-/24+	50+/0-	50+/0-	50+/0-	50+/0-

2. Stabilitate

Setul de testare rapidă pentru mai multe droguri (urină) este stabil la temperaturi de 4-30°C (39-86°F) timp de 24 de luni, pe baza studiului de stabilitate accelerată la 50°C și a studiilor de stabilitate în timp real la 4°C și 30°C.

3. Interferență

Compușii care nu au prezentat interferențe la o concentrație de 100 ug/mL sunt rezumați în tabelele următoare.


Acetaminofen	P-Estradiol	Acid oxolinic
Acetofenetidin	Eritromicină	Oximetazonă (oximetazolină)
N-Acetilprocainamidă	Fenoprofen	Papaverină
Acid acetilsalicilic	Furosemid	Penicilina G
Albumină (100 mg/dL)	Acid gentizic	Perfenazină
Aminopirină	Hemoglobină	Fenelzină
Amoxicilină	Hidralazină	Prednison
Ampicilină	Hidroclorotiazidă	(±)-Propranolol
Apomorfina	Hidrocortizon	D-Pseudoefedrina
Acid ascorbic	Acid O-hidroxid hippuric	Chinină
Aspartam	3-Hidroxitiramină	Ranitidină
Atropină	Ibuprofen	Acid salicilic
Acid benzilic	D,L-izoproterenol	Serotonina
Acid benzoic	Isoxsuprină	Sulfametazină
Bilirubină	Ketamină	Sulindac
Hidrat de cloral	Ketoprofen	Tetrahidrocortizon
Cloramfenicol	Labetalol	Tetrahidrocortizon
Clorotiazidă	Loperamidă	Tetrahidrozolină
Clorpromazină	Meperidină	Tiamină
Colesterol	Meprobamat	Tioridazină
Clonidină	Metoxifenamină	Triamteren
Cortizon	Acid nalidixic	Trifluoperazină
(-)-Cotinină	Naloxonă	Trimetoprim
Creatinină	Naltrexonă	DL-triptofan
Deoxicorticosteron	Naproxen	Tiramină
Dextrometorfan	Niacinamidă	DL-tirozină
Diclofenac	Nifedipină	Acid uric
Diflunisal	Noretindronă	Verapamil
Digoxină	Noscapină	Zomepirac
Difenhidramină	(±)-Octopamină	EMDP

Ester metilic al ecgoninei	Acid oxalic	Disopiramida
Maprothuine		

LIMITĂRILE TESTULUI

1. Testul este conceput pentru utilizare numai cu urina umană.
2. Un rezultat pozitiv la oricare dintre teste indică doar prezența unui drog/metabolit și nu indică și nu măsoară intoxicația.
3. În cazul în care un drog/metabolit este determinat în proba de urină, acest lucru nu indică frecvența consumului de droguri și nici nu face distincție între drogul de abuz și anumite alimente sau medicamente.

SIMBOLURI

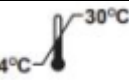	Nu reutilizați		Numai pentru diagnostic in vitro
	A se păstra la 4-30°C		Consultați instrucțiunile pentru utilizare
	Atenție		Numărul lotului
	A se utiliza până la		Conține suficient pentru <n> teste
	A se feri de lumina soarelui		A se menține uscat
	Producător		Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

Versiunea nr.: 02

Data intrării în vigoare: 23-09-2019