


2.3 Ecran tactil

Ecr iniț



Nr.	Nomenclatură	Descriere
1	Zonă de stare	Afișează denumirea ecranului sau starea sistemului video central. Când un ecran tactil este blocat, este afișată această pictogramă. Când un endoscop compatibil cu observarea NBI este conectat, pictograma este afișată în gri. În timpul observării NBI, pictograma este afișată în alb. Când un endoscop compatibil cu observarea AFI este conectat, pictograma este afișată în gri. În timpul observării AFI, pictograma este afișată în alb. Când un endoscop compatibil cu observarea RDI este conectat, pictograma este afișată în gri. În timpul observării RDI, pictograma este afișată în alb. Pictograma este afișată în timpul examinării. Când există date referitoare la o alarmă care nu a fost declanșată, pictograma va fi afișată.
2	Buton de funcție	Comută grupul de funcții. Funcțiile sunt clasificate în funcție de conținut. - Funcții de bază: Butoanele funcțiilor frecvent utilizate sunt afișate în cursul examinării. - Funcții personalizate: Este afișată funcția setată în avans prin intermediul setărilor utilizatorului. - Lista funcțiilor: Sunt afișate butoanele ce urmează să fie utilizate în cursul examinării.
3	Zona de operare a funcțiilor (ecranul inițial)	Aceasta este zona de operare pentru fiecare funcție.
4	Buton personalizabil	Poate fi atribuită orice funcție.
5	Buton pentru regenerarea datelor alarmei	Când există date referitoare la o alarmă care nu a fost declanșată, acest buton va fi afișat. Când utilizatorul apasă butonul pentru reafire, datele referitoare la alarma care nu a fost declanșată sunt afișate din nou pe monitorul de observare și pe ecranul tactil.

Imagine

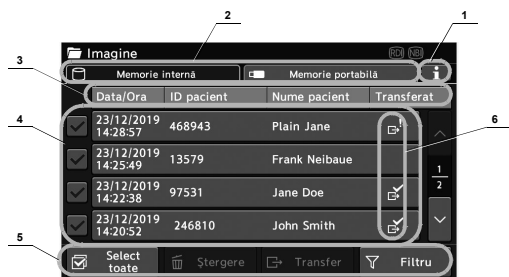

Nr.	Nomenclatură	Descriere
1	Buton informații memorie	Afișează informații referitoare la memorie.
2	Buton de comutare navigare în memorie	Comută pentru navigarea în memoria imaginilor endoscopice.
3	Comutator SUS/JOS	Sortează în ordine ascendentă sau descendentă, după dată, ID pacient, nume pacient și stare export.
4	Zonă de selecție	Selectează date din memoria internă sau memoria portabilă.
5	Zonă de editare	Editează date din memoria internă sau memoria portabilă.
6	Pictograma de stare	Pictograma de stare este afișată atunci când navigarea în memorie este pe „memorie internă” și explorează în memoria internă. Indică faptul că există o imagine care nu a fost transferată către server sau memoria portabilă. Indică faptul că toate imaginile sunt exportate.


Setări



Nr.	Nomenclatură	Descriere
1	Zona de operare a funcțiilor (setări)	Aceasta este zona pentru schimbarea fiecărei setări.

Tastatură software

Cap. 2

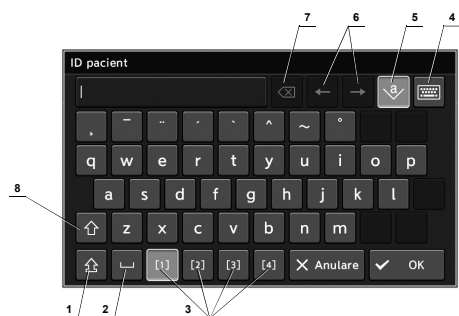


Nr.	Nomenclatură	Descriere
1	Caps Lock	ON/OFF scriere cu majuscule. Când scrierea cu majuscule este activată, se poate comuta între scrierea cu majuscule și cea cu litere mici. Când scrierea cu majuscule este activată, caracterele alfabetic sunt fixate la majuscule. Când scrierea cu majuscule este dezactivată, caracterele alfabetic sunt fixate la litere mici.
2	Spațiu	Introduceți un spațiu.
3	Butoane de schimbare ^{*1}	Butoane de schimbare a tastaturii.
4	Schimbare tastatură	Schimbă tastatura.
5	Introduceți	Comută între modul de inserare caractere și modul de suprascriere caractere. Butonul este evidențiat în modul de inserare caractere și butonul nu este evidențiat în modul de suprascriere caractere.
6	Butoane cu săgeată dreapta și stânga	Mută poziția cursorului.
7	Butonul pentru Backspace	Șterge caracterul din stânga cursorului.
8	Shift	Comută metoda de introducere. Tasta Shift se dezactivează automat după ce este introdus un caracter. Activarea tastei va comuta între scrierea cu majuscule și cea cu litere mici.

*1 Numărul de butoane afișate depinde de tastatura utilizată.


2.4 Panoul posterior

Cap. 2

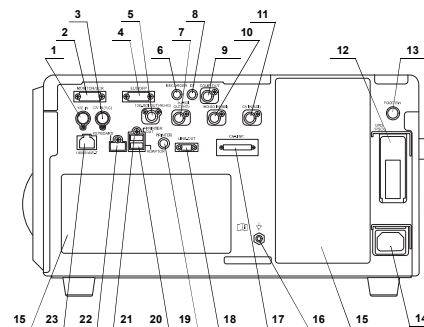

Nr.	Nomenclatură	Descriere
1	Terminal Y/C IN	Conectează următorul dispozitiv: • Unitatea de control PowerSpiral • Centru endoscopic ultrasonic EVIS EUS
2	Terminal MONITOR/UCR	Conectează următoarele dispozitive: • Monitor • Unitate endoscopică de reglare a CO ₂
3	Terminal CV IN (Y/C)	Conectează următoarele dispozitive: • Sistem video central extern
4	Terminal EUS/OF	Conectează următoarele dispozitive: • Centru endoscopic ultrasonic EVIS EUS • Pompă de spălare OLYMPUS
5	Terminal 12G-SDI OUT (4K/HD)	Conectează următorul dispozitiv: • Monitor
6	Terminal RECORDER	Conectează următoarele dispozitive: • Înregistrator video
7	Terminal 3G-SDI OUT (HD)	Conectează următoarele dispozitive: • Monitor • Înregistrator video

2.6 Monitor

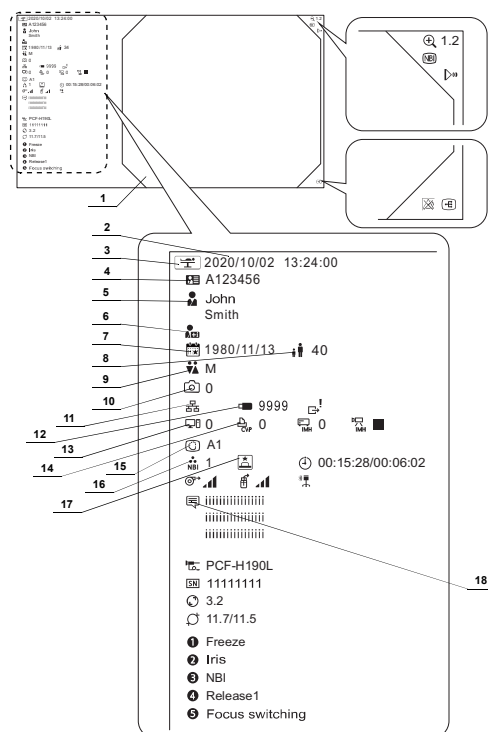

Cap. 2

Cap. 2

2.6 Monitor

Nr.	Nomenclatură	Descriere
19	Raport zoom electronic	Afișează raportul de zoom electronic care este în execuție. Când raportul de zoom electronic este „x 1,0”, pictograma nu este afișată.
20	Observare optico-digitală/TXI	Indică faptul că sistemul execută funcția NBI. Indică faptul că sistemul execută funcția RDI. Indică faptul că sistemul execută funcția AFI. Indică faptul că sistemul execută funcția TXI.
21	Focalizare	Indică faptul că funcția de focalizare rulează.
22	Afișare imagine din sursă externă	Indică faptul că este afișată o imagine din sursă externă. Indică faptul că se face afișare POP în ecran divizat atunci când se afișează imagine SDTV.
23	Stare alarmă inactivă	Afișat atunci când există date referitoare la o alarmă care nu sunt afișate.
24	Imagine netrimisă/Transferă imagini	Indică faptul că există o imagine netransferată. Indică faptul că imaginea este transferată.
25	Contor IMH	Afișează numărul de imagini endoscopice înregistrate la IMH.
26	Înregistrare video IMH	Indică faptul că înregistratorul video nu este conectat. Indică faptul că înregistrarea la IMH este în desfășurare. Indică faptul că înregistrarea la IMH este pusă pe pauză. Indică faptul că înregistrarea la IMH este oprită.
27	Cronometru	Afișează timpul scurs / timpul divizat.
28	Unitate de detectare a poziției endoscopului	Unitatea de detectare a poziției endoscopului este în operare. Indică faptul că unitatea de detectare a poziției endoscopului este deconectată de la sistemul video central.
29	Alimentare cu apă	Indică faptul că starea alimentării cu apă este ON. Indică faptul că starea alimentării cu apă este OFF. Indică faptul că pompa de spălare OLYMPUS este deconectată de la sistemul video central.
30	Alimentare cu aer	Indică faptul că starea alimentării cu aer este ON. Indică faptul că starea alimentării cu aer este OFF. Indică faptul că starea de acționare a unității endoscopice de reglare a CO ₂ este ON. Indică faptul că starea de acționare a unității endoscopice de reglare a CO ₂ este OFF. Indică faptul că unitatea endoscopică de reglare a CO ₂ este deconectată de la sistemul video central.
31	Nivelul presiunii aerului/CO ₂	Indică nivelul presiunii aerului.
32	Cantitatea de apă alimentată	Indică cantitatea de apă alimentată.

Nr.	Nomenclatură	Descriere
33	Informații despre endoscop	 Afășează numele modelului endoscopului conectat la sistemul video central.
		 Afășează numărul de serie al endoscopului conectat la sistemul video central.
		 Afășează diametrul intern al canalului endoscopului conectat la sistemul video central.
		 Afășează diametrul extern al capătului distal și diametrul extern al tubului de inserție al endoscopului conectat la sistemul video central.
		 Afășează funcția atribuită teleîntrerupătorului 1.
		 Afășează funcția atribuită teleîntrerupătorului 2.
		 Afășează funcția atribuită teleîntrerupătorului 3.
		 Afășează funcția atribuită teleîntrerupătorului 4.
		 Afășează funcția atribuită teleîntrerupătorului 5.
		Remarcă 1: Când teleîntrerupătorul endoscopului este apăsat, culoarea de fundal a caracterului respectivului teleîntrerupător al endoscopului se schimbă. Pentru a verifica funcția atribuită comutatorului de telecomandă, puneți setarea pe „Afișare” conform
		■ Comutarea între afișarea și ascunderea informațiilor endoscopului” din manualul de instrucțiuni.

Cap. 2



Remarcă 2:
Când este utilizat un endoscop din seria 180/260, operarea acestuia se face după cum urmează.

- Toate funcțiile atribuite teleîntrerupătorului endoscopului conform informațiilor endoscopului sunt afișate ca opțiune DF. De asemenea, nu sunt afișate diametrul canalului și diametrul vârfului/extern.
- Când este conectat un endoscop, unele informații sunt ascunse timp de aproximativ 5 secunde.

Când este utilizat un endoscop din seria 180/260, operarea acestuia se face după cum urmează.

- Toate funcțiile atribuite teleîntrerupătorului endoscopului conform informațiilor endoscopului sunt afișate ca opțiune DF. De asemenea, nu sunt afișate diametrul intern al canalului, diametrul extern al capătului distal și diametrul extern al tubului de inserție al endoscopului.