



Dulapuri medicale seria MD

Instrucția de asamblare

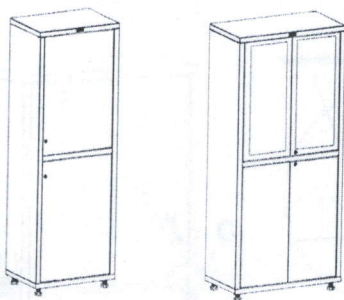


Dulapuri cu uși singulare (dispărțiturile de sus și de jos cu uși și polițe din oțel) și
Dulapuri cu uși duble (dispărțitura de sus cu uși din sticlă în rama din oțel și polițe din oțel, dispărțitura de jos cu uși și polițe din oțel)

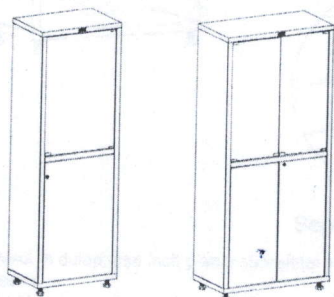

Dulapuri cu uși singulare și duble (dispărțitura de sus cu uși și polițe din sticlă; dispărțitura de jos cu uși și polițe din oțel)


Înainte de a începe asamblarea

1. Faceți asamblarea pe suprafața neabrazivă (covrolină, linoleum, carton ș.a.) pentru a evita zgîrieturi pe suprafețele pieselor în timpul asamblării.
2. Fiți atenți la utilizarea șurubelniței, partea rotativă poate zgîria acoperirea dulapului.

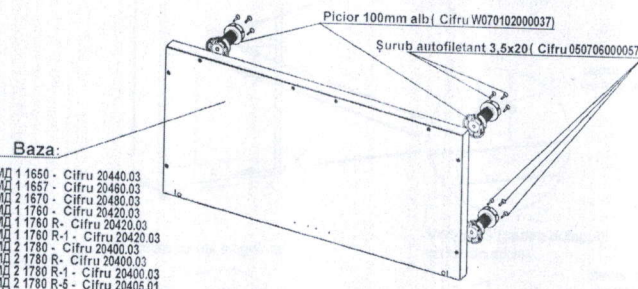


Baza:
MD 1 1650 - Cifru 20440.03
MD 2 1657 - Cifru 20460.03
MD 2 1670 - Cifru 20480.03
MD 1 1760 - Cifru 20420.03
MD 1 1760 R - Cifru 20420.03
MD 1 1780 R-1 - Cifru 20420.03
MD 2 1780 - Cifru 20460.03
MD 2 1780 R - Cifru 20400.03
MD 2 1780 R-1 - Cifru 20400.03
MD 2 1780 R-S - Cifru 20406.01

- 1 Instalați picioare reglabile pe polița de baza a dulapului, folosind șuruburi autofiletante 3.5x20.

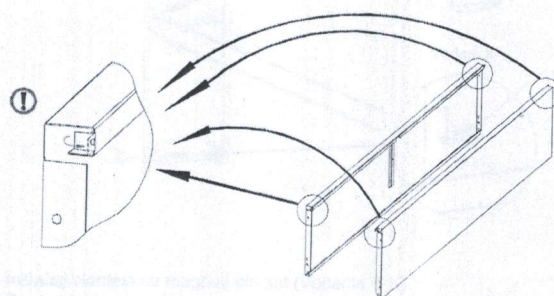

- 2 Îndreptați limbele pe colțurile ale pereților laterale (cite 2 limbi la un perete), care sînt indoite din cauza particularităților tehnologiei de producere.

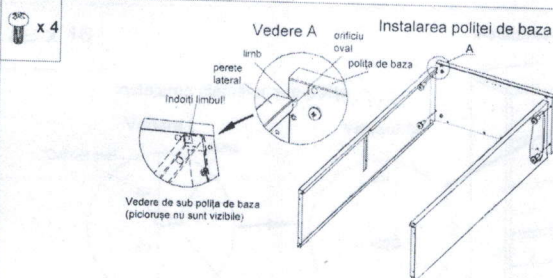


1. Fixați peretele lateral drept la polița de baza așa, în cît limbul să intre în orificiul oval pe polița de baza (priviți Vedere A)
2. Înșurubați șuruburile conform desenului
3. Îndoii limbul peretelui lateral
4. Fixați peretele lateral stîng la polița de baza în aceeași mod

3


x 11
uși singulare

x 16
uși duble

Fixarea peretelui lateral și peretelui din spate

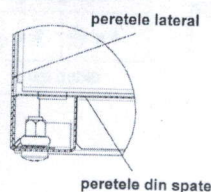


Instalarea peretelui (pereților) din spate

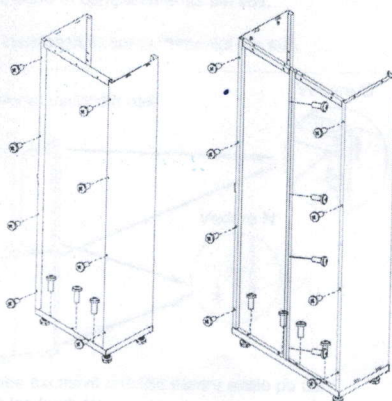

1. Plasați dulapul vertical
 2. Instalați peretele (țil) din spate
 3. Înșurubați șuruburile conform desenului
- Nota: Fiți atenți la instalarea peretelui (țil) din spate. Muchia sudată trebuie să uită în sus cu cavitatea deschisă.

4

x 4 Asamblarea amplificatorului golului



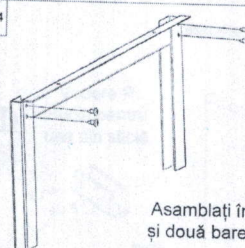


Asamblați între ele partea orizontală amplificatorului și două bare. Folosiți pentru asta 4 șuruburi 4.2 x 13.

x 3
uși singulare

x 4
uși duble


Instalarea capacului

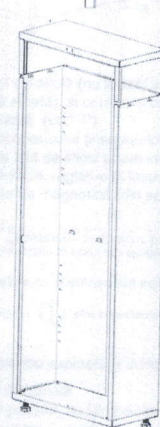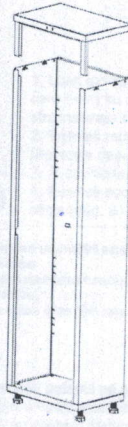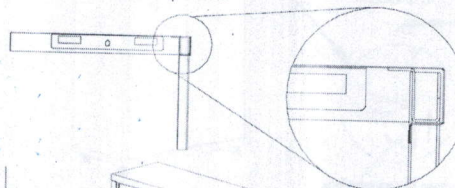

1. Instalați amplificatorul golului în capacul așa cum este arătat pe desen. Amplificatorul se amplasează după îndoitura frontală a capacului.
2. Instalați capacul pe dulapul. Barele amplificatorului trebuie să intre în îndoirile frontale ale pereților laterali ale dulapului.
3. Trageți capacul în jos uniform pînă auziți sfârșit caracteristică.
4. Fixați capacul cu șuruburi.

5

Instalarea separatorului


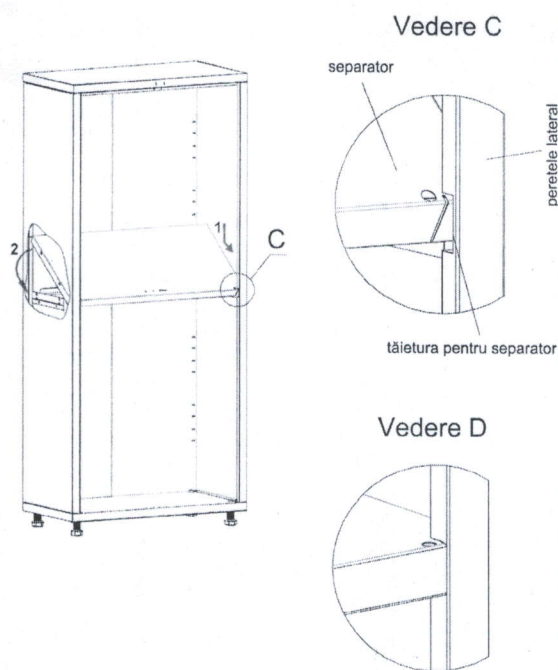


Separator instalat

1. Introduceți separatorul în dulap, așa încât planul suprafeței să fie sub unghi, cum este arătat pe desen.
2. Împingeți separatorul jos așa, ca partea lui frontală să intre în tăieturile pe perețile laterale (vedere C)
3. Împingeți jos partea din spate a separatorului, așa încât planul suprafeței să devină paralel cu baza dulapului, și îndoiți-l lateral și din spate a separatorului să intre în cavitățile respective pe perețile laterale și din spate a dulapului. (Vedere D)

6

Instalarea clanțelor cu magneți

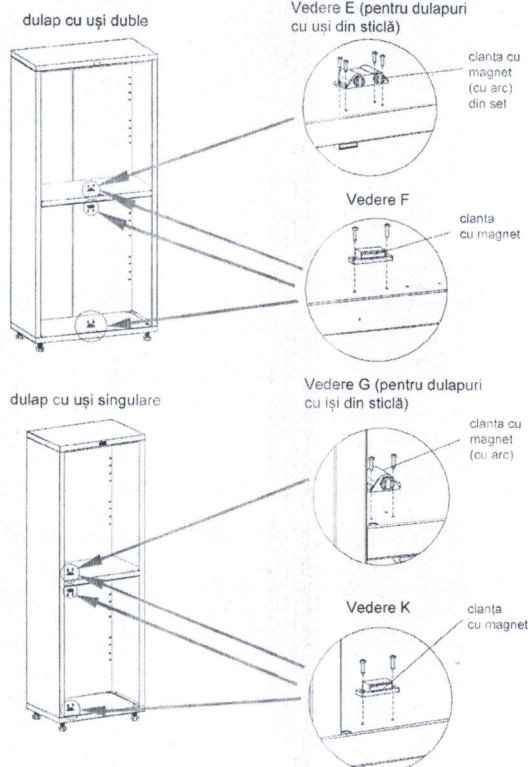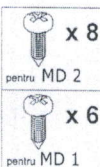


1. Instalați clanțele cu magneți din set (Vederile E-K)
2. Pentru dulapuri cu uși din sticlă, în compartiment de sus se instalează clanța cu magnet cu arc și mecanism lift (Vederile E și G)

7

Important: Nu înșurubați clanțele cu magneți complet. Mai întâi reglați ieșitura ușilor și apoi înșurubați șuruburile complet.


x 16

Instalarea polițelor

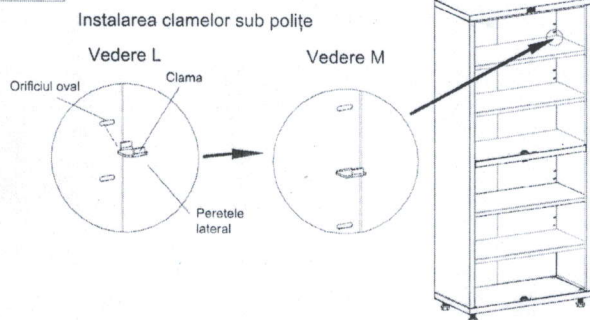


1. Instalați clamele sub polițe (vezi ved. L și M)
 2. Instalați polițe în dulap, două în compartimentul din sus, și două jos.
- Notă: Polițe din sticlă se instalează în compartimentul din sus.

8

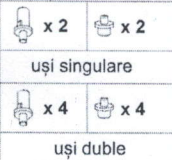

Instalarea ușilor din oțel

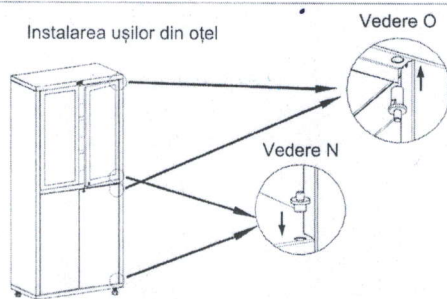


1. Mai întâi curățați de vopsea excesivă orificiile pentru axele pe uși
2. Instalați axele din plastic jos (ved. N)
3. Sus instalați axele cu tijă din metal (ved. O)
4. Instalați ușa așa ca axa să intre în orificiul ușii, apoi apăsați pe tija și instalați ușa, tija trebuie să intre complet în orificiul respectiv sus.
5. Pe toate ușile din metal se fixează mînieri. Pentru instalarea mînierilor folosiți șuruburi M4x6 și șaibe M4

9

Notă: Puteți pune sub axa de jos șaiba de reglare (intră în set) pentru reglarea spațiului între ușa și corpul dulapului

Instalarea ușilor din sticlă

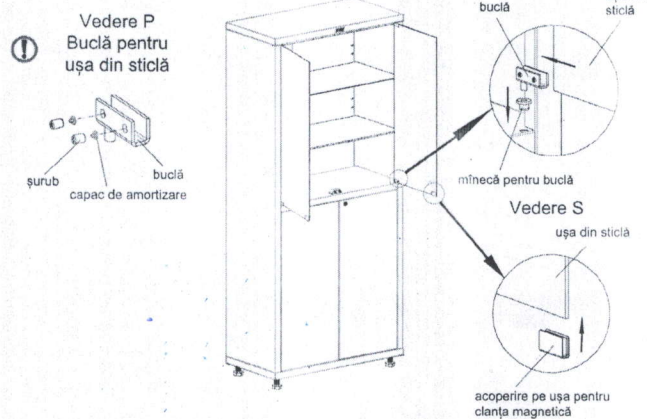

1. Luați din set bucle pentru uși din sticlă (nu folosiți acoperiri în forma de buclă care merg cu clanta magnetică arcată), și controlați ca pe marginea șuruburilor să fie instalate capace de amortizare (ved. P)
2. Instalați mînece în orificiile acoperișului și separatorului. În mînece instalați bucle, preventiv deșurubați șuruburile așa ca sticla să poată intra în cavitatea buclei. (ved. R)
3. În cavitățile buclelor instalați sticla, reglați-o și înșurubați șuruburi pe bucle
4. Instalați acoperirea pentru clanta magnetică (din setul clantei magnetice arcate) pe sticla (ved. S)

10

Comentarii la Instrucția

1. Ordinea asamblării este indicată cu număr de ordine în colțul din stînga jos pe schemă fiecărei operații de asamblare
2. Tip și cantitatea furniturii pentru fiecare operație de asamblare sînt indicate sus în colțul din stînga schemei respective.
3. Punctele instrucției care sînt indicate cu simbolul ! sînt importante pentru asamblare și trebuie să fie executate.

Recomandări pentru exploatarea dulapurilor medicale

1. Instalați dulapul pe suprafața netedă orizontală
2. Pentru compensarea particularităților podelei, reglați picioarele (după punctele 8 și 9)
3. Vă recomandăm instalarea ușilor chiar pe locul exploatarea dulapului
4. Încărcarea dulapului (cu documente, medicamente, ș.a.) începeți de la compartimentul din jos
5. Se recomandă distribuirea greutății pe suprafața polițelor pentru încărcarea uniformă

Notă

1. Sînt posibile modificări în construcția, care nu sînt indicate în instrucția prezentă