



Dispozitivul de înțepare este utilizat cu lancete sterile de unică folosință compatibile, pentru a recolta ușor și practic fără durere sângele capilar din vârful degetului. Dispozitivul de înțepare este destinat utilizării doar pe un singur pacient.

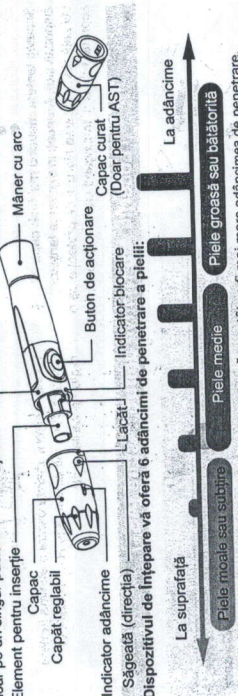

ATENȚIE

- ▶ Nu împărțiți nicodată lanțetele și dispozitivul de înțepare cu cineva.
- ▶ Utilizați întotdeauna o lanțetă sterilă. Lanțetele sunt de unică folosință.
- ▶ Evitați contaminarea lanțetelor și a dispozitivului cu cremă de mâini, uleiuri, murdărie sau resturi.
- ▶ Lanțetele folosite sunt de period biologic. Aruncați-le în conformitate cu reglementările locale.
- ▶ Nu reutilizați lanțetele. Utilizați întotdeauna o lanțetă nouă, sterilă pentru testare.

Setarea Dispozitivului de Înțepare

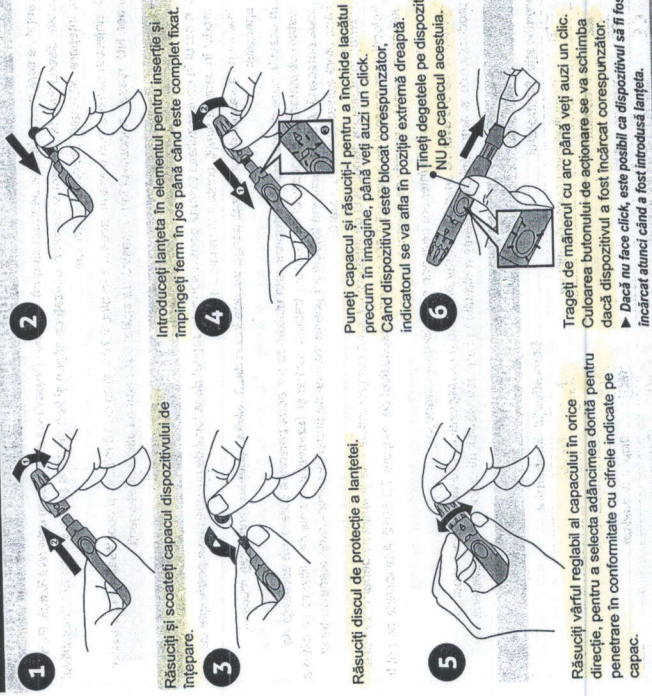

NOTA

- Înainte de a colecta picătura de sânge:
- ▶ Spălați-vă și uscați-vă mâinile.
 - ▶ Selectați locul de puncție din vârful degetului.
 - ▶ Masajați locul de puncție timp de aproximativ 20 de secunde înainte de penetrare.
 - ▶ Curățați locul de puncție folosind un tampon de bumbac umezit cu alcool 70% și lăsați să se usuce.

