


**LİDOKAİN İÇERİKLİ
KAYDIRICI JEL**

OneGel

LİDOKAİN İÇERİKLİ KAYDIRICI JEL (STERİL)

KULLANIM ALANLARI

- ONEGEL üretral kateterizasyon, endoskopi ve sistoskopi gibi üretral uygulamalar sırasında, kateter ve diğer tıbbi cihazların kayganlaştırılması için kullanılan steril kaydırıcı jeldir.
- Kayganlaştırıcı bir jel olarak rektal ve kolonik uygulamalar için de kullanılabilir.
- Jelin kaydırıcı etkisi; üretral, kolon ve rektal mukozaya ile kateter/diğer tıbbi cihazlar arasında oluşabilecek travmanın önlenmesine yardımcı olur. Bu sayede hasta rahatlar ve iyatrojenik yaralanma nedeniyle oluşan spastisite veya rahatsızlığı minimuma indirir.

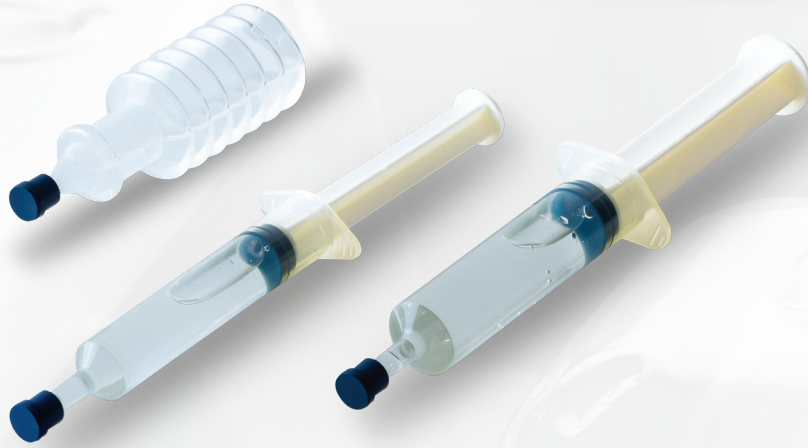

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek kullanımlıktır.
- Suda çözünebilir.
- Şırınga ve akordeon tüp sayesinde kullanımı kolaydır.
- Dokuya zarar gelme riskini ortadan kaldırır.
- Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için antiseptik Klorheksidin Glukonat içerir.
- Lidokain Hidroklorür, ağrıyı önlemek amacıyla kullanılan lokal anestetik ajandır.
- Anestetik etkisi ile ağrısız bir kateterizasyon sağlar.
- Hidroksietilselüloz ile sağlanan kaydırıcı özelliği sayesinde hasta rahatlar ve iyatrojenik yaralanma nedeniyle oluşan spastisite ve rahatsızlığını minimalize eder.



Lidokain
İçerir



Anesteziktir



Antiseptiktir

	ONEGEL 6ML	ONEGEL 11ML	ONEGEL 12,5GR
Ürün Referans Kodu	KAF G27-6	KAF G27-11	KAF G27-12,5
Ambalaj Şekli	Şırınga	Şırınga	Akordeon Tüp
GMDN	37717	37717	37717
Paketleme	25 x 6ml / Kutu	25 x 11ml / Kutu	25 x 12,5gr / Kutu





KULLANIM ŞEKLİ

- Steril ambalajı yırtarak şırıngayı/akordeon tüpü (6ml/11ml/12.5g) çıkartınız.
- Şırınganın/Akordeon tüpünün ucunda bulunan tıpayı çıkartınız.
- Uygulamayı kolaylaştırmak için bir damla jel akıtınız.
- Şırınga ucunu kayganlaştırılacak bölgeye yerleştirdikten sonra, şırınganın/akordeon tüpünün pistonuna basarak bir miktar ONEGEL Lidokain İçerikli Kaydırıcı Jeli yavaşça sıkınız.



BİLEŞİMİ





- Saf Su
- Propilen Glikol, Hidroksietilselüloz (Kayganlaştırıcı)
- Lidokain Hidroklorür (Lokal Anestezik)
- Klorheksidin Glukonat - %20 Konsantrasyon (Antiseptik)
- Metil Hidroksibenzoat (Koruyucu)
- Propil Hidroksibenzoat (Koruyucu)

93 / 42 / EEC
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında
Sinif III Tıbbi Cihazdır.



STERILE



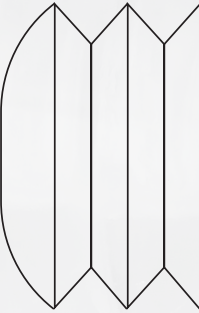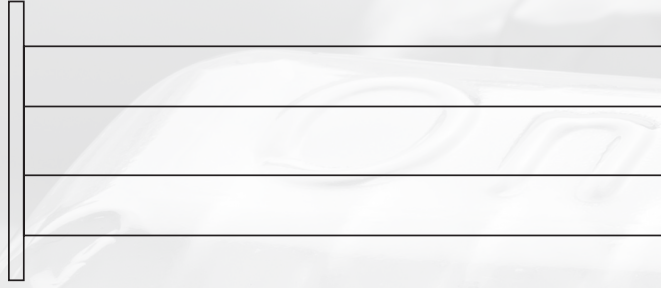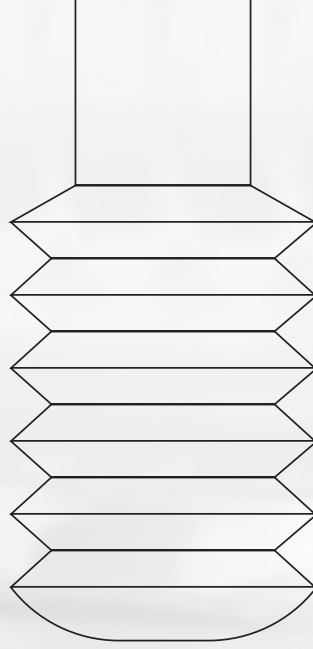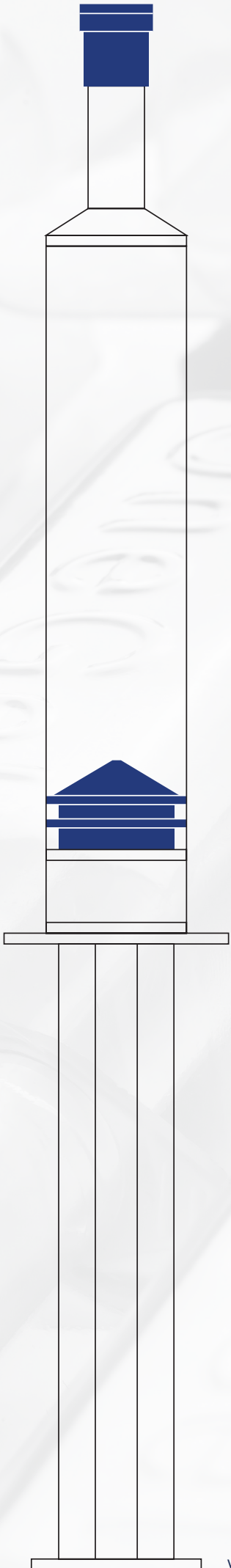

KAF GRUP
SAĞLIK HİZMETLERİ

KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.kafgrup.com | www.wancare.com.tr | info@kafgrup.com | wan.care & kafgrup