

Aerodesin® 2000

Soluție gata pentru utilizare

Pentru uz profesional

Spray dezinfectant gata de utilizare pentru

dezinfectarea rapidă a dispozitivelor medicale

Compoziția

100 gr. soluție conțin:

32.5 gr. Propan-1-ol, 18.0 gr. Etanol (denaturat), 0.1 gr. Glutaraldehidă

Domeniul de aplicare

Dezinfectarea rapidă a

- Suprafețelor mici și al obiectelor, aerului
- Suprafețelor greu accesibile

Modul de aplicare / dozare

Utilizați doar nediluat!

Pulverizați Aerodesin® 2000 pe obiecte și suprafețe de la o distanță de aprox. 30 cm. Obiectele și suprafețele trebuie să fie complet umezite (max. 50 ml/m² din suprafață).

Dezinfectarea suprafețelor

Profilaxia infecțiilor nosocomiale	concentrat – 1 min.
Virucidal contra virusuri încapsulate* incl. HBV/HCV/HIV	concentrat – 30 sec.
virucidal*	concentrat – 60 min.
Polyomavirus (SV 40)	concentrat – 1 min.
Adeno și Norovirus (MNV)	concentrat – 30 sec.

*În conformitate cu recomandarea Institutului Robert Koch Berli / Buletinul Federal de Sănătate 01/2004

Avertismente / depozitare

- Aerodesin® 2000 este inflamabil (punctul de aprindere conform DIN 51755: 28°C).
- A nu pulveriza în flacără deschisă și/sau orice obiecte incandescente!
- Păstrați dezinfectantul în locuri uscate, răcoroase dar fără îngheț și bine ventilate, departe de surse de aprindere și nu lăsați la îndemâna copiilor.
- A nu utiliza după expirarea termenului de valabilitate.

Proprietăți

- Control asupra bacteriilor (incl. TBC), fungilor și virusurilor
- Acțiune și uscare rapidă după pulverizare pe suprafețe și obiecte
- Aromă de proștețime
- Proprietăți bune de umezire
- Dezinfectant-spray gata de utilizare flacoane pulverizator fără aerosoli

Măsuri speciale de precauție

a) Contramăsuri în cazul utilizării necorespunzătoare:

Aerodesin® 2000 este iritant la contactul cu membranele mucoase (ochi, gât, stomac, intestin etc.). În cazul iritațiilor respective diluați imediat produsul. Dacă produsul a fost înghițit, impuneți pacientul să bea cantitate mare de apă; după contact cu alte membrane mucoase, clătiți bine cu multă apă. În toate cazurile solicitați imediat asistență medicală.

b) Diverse: Nu pulverizați pe materiale care nu sunt compatibile cu alcoolul (suprafețe lăcuite, plexiglas etc.)

c) Utilizați dezinfectanții în siguranță. Întotdeauna citiți eticheta și informația despre produs înainte de utilizare.

Certificat și menționat în listele corespunzătoare.

Ambalare standard / Unități de transport

12 x 1 lit. cu pulverizator

2 x 5 lit. canistră

Producător: **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D – 12247 Berlin

Tel.: +49-30-77992-0 Telefax: +49-30-77992-219



Reprezentant oficial în Republica MOLDOVA



MD 2025 Mun. Chisinau, str. Grenoble 21

Tel: (022) 904 – 006, 904 – 005, Fax: 904 – 007

