



Lampa bactericida UVC, putere 55W, pentru sterilizare, cu sensor absenta si taimer cu telecomanda

Manual de instructiuni

Lampa UVC cu montare pe perete (SAU mobila pe picior) este recomandată pentru incinte (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc) cu o suprafata de sterilizare pana la 60mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tubului UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 10800 ore;
- Tip montare : perete sau mobile (dupa cerere);
- Alimentare: 220V / 50Hz;
- Termen de garanție 12 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE: pozitionati lampa la peretele camerei si urmati instructiunile:

Suprafata Timp sterilizare

- 0-30 mp 10 min
- 30-60 mp 15 min
- 60-80 mp 20 min
- 80 – 100 mp 30 min
- 100-120 mp 90 min

APLICATII:

- Dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE:

1. Îndepărtați corpul protector și tubul bactericid.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul cutiei veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete sau stativ.
4. După montare puteți porni tensiunea de alimentare a instalației electrice.
5. In cazul utilizarii cu telecomanda -taimer folositi butoanele de pe taimer in corespundere cu spatiu care doriti sal prelucrati.

ATENȚIE!!!

1. Inainte de a porni lampa asigurati-va ca in camera respectiva nu au ramas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioleta reflectata dintr-o oglinda de exemplu poate fi la fel de daunatoare pentru piele si ochi.
3. Nu lasati aparatul nesupravegheat, la indemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernamant (cel mai bine inchideti cu cheia camera in care acesta functioneaza).
4. Lumina ultravioleta UV-C directa este daunatoare pentru piele si mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.

5. Nu va dezinfecati mainile cu aceasta lampa, folositi lumina ultravioleta UV-C doar pentru dezinfecția obiectelor. Pentru maini folositi sapunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviti direct la lampa in timpul utilizarii.
7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii si in general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate sa fie expuse la lumina directa a lampii UV-C.
8. Opriti lampa atunci cand doriti sa o curatati.
9. Daca temperatura camerei este mai mica de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. Dupa ce s-a incheiat ciclul de sterilizarea al incaperii nu intrati imediat, incinta trebuie aerisita minim 15 minute.
11. Nu lasati copiii in preajma dispozitivului.

Acest simbol indica faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separate și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.