


MASCARILLA PRESTON

SA99279001



EN14683 : 2019 + AC : 2019

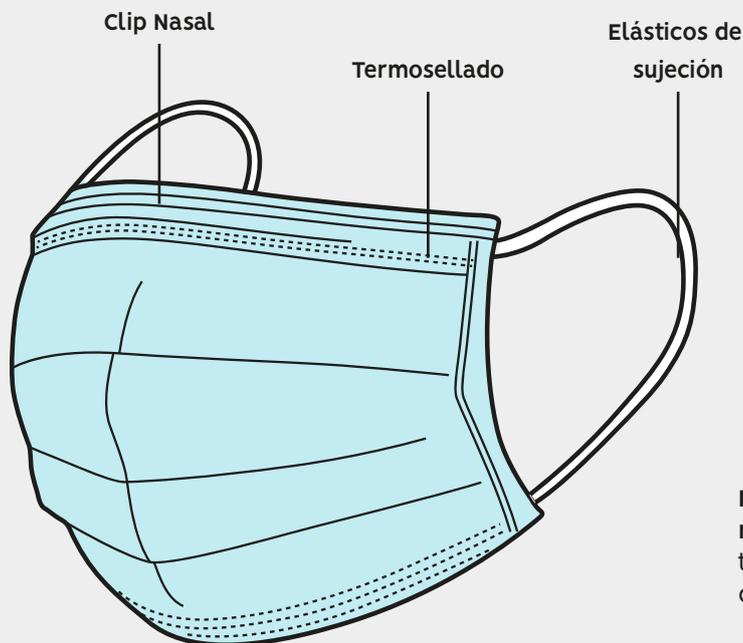

Mascarilla Quirúrgica TIPO I de uso médico. Triple capa con acabados termosellados, elásticos de sujeción y clip nasal.

Especificaciones

A prueba de polen y anti-gotitas

Alta eficacia de filtración de bacterias (BFE) $\geq 95\%$

Respirabilidad (Presión diferencial): $<40 \text{ Pa/cm}^2$

Limpieza microbiana: $\leq 30 \text{ UFC/g}$

Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE

Norma EN14683:2019 + AC:2019 sobre Mascarillas Quirúrgicas de un solo uso

Recomendaciones

Uso exclusivo en adultos

Mascarilla desechable de uso personal. No reutilizar.

Se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h.

Composición

1- Tejido no tejido de Polipropileno

2- Tejido no tejido soplado (Meltblown)


3- Tejido no tejido de Polipropileno

Logística

Pack 50 uds

Caja 2000 uds

Medidas de la caja: 53x40x36,5 cm

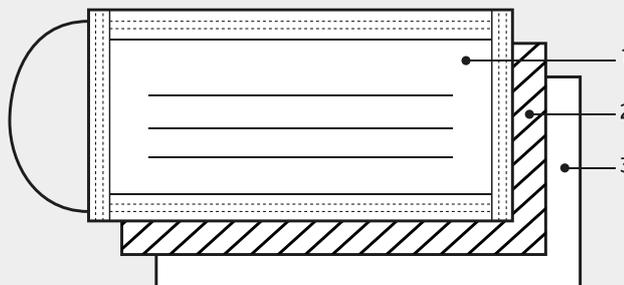

INSTRUCCIONES DE USO

Colocación de la mascarilla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica antes de su manipulación.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. Sostener la mascarilla desde el exterior y extender los elásticos a ambos lados de las orejas.
3. Bajar la parte inferior de la mascarilla hasta cubrir la barbilla.
4. Ajustar la banda nasal a la nariz y verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Bien sellada y sin molestias respiratorias.
5. Una vez colocada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, debe volver a lavarse las manos.


Retirada de la mascarilla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica.
2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
3. Desecharla en un recipiente provisto de una bolsa de plástico.
4. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica.

El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de Sanidad.

PACKING

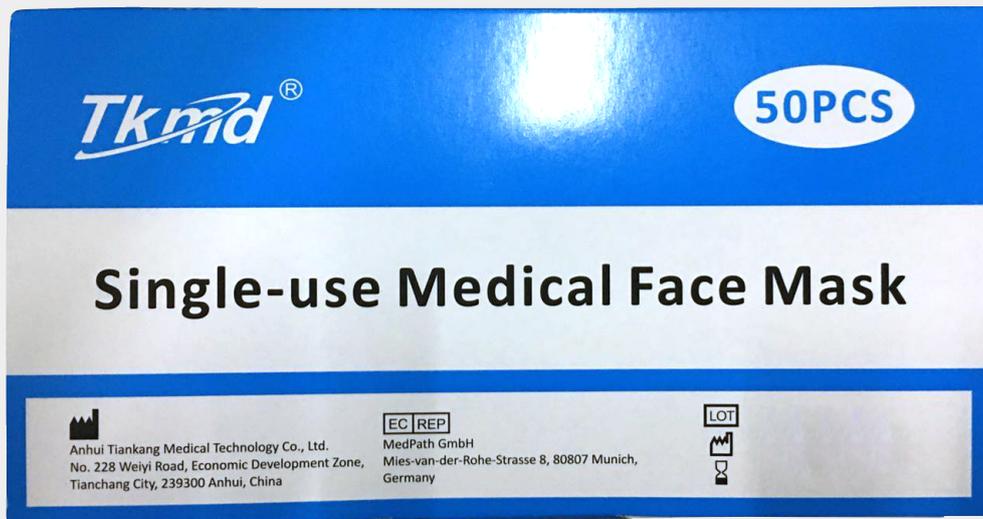

 Anhui Tiangkang Medical Technology Co., Ltd.
No. 228 Weiyi Road, Economic Development Zone,
Tianchang City, 239300 Anhui, China

 MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich,
Germany

 LOT
