

VELOX SPRAY TEA TONIC

Lichid pentru dezinfectarea rapidă a suprafețelor medicale mici, în aziluri de bătrâni, sanatorii, săli de fitness și SPA, saloane de frizerie și cosmetică, cabinete de masaj, grădinițe, școli, precum și pentru dezinfectarea suprafețelor care intră sau nu în contact cu produsele alimentare. Este excelent pentru dezinfectarea suprafețelor, cum ar fi blaturi, mese, clanțe, mânere, precum și pentru accesoriile de frizerie sau cosmetică. Se poate utiliza, de asemenea, pentru echipamentele medicale non-invazive, de ex: scaune de operare, aparatură medicală, echipamente de recuperare. Produsul are o acțiune bactericidă, drojdicidă, antituberculoasă și virucidă limitată (împotriva Rotavirusului, Norovirusului) precum și o acțiune virucidă împotriva virusurilor încapsulate (inclusiv Vaccinia, BVDV, coronavirus, HIV, HBV, HCV).

Mod de utilizare: Pulverizați produsul pe suprafață de la o distanță de aproximativ 30 cm, asigurându-vă că aceasta este complet acoperită. Așteptați 30 de secunde. În cazul dezinfectării suprafețelor care vin în contact cu alimentele, acestea trebuie clătite cu apă potabilă. Celelalte suprafețe nu necesită clătire cu apă. Nu aplicați produsul pe suprafețe sensibile la alcool (spre exemplu, sticlă acrilică).

Eficacitate microbiologică: Bacterii EN 13727: 2015: 30s, EN 16615: 2015: 30s, EN 13697:2015+A1:2019: 30s (condiții curate), 60s (condiții murdare), EN 17387:2021: 5 min. Ciuperci asemănătoare drojdiei (C. albicans) EN 13624:2019(2013): 15s, EN 16615: 2015: 30s, EN 13697: 2015+A1:2019: 30s (condiții curate), EN 17387:2021: 5 min. Mycobacterium Tuberculosis (M. terrae) EN 14348: 2005: 60s, Vaccinia virus (extindere pe virusurile anvelopate) EN 14476:2013+A2:2019: 30s, MNV (Norovirus murin) EN 14476:2013+A2:2019: 60 s. (condiții murdare).*

Ingrediente: 100 g de produs conține: etanol - 63,7 g (CAS 64-17-5, CE: 200-578-6), propan-2-ol - 6,3 g (CAS: 67-63-0, CE: 200-661-7).

Fraze de pericol: Fraze de pericol: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H226 - Lichid și vapori inflamabili.

Fraze de precauție: P101: Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor, P210: A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumați, P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă sunt prezente și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați clătirea. P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P403+P233: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje. În cazul unui incident medical, producătorul și URPL trebuie să fie notificate. (*AVIZ: 4968BIO/02/12.24)