



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0298/2025
din	12.09.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Incidin active

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

ECOLAB, Austria, Wien, Rivergate, Handelskai 92, 1200 Vienna, Austria, Centrul de Afaceri IDEO
et. 2, Sos. Pacurari nr. 138, Iasi, cod 700545, Romania, 1200

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

ECOLAB GMBH, Germania, Monheim am Rhein, EcolabAllee 1, 40789,

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 29.12.2025.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0298/2025 din 12.09.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Incidin active

VI. Date privind substanța(ile) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Acid peracetic (in situ)	201-186-8	79-21-0	1000 mg/L în soluția de 2%

VII. Forma de condiționare

Pulberegaleti de 1,5 kg sau plicuri de 160g/

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Galeți de 1,5 kg sau plicuri de 160g

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

2. Aria de aplicare

Curățarea și dezinfectia suprafețelor, a aparaturii și a echipamentelor medicale

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă și levuricidă în condiții de murdărie	DIN EN 16615:2015	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans	1,0%	5 min
Bactericidă în condiții de murdărie	NF EN 13697 (Juin 2015)	Pseudomonas aeruginosa CIP 103467, Escherichia coli CIP 54127, Enterococcus hirae CIP 5855, Staphylococcus aureus CIP 483	0,10%	5 min
Bactericidă în condiții de murdărie	NF EN 13727 + A2 (Décembre 2015)	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1,00%	5 min
Fungicidă în condiții de curățenie	NF EN 13624 (November 2013)	Aspergillus brasiliensis	2,00%	15 min
Fungicidă în condiții de curățenie	NF EN 13624 (November 2013)	Aspergillus brasiliensis	1%	60 min
Levuricidă în condiții de murdărie	NF EN 13697 (Juin 2015)	Candida albicans	1,00%	5 min
Levuricidă în	NF EN 13624 (novembre	Candida albicans	1,0%	5 min

condiții de murdărie	2013)			
Micobacterici dă în condiții de murdărie	DIN EN 16615:2015	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium	2,0%	5 min
Micobacterici dă în condiții de murdărie	NF EN 14348 (Juin 2005)	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	1,00%	10 min
Sporicidă în condiții de curățenie	NF EN 13704(Avril 2002)	Bacillus subtilis	1,00%	15 min
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2013+A1:2015/pr A2:2016 (01/2017)	Adenovirus type 5	0,5%,1,00%,2% 0,5%,1,00%	10 min,60 min
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2013+A1:2015/pr A2:2016 (01/2017)	Murine Norovirus- S99	0.5%, 1.0%, 2% 0.1%, 0.5%, 1.0%	10 min, 60 min
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2013+A1:2015/pr A2:2016 (01/2017)	Poliovirus type 1	1,0%	60 min

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Ștergere	1,0%	5 minute – efect bactericid, levuricid
Ștergere	1,0%	10 minute – efect bactericid, levuricid, micobactericid, virucid
Ștergere	2,0%	15 minute – efect bactericid, levuricid, virucid, tuberculocid, micobactericid, sporicid

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS05, pericol
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H318 Provoacă leziuni oculare grave
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	P305, P351, P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

