

1.0 INTRODUCERE

Este recomandat ca personalul să studieze acest manual înainte de a încerca să opereze, să curețe sau să sterilizeze acest echipament sau cel asociat. Utilizarea sigură și eficientă a acestui echipament necesită înțelegerea și respectarea tuturor avertismentelor, atenționărilor de precauție și instrucțiunilor marcate pe produs și incluse în acest manual.



Acest echipament este proiectat pentru a fi folosit de profesioniștii din sănătate complet familiarizați cu tehnicile și instrucțiunile necesare pentru utilizarea echipamentului. Periodicitatea service-ului, astfel cum este prezentat în secțiunea „3.4 Programul de întreținere“, este necesară pentru a menține echipamentul la performanțele sale de funcționare optimă.

1.1 Principiul de funcționare

Piesa de mână „shaver” este alimentată electric de consola chirurgicală pentru a oferi viteză mare, forță rotativă la accesoriu (lama de ras, freză pentru ras sau atașament) pentru rezeccția țesuturilor. Piesa de mână „shaver” este controlată prin acționarea butoanelor de pe piesa de mână sau cu ajutorul unui comutator de picior. O sursă de aspirație este conectată la piesa de mână „shaver” pentru a atrage țesutul în lama de ras și a scoate țesutul din locul chirurgical.

Consultați manualul de instrucțiuni al consolei chirurgicale ConMed Linvatec înainte de a utiliza acest echipament.

1.2 Indicații de utilizare

D9820 / D9824 Piesa de mână „shaver” și accesoriile lor efectuează tăierea țesuturilor moi și a osului. Domeniile de aplicare includ proceduri chirurgicale artroscopice, picior, mână și ortopedice.

D4200 / D4240 Piesa de mână „shaver” și accesoriile lor realizează o tăiere a țesutului moale și osos. Domeniile de aplicare includ proceduri chirurgicale artroscopice, picior, mână, ortopedice și otorinolaringologice.

1.3 Utilizare intenționată

La fel ca indicațiile de utilizare de mai sus.

1.4 Contraindicații

Nu sunt.

1.5 Avertismente și precauții

Nu săriți peste această secțiune. Conține avertismente și precauții care trebuie înțelese în profunzime înainte de a folosi oricare dintre echipamente. Lipsa de înțelegere sau respectarea acestor avertismente și precauții poate duce la rănirea sau chiar moartea pacientului.



Cuvintele **AVERTIZARE**, **PRECAUȚIE** și **NOTĂ** poartă semnificații specifice și trebuie citite cu atenție.

AVERTIZARE: Un avertisment conține informații critice cu privire la reacții adverse grave și potențiale pericole pentru siguranță care pot apărea în utilizarea corespunzătoare sau în utilizarea greșită a echipamentului. Nerespectarea informațiilor sau a informațiilor prezentate într-un avertisment poate duce la vătămări sau alte reacții adverse grave la pacient și / sau la personalul chirurgical.



PRECAUȚIE: O precauție conține instrucțiuni pentru orice îngrijire specială care trebuie exercitată de către practicant pentru utilizarea sigură și eficientă a echipamentului. Nerespectarea informațiilor sau a procedurilor prezentate într-o precauție poate duce la deteriorarea echipamentului.

