



ООО «ПРОТЭКС-ЦЕНТР»

г. Коломна, ул. Комсомольская, д. 13

тел. 8 (496) 614-84-75,

8 (800) 100-75-51 (бесплатный звонок)

E-mail: info@protex-centr.ru

[http: www.protex-centr.ru](http://www.protex-centr.ru)

**ПАМЯТКА
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ**



ООО «ПРОТЭКС-ЦЕНТР»

изготавливает и бесплатно обеспечивает современными удобными и надежными протезами молочной железы всех льготных категорий граждан (женщин) Московской области, нуждающихся в протезировании ПМЖ. К протезу выдается 2 лифа-крепления* различной цветовой гаммы.

Для заказа протеза федеральными льготниками (при наличии группы инвалидности) необходимо предоставить: паспорт, справку МСЭК об инвалидности, Индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, направление на протезирование из Фонда социального страхования, Свидетельство пенсионного страхования СНИЛС.

Для заказа протеза региональными льготниками необходимо предоставить: Учетную карту выдачи протезно-ортопедических изделий и направление из Управления социальной защиты населения.

* В зависимости от условий обеспечения.

Протез молочной железы представляет собой гелеобразную массу телесного цвета в оболочке из полиуретановой пленки.

Протез естественно выглядит, сохраняет тепло тела, восстанавливает равновесие на ампутированной стороне.

Протез молочной железы вставляется в бюстгальтер со специальным клапаном, либо в чашу бюстгальтера.

Протез сохранит свою форму и будет служить Вам долго, позволяя купание в морской (или хлорированной) воде, если Вы будете следовать нашим рекомендациям по его использованию:

- избегать сильного его сжатия;
- не помещать в тесный бюстгальтер;
- не допускать контакта с острыми и колющими предметами;
- поддерживать его чистоту;
- хранить в оригинальной упаковке в период, когда он не используется.

Внимание! Протез рекомендуется мыть в теплой воде с детским мылом, ополаскивать теплой водой и вытирать насухо.

Уважаемые женщины! Чтобы улучшить самочувствие и избежать осложнений после мастэктомии, мы рекомендуем Вам ежедневно выполнять комплекс упражнений лечебной гимнастики:

Компрессионный рукав стирается по мере загрязнения в нейтральной среде (детский шампунь или мыло). После полоскания рукав не отжимать, а промокнуть махровым полотенцем. Сушить рукав следует на горизонтальной поверхности. **Категорически запрещается сушить рукав на бельевой веревке, на спинке стула и в вертикальном положении и использовать для мытья вещества, содержащие хлор или любые другие отбеливатели.**

Необходимо беречь отечную руку и стараться:

- не спать на больной стороне;
- в лежачем положении размещать руку так, чтобы она была в приподнятом положении;
- избегать на отечной руке измерение давления и введение любых инъекций;
- не поднимать отечной рукой тяжести свыше 1 кг.

При любых воспалительных явлениях на отечной руке следует немедленно обратиться к лечащему врачу.

Если Вы внимательно прочтете эту памятку и последуете всем нашим советам, то Ваше протезирование будет полным и успешным.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экзопротез предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию и для восполнения контура груди и дефицита тканей в подмышечной и подключичной областях; Форма экзопротеза симметричная и асимметричная (правый или левый); Размерный ряд экзопротеза не менее 00 не более 11; Материал экзопротеза гелеобразующий силиконовый двухкомпонентный компаунд и полиуретановая пленка.

Чехлы для экзопротеза молочной железы:

Чехол для экзопротеза предназначен для обеспечения сохранности экзопротеза при носке, форма чехла для экзопротеза симметричная и асимметричная (правый или левый), размерный ряд чехла для экзопротеза не менее 00 не более 11, материал чехла для экзопротеза безаллергенный трикотажный хлопчато-бумажный материал или аналог.

Бюстгальтера для экзопротеза молочной железы:

Бюстгальтер (лиф-крепления) предназначен для крепления к телу экзопротеза молочной железы за счет вшитого в чашку кармана из безаллергенной ткани, полнота бюстгальтера (лифа-крепления) А, В, С, D, E, F, G или по индивидуальному размеру инвалида, размерный ряд бюстгальтера (лифа-крепления) не менее 55 см, не более 110 см с шагом не более 5 см или по индивидуальному размеру инвалида, материал бюстгальтера (лифа-крепления) - безаллергенная вышитая ткань или кружевное полотно, или аналог на хлопчато-бумажной подкладке, на узких или широких бретелях, застежка крючки-петли.

КОМПЛЕКТНОСТЬ*

- ☐ Экзопротез молочной железы;
- ☐ Чехлы для экзопротеза молочной железы;
- ☐ Бюстгальтера для экзопротеза молочной железы.

* Отмечается упаковщиком в зависимости от условий обеспечения/приобретения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в сухом отапливаемом помещении с температурой воздуха от +5С до +25С и относительной влажностью воздуха не выше 80%.