



BIGUANID FLÄCHE N

Lichid concentrat pentru dezinfectia și curățarea suprafețelor

Domeniul de aplicare:

dezinfectează și curăță toate tipurile de suprafețe și inventar medical, toate domeniile din industria alimentară și cantina bucătăriei.

Compoziție:

-16 % compuși cuaternari de amoniu
-benzyl –C-12-16- alchili dimetilați,
-cloruri

Proprietăți antimicrobiene:

-bactericid
-tuberculocid
-fungicid
-virucid

Compatibilitate:

Biguanid Flache N este compatibil cu orice tip de suprafață. Totodată, soluția nu este compatibilă cu uleiurile naturale și sintetice, săpunurile sulfonate, alți detergenți, și alți surfactanți anionici.

Domenii de utilizare:

Biguanid Flache N este recomandat pentru dezinfectia și curățarea (fără aldehide) a dispozitivelor medicale (ex: masti respiratorii și incubatoare, dezinfectia și curățarea instrumentarului medical și a tuturor tipurilor de suprafețe, ex: - podele din PVC/linoleum, sticla acrilică - dezinfectia și curățarea cazilor - dezinfectia suprafețelor din industria alimentară și a cantinelor (certificat de

DVG pentru dezinfectia în industria alimentară).

Mod de utilizare

Soluția de lucru se prepară cu apă rece de la robinet prin adăugarea cantității recomandate de lichid concentrat și se amestecă bine. Acum soluția este gata pentru utilizare. Suprafețele se șterg bine cu soluția dată. Instrumentele sau aparatele medicale, care se pot dezambla, se desfac în componente. Instrumentele sau părțile componente ale acestora se introduc în soluția de lucru imediat după utilizare, având grijă ca acestea să fie scufundate complet și evitând formarea bulelor de aer. După trecerea timpului de acțiune recomandat, instrumentele se clătesc bine cu apă distilată.

Dozaj pentru 1l soluție de lucru

SCOP	Concentrația	Timp de acțiune
Eficacitate virucida, tuberculocida	0.5%	60 min
	1%	30 min
	1.5%	15 min
Eficacitate fungicida	0.5%	90 min
	1%	60 min
	1.25%	30 min
	1.5%	15 min
Eficacitate bactericida	0.05%	60 min
	0.1%	30 min
	0.25%	15 min
	0.5%	5 min

Concentrație (%)	Soluție (ml)	Apa (ml)
0.05	0.5	999.5
0.1	1.0	999.0
0.25	2.5	997.5
0.5	5.0	995.0
1	10.0	990.0
1.25	12.5	987.5
1.5	15.0	985.0

***Produsul posedă certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară al produsului biodestructiv sub Nr. 1 din 21.06.2019 cu valabilitatea certificatului până la 11.06.2029**