

REF		CONTENT	SYSTEM
06390552001	06390552500	▽ 400	Analizorul de microscopie cobas u 701

Română**Scopul utilizării**

cobas u cuvette este o casetă care conține cuve pentru determinarea cantitativă in vitro a eritrocitelor și a leucocitelor, determinarea semicantitativă a celulelor epiteliale scuamoase și nescuamoase, a bacteriilor, a cilindrilor hialini și determinarea calitativă a cilindrilor patologici, a cristalelor, a levurilor, a mucusului și a spermei în urină cu analizorul de microscopie **cobas u 701**. Aceste determinări sunt utile în evaluarea tulburărilor renale și a infecțiilor de tract urinar.

Exclusiv pentru uz profesional.

Prezentare generală

Cuvele sunt utilizate pentru a oferi posibilitatea efectuării examenului sedimentului urinar cu analizorul de microscopie **cobas u 701**.

Precauții și avertismente

Destinat utilizării de către personalul de laborator pentru diagnosticul in vitro. Luați măsurile de precauție normale necesare pentru manipularea tuturor reactivilor de laborator.

Deșeuri infecțioase sau microbiene:

Avertisment: manipulați deșeurile ca și cum ar fi materiale cu potențial de risc biologic. Eliminați deșeurile în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de laborator acceptate.

Pericole pentru mediul înconjurător:

Aplicați toate reglementările locale relevante privind eliminarea pentru a o efectua în condiții de siguranță.

Fișa cu date de securitate poate fi pusă la dispoziția utilizatorului de specialitate, la cerere.

Depozitare și stabilitate

Depozitați **cobas u** cuvette la 2-40 °C.

Materialele furnizate

- [REF] 06390552001, **cobas u** cuvette cu 400 de cuve

Materialele necesare (nefurnizate)


- [REF] 06390501001, analizor de microscopie **cobas u 701**
- Echipament general de laborator

Manipularea

Gata de utilizare.

1. Desfaceți cutia de hârtie și scoateți **cobas u** cuvette.
2. Îndepărtați folia de plastic de pe recipientul cuvei cu ajutorul foarfecelor.
3. Introduceți imediat **cobas u** cuvette în analizorul de microscopie **cobas u 701**.

Respectați instrucțiunile afișate pe ecran de sistemul de asistență al instrumentului privind introducerea și poziționarea corectă.

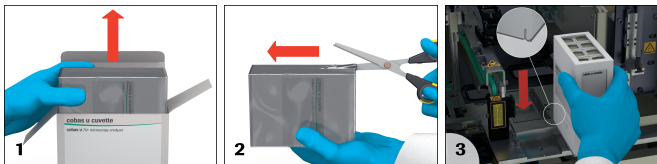

Notă: Nu deschideți **cobas u** cuvette.

Nu atingeți cuvele. Este interzisă reintroducerea cuvelor în recipientul pentru cuvă, deoarece în acest caz nu se poate garanta performanța măsurătorii efectuate de sistem.

Nu scoateți recipientul care conține cuvele incomplet utilizate în timpul funcționării analizorului.

Țineți întotdeauna recipientul pentru cuve parțial folosite în poziție verticală odată cu scoaterea acestuia din analizorul de microscopie **cobas u 701**.

Inversarea poziției recipientului pentru cuve poate afecta posibilitatea utilizării cuvelor rămase.

Pentru o efectuare optimă a testului, urmați instrucțiunile din acest document pentru analizorul respectiv. Consultați manualul de utilizare corespunzător pentru instrucțiuni privind testele specifice analizorului.

Performanța aplicațiilor nevalidate de compania Roche nu este garantată și trebuie definite de utilizator.

Date de performanță

Consultați manualul utilizatorului corespunzător pentru informații privind funcționarea.

Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare corespunzător pentru analizorul vizat și Fișele de metode ale tuturor componentelor necesare.

În această Fișă privind metoda se utilizează întotdeauna punctul ca separator zecimal, pentru a marca linia de separație dintre partea întreagă și cea fracțională a unui numeral zecimal. Nu se utilizează separatoare pentru mii.

Orice incident grav survenit la utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

Simboluri

Roche Diagnostics utilizează următoarele simboluri și semne suplimentare față de cele prezentate în standardul ISO 15223-1 (pentru SUA: consultați navifyportal.roche.com pentru definiția simbolurilor utilizate):

CONTENT	Conținutul kitului
SYSTEM	Analizoare/instrumente pe care pot fi folosiți reactivii
REAGENT	Reactiv
CALIBRATOR	Calibrator
→	Volum pentru reconstitui
GTIN	Numărul global al articolului comercial
UDI	Cod unic de identificare al produsului
Rx only	Doar pentru SUA: Atenție: Legile federale restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai la indicația unui medic.

Adăugările, ștergerile sau modificările sunt indicate de o bară de modificare din margine.

© 2024, Roche Diagnostics

Produs în Ungaria



For USA: Rx only



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germania
www.roche.com

+800 5505 6606



Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256, SUA

+1 800 4282336

