

ANIOS OXY'FLOOR



Detergent dezinfectant pardoseli și suprafețe generale

Curățare și dezinfectie cu spectru larg a pardoselilor și suprafețelor generale (suprafețe de lucru, mese de pat reglabile, mână curentă...)

- Pulbere fără miros
- Acțiune dublă: curățare și dezinfectie în mod simultan
- Alternativă la clor
- Doză simplă - plic: fără risc de supradozaj



ANIOS OXY'FLOOR

Curățare și dezinfecție cu spectru larg a pardoselilor și suprafețelor generale (suprafețe de lucru, mese de pat reglabile, mână curentă...)

Caracteristicile produsului

- Acid peracetic eliberator de pulbere
- Pulbere albă cu granulometrie scăzută
- Pulbere higroscopică (a se păstra departe de umiditate)
- pH după diluare (între 0,5% - 2%) cu apă de la robinet: min. 8 - max. 10
- Formulare fără perborat
- Soluție de culoare albastră după diluare
- Soluția de lucru poate fi folosită până la 8 ore

Proprietăți microbiologice

EFICACITATE	CONCENTRAȚIE	TIMP DE CONTACT
Bactericid conform EN 13727 / EN 16615	0.5%	5 min*
Levuricid conform EN 13624 / EN 16615	0.5%	5 min*
Fungicid conform EN 13624	2.0%	30 min*
Tuberculocid și micobactericid conform EN 14348	0.5%	15 min*
Spectru virucid limitat conform EN 14476	0.5%	5 min*
Virucid conform EN 14476	0.5%	30 min*
Sporicid conform EN 17126	0.5%	60 min*
Sporicid împotriva C. difficile conform EN 17126/EN 17846	2.0%	60 min*
Sporicid împotriva C. difficile conform EN 17126/EN 17846	1.0%	60 min**

* condiții de murdărie ** condiții de curățenie

Informații despre ambalare și comandă

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD DE COMANDĂ
Recipient ANIOS OXY'FLOOR	4 x 1 kg	3113110

LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France
Tél. +33 3 20 67 67 67

Informații locale:

ECOLAB GmbH

Rivergate
Handelskai 92
1200 Wien, Austria
Tel.: +43 1 715 25 50-0

ECOLAB GmbH - Viena sucursala Iași

Centrul de Afaceri „IDEO” Iași
Șos. Păcurari nr. 138, Etaj 2
700545 Iași, România
Tel.: +40 232-222 210

Zonă de aplicare

Curățare și dezinfecție cu spectru larg a pardoselilor și suprafețelor generale (suprafețe de lucru, mese de pat reglabile, mână curentă...).

Instrucțiuni de folosire

Pudră concentrată.

Recipient 1kg: Se dizolvă în apă caldă la concentrația dorită. De exemplu, pentru a obține o concentrația de 0.5% (5 g/l), adăugați o lingură de dozare pentru 5 litri.

Soluția de lucru poate fi utilizată până la 8 ore. Aplicați o cantitate suficientă (+/- 30 ml/m²). Respectați timpul de contact indicat precum și condițiile pentru activitatea antimicrobiană necesară. Dacă este utilizat în condiții de curățenie, curățați suprafața în prealabil (utilizați un mop/lavetă curată) pentru fiecare etapă). Clătirea nu este necesară decât dacă pielea vine în contact cu suprafața. Pentru frecvența de utilizare și curățarea echipamentului de aplicare, consultați planul de igienă stabilit.

Compoziție

100 g pulbere conține: 38,1g percarbonat de sodiu, 30g tetraacetilendiamină și 2,38g clorură de alchil (C12-C14) dimetilbenzilamoniu (ADBAC (C12-C14)). Producție extemporanee de acid peracetic, la diluarea în apă.

100g de soluție de lucru produs (diluție 0,5%) conține: 0,075g acid peracetic (CAS N° 79-21-0) (generat din tetraacetilendiamină (TAED) și percarbonat de sodiu), 0,01g clorură de alchil (C12-C14) dimetilbenzilamoniu (ADBAC (C12-C14)) (CAS N° 85409-22-9).

Depozitare

Depozitare: între +5°C și +25°C.

Biocid: A se utiliza în siguranță

Vă rugăm să citiți eticheta și informațiile despre produs.



PRODUS BIOCID DESTINAT DEZINFECTĂRII
SUPRAFEȚELOR (GRUPA 1 - TP2).
NUMAI PENTRU ÎZ PROFESIONAL.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™