



ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Паспорт

Счетная камера с сеткой Фукса-Розенталя

1. Назначение

Предназначена для подсчета клеток и частиц в заданном объеме жидкости.

2. Основные технические характеристики

1. Изготавливается из монолитного стекла.
2. На сетке камеры нанесено 256 больших квадратов.
3. Сетка нанесена методом гравировки:
 - Сторона малого квадрата - $0,25 \pm 0,001$ мм
 - Сторона большого квадрата - $1,0 \pm 0,001$ мм
 - Сторона сетки - $4,0 \pm 0,003$ мм
 - Глубина камеры - $0,2 \pm 0,005$ мм
 - Площадь сетки - $16,0$ мм²
 - Объем камеры - $3,2$ мм³
4. В комплект входят покровные стекла в количестве 5 штук., специально полированные для обеспечения заданной точности объема камеры.



3. Принцип работы

Счетная камера с сеткой Фукса-Розенталя представляет собой стеклянную пластину, в центре которой вырезано углубление прямоугольной формы. На дне углубления выгравированы две сетки.

После наложения (притирания) на пластину покровного стекла образуется собственно камера глубиной 0,2 мм и объемом (над каждой сеткой) 3,2 мм³, закрытая с двух боковых сторон, а с двух других сторон имеются капиллярные щели, через которые заполняют камеру. Притирание осуществляют до появления в зоне контакта пластины и покровного стекла так называемых колец Ньютона.

При работе с камерой ее рабочие поверхности должны быть чистыми и сухими! Во время подсчета недопустимо наличие пузырей воздуха на сетке камеры, так как это мешает точности подсчета!

4. Техническое обслуживание

- камеру следует хранить в сухом месте;
- после использования камеру необходимо продезинфицировать 6% раствором перекиси водорода и вытереть мягкой салфеткой;
- при работе необходимо пользоваться резиновыми перчатками и соблюдать общие меры предосторожности;

5. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69. Камера должна храниться в закрытом помещении при температуре от 5 до 35°C и относительной влажности не более 80%.

6. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделие не должно подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

7. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель Китай. Гарантийный срок — 12 месяцев с момента продажи.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.

Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель Китай. Гарантийный срок — 12 месяцев с момента продажи.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.



Емкости для окраски препаратов



Предназначены для окрашивания микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлены из химико-лабораторного стекла. Индивидуальная упаковка.

№ п/п	Артикул	Наименование	Внутр. размеры основания, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объем рабочего раствора при полной загрузке, мл
Произведено в Китае для ООО «МиниМед»						
1	12001401	Емкость на 5 стекол вертикально (емкость Коплина)	32×32±1,0	86±1,0	106±2,0	65
2	12001403	Емкость на 10 стекол горизонтально (емкость Шиффердекера)	77×57±1,0	29±1,0	49±1,0	105
Производитель: ООО «МиниМед», Россия (ТУ 4320-012-29508133-2009)						
3	12001404	Емкость на 20 стекол (под держатель ДПС-20, арт. 12005105)	85×80±1,0	40±1,0	55±1,0	210
Произведено в Китае для ООО «МиниМед»						
4	12001402	Емкость на 30 стекол (под штатив-рамку, арт. 12005107)	75×65±1,0	85±1,0	100±1,0	500
5	12001408	Емкость на 60 стекол (под штатив-рамку, арт. 12005217)	150×85±1,0	80±1,0	95±1,0	860

Камера хроматографическая

ТУ 4320-012-29508133-2009

Предназначена для проведения процедур тонкослойной хроматографии в условиях частичного или полного насыщения атмосферы камеры парами растворителя.

Комплектуется крышкой.

Размер, мм - (215±1,0)×(166±1,0)×(90±1,0).

Глубина камеры, мм - 155±2,5.

Общий объем, л - 1,5.

Используемые пластины, мм - 100×100, 150×150.

Изготовлена из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.

Артикул 12010507



Счетная камера с сеткой Фукса-Розенталя

Предназначена для подсчета клеток и частиц в заданном объеме жидкости. Сетка нанесена методом гравировки. На камере нанесены 16 больших квадратов. Каждый большой квадрат подразделен на 16 малых квадратов. В комплект входят 5 покровных стекол, футляр. Индивидуальная упаковка.

Технические характеристики	
Сторона малого квадрата сетки, мм	0,25±0,001
Сторона большого квадрата сетки, мм	1,0±0,001
Сторона сетки, мм	4,0±0,003
Площадь сетки, мм ²	16,0±0,05
Глубина камеры, мм	0,2±0,005
Объем камеры, мм ³	3,2±0,04

Артикул 12007401

