


STERISEPT WIPES

Șervețele fără alcool pentru dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale

- Fără alcooli, aldehide, fenoli și polihexametilen biguanid
- Combină curățarea și dezinfecția
- Compatibile cu toate materialele

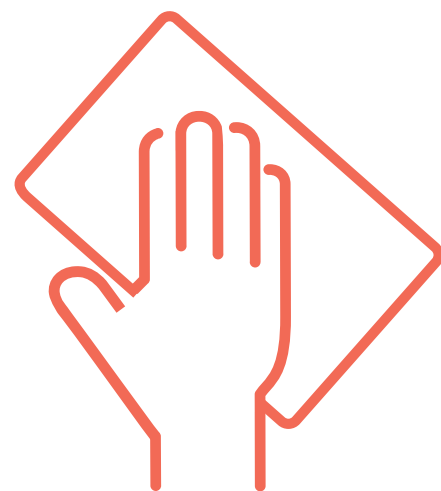

Sterisept wipes de dezinfecție rapidă fără alcool pentru toate suprafețele tolerante la apă. Șervețelele de unică folosință vin într-un ambalaj convenabil și gata de utilizare.

Sterisept wipes nu conțin alcooli, aldehide, PHMB și sunt potrivite pentru toate suprafețele tolerante la apă. Datorită unei formulări special dezvoltate, șervețelele Sterisept au o bună compatibilitate cu materialele împreună cu proprietăți bune de curățare.

Sterisept wipes au un spectru larg de activitate bactericidă (inclusiv MRSA, VRE, A.baumannii și K.pneumoniae), micobactericidă (inclusiv Mycobacterium avium și Mycobacterium terrae) și fungicidă. Produsul este, de asemenea, activ împotriva virusurilor (inclusiv HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota și Noro) și sporilor (inclusiv Clostridium difficile).

Sterisept wipes au o bună compatibilitate a materialelor cu suprafețele și instrumentele care conțin oțel inoxidabil, sticlă, aluminiu, cupru, alamă, ceramică, PVC, cauciuc, materiale plastice, silicon, acril și plexiglas.

DOMENIILE DE APLICARE:

Servetele de dezinfectare rapida fara alcool, prietenoase cu materialele, pentru dezinfectarea dispozitivelor si suprafetelor sensibile la alcool.

- în spitale, laboratoare, cabinete stomatologice, ambulanțe și alte instituții medicale
- pentru dispozitive medicale neinvazive și suprafețe sensibile la alcool
- suprafețele din apropierea pacientului, cum ar fi cadre de pat și noptiere
- canapele și saltelele de examinare
- mesele de operație și suprafețele de lucru din apropiere
- ambulanțe și în cabinete de kinetoterapie
- incubatoare, căzi și cărucioare
- display-uri, tastaturi și panouri de control

UTILIZARE:

Sterisept wipes sunt gata de utilizare. Deschideți capacul găleții și trageți șervețelele impregnate până la perforație. Pentru a rupe șervețelul, trageți-l brusc și într-un unghi mic. După ruperea șervețelului, închideți imediat capacul pentru a evita uscarea șervețelurilor.

Ștergeți bine suprafața cu șervețelele impregnate, asigurând o acoperire completă. Timpul de contact este de cel puțin 60 de secunde sau în funcție de eficacitatea necesară (vezi tabelul).

În caz de încărcare organică mare pe suprafețe, cum ar fi sângele și secrețiile, mai întâi îndepărtați murdăria organică cu prima ștergere și apoi utilizați un alt șervețel pentru a finaliza procedura.

Șervețelele Sterisept sunt un produs perfect pentru dezinfectarea rapidă a dispozitivelor medicale și echipamentelor medicale, se potrivește bine și pentru suprafețele din apropierea pacienților, canapele de examinare, saltele de fizioterapie, mesele de operație, scaune pentru pacienți, scaune cu rotile, brancardiere, cărucioare.

MICROBIOLOGY:

Eficacitate	Metoda de testare	Timpul de contact
Bactericidă (incl.MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 min
Fungicidă	EN13624, EN13697	1 min
Bactericidă și fungicidă	EN16615	1 min
Toate virusurile capsulate	EN14476	0,5 min
Rotaviirus, Noroviiirus	EN14476	0,5 min
Micobactericidă	EN14348	5 min
Aspergillus brasiliensis	EN13624	10 min
Clostridium difficile	EN13704	15 min

PRECAUȚII.

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Aruncați conținutul și/sau recipientele în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și respectiv deșeurile de ambalaje.

INGREDIENTE:

100 g produs conține ingrediente active: clorură de didecil-dimetil-amoniu (DDAC) 0,45 g; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin 0,45g.



AMBALAJ:



100 buc.
(16x20cm)



120 puc.
(20 x 20 cm)



200 puc.
(20 x 20 cm)



AS Chemi-Pharm
Tänassilmattee 11, Harju maakond, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

DitaEstFarm SRL, str.-la Burebista 23,
MD-2032, Chișinău
Tel.: +37322405419
e-mail: office@dita.md