

Каталог продукции компании «Колопласт»

Средства ухода за стомой, средства ухода при нарушении мочеиспускания и дефекации, средства ухода за ранами и кожей



О КОМПАНИИ

История компании «Колопласт» началась в 1954 г., когда медсестра Элиза Соренсен обратилась к бизнесмену Аагэ Луис-Хансену со своим изобретением — калоприемником на клеевой основе. Элиза пыталась помочь своей сестре Торе, которая после стомирования перестала выходить на улицу, опасаясь, что кишечное отделяемое будет протекать и появится неприятный запах. И чтобы помочь сестре, Элиза придумала калоприемник на клеевой основе.



Аагэ не сразу осознал важность изобретения Элизы Соренсен. Однако его жена Джоана, в прошлом также медицинская сестра, сумела убедить мужа. В 1955 году был изготовлен первый в мире калоприемник на клеевой основе, который плотно прилегал к телу, препятствуя протеканию. Это простое, но чрезвычайно необходимое изобретение позволило Торе и тысячам людей во всем мире вернуться к нормальной жизни.



4 сентября 1957 года была основана компания «Колопласт А/С» (Дания), и производство калоприемников было поставлено на промышленную основу.

Сейчас более 90% выпускаемой продукции компании предназначено для мирового рынка. Продукция Колопласт представлена во всех странах мира, дочерние компании и представительства находятся более чем в 50 странах. Производственные мощности Колопласт расположены в Дании, Франции, Венгрии, США и Китае.

В разработке продукции Колопласт участвуют специалисты и пользователи продукции. Вся продукция обязательно проходит клинические испытания. На протяжении многих лет компания проводит систематическую оценку отзывов пользователей и специалистов о качестве своей продукции. Рекомендации и идеи, полученные от специалистов и потребителей, позволяют компании постоянно улучшать качество выпускаемой продукции и внедрять новые изделия, соответствующие передовым методам лечения и реабилитации.

Колопласт специализируется в разработке и производстве средств ухода за стомой, средств ухода при нарушении мочеиспускания и дефекации, средств ухода за кожей и ранами.

Отдельным направлением деятельности является производство хирургической и урологической продукции Porges (Порже), ассортимент которой представляет широкий спектр расходных материалов для эндоурологии, протезирования и имплантации.

СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ

Ассортимент средств ухода за стомой включает в себя однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники, а также аксессуары.

Однокомпонентный калоприемник или уроприемник — это неразъемный стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной.

Двухкомпонентный калоприемник или уроприемник представляет собой разъемные адгезивную пластину и стомный мешок, которые соединяются между собой с помощью фланцевого соединения, при этом размер (диаметр) фланца пластины должен соответствовать размеру фланца стомного мешка.

Однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники имеют два типа стомных мешков: дренируемые и недренируемые.

Адгезив (клеевая пластина) — это наиболее важный элемент в калоприемнике. Современные гидроколлоидные адгезивы калоприемников и уроприемников компании «Колопласт» обеспечивают герметичное приклеивание к передней брюшной стенке и устойчивы к эрозии, т.е. надежно защищают кожу от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой. Они также обладают способностью абсорбировать влагу стомы и кожи, позволяют сохранить нормальное состояние кожи под пластиной. Адгезивы «Колопласт» отличаются высокой гибкостью, способны следовать естественному рельефу кожи, не стесняют движений. Кроме того, они легко и полностью удаляются, не травмируя при этом кожу перистомальной области.

Стомные мешки калоприемников и уроприемников «Колопласт» также отличаются высоким качеством. Они изготовлены из бесшумного, не пропускающего запах, многослойного полиэтилена, имеют герметичную лазерную запайку, оснащены угольными фильтрами, эффективно нейтрализующими запах, и мягким нетканым покрытием или подложкой, обладающими абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами, позволяющими коже под калоприемником дышать.

Уроприемники имеют встроенный антирефлюксный клапан, предотвращающий обратный заброс мочи, и удобный сливной клапан для дренирования мешка.

Отличительной особенностью двухкомпонентных калоприемников и уроприемников «Колопласт» является уникальное фланцевое соединение с замком-защелкой.

Средства ухода за стомой и аксессуары «Колопласт» позволяют удовлетворить все индивидуальные потребности стомированных людей.



SenSura® калоприемники и уроприемники

Ассортимент средств ухода за стомой SenSura (СенШура) представляет собой новейшие однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники.

Адгезив SenSura - платиновый стандарт

Уникальный клеевой слой SenSura представляет собой двухслойный адгезив, созданный с применением импрессионной технологии. Темный нижний слой адгезива пластины обеспечивает абсорбцию и защищает кожу в перистомальной области от раздражения, поддерживает естественный pH кожи. Устойчивый к эрозии светлый верхний слой защищает нижний темный слой адгезива и кожу от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи.

Клеевой слой SenSura гарантирует адгезию, гибкость, абсорбцию, устойчивость к эрозии и безболезненное удаление.

Тисненая поверхность и овальная форма адгезива обеспечивают гибкость по всем направлениям.

Адгезив SenSura имеет несколько модификаций для различных видов продукции.

Новый многослойный угольный фильтр (в двух модификациях: для дренируемых и недренируемых калоприемников) обеспечивает нейтрализацию запаха, непрерывный отток воздуха, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур.

Калоприемники и уроприемники SenSura имеют **двустороннее мягкое нетканое покрытие** из прочного, антистатического, водоотталкивающего, термолабильного материала.

Встроенная скрытая застежка на липучке дренируемых калоприемников SenSura надежна, гигиенична и удобна. Ее можно спрятать под нетканое покрытие мешка.

Многокамерный мешок уроприемников SenSura разделен на внутренние карманы-камеры, сохраняющие плоскую форму мешка и не позволяющие содержимому уроприемника плескаться.

Антирефлюксный клапан уроприемников SenSura эффективно предотвращает обратный заброс мочи.

Удобный сливной клапан уроприемников SenSura из мягкого пластика обеспечивает уникальную надежность и гигиеничное дренирование мешка.

Калоприемники и уроприемники SenSura имеют **анатомическую форму**, что делает их удобными и незаметными под одеждой.

Специальное **окно для визуального наблюдения** за стомой послеоперационных калоприемников SenSura позволяет ухаживать за стомой, не отклеивая калоприемник. Окно легко открывается и закрывается, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку.

Механическое фланцевое соединение с замком-защелкой двухкомпонентных калоприемников и уроприемников SenSura Click обеспечивает надежное и герметичное соединение стомного мешка и пластины, позволяет установить мешок на пластине, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку. Кроме того, мешок можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины.

Однокомпонентные калоприемники и уроприимники SenSura®



Дреназируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
155800	10 - 76	30	480
155090*	15 - 43	10	160

* Конвексный



Недренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
154800	10 - 76	30	240



Уроприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
118040	10 - 76	20	200



Послеоперационный калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
190200	10 - 70	6	24
190210	10 - 100	6	24

Двухкомпонентные калоприемники и уроприемники SenSura®

SenSura® пластины



SenSura® Click

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
100110	40	5	160
100210	50	5	160
100310	60	5	160
100410	70	5	160



SenSura Click Xpro для илео-/ и уростом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
100150	40	5	160
100250	50	5	160
100350	60	5	160
100450	70	5	160



SenSura Click конвексные для втянутых стом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
110210	50	5	80
110310	60	5	80



SenSura Click Xpro для втянутых стом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
110150	40	5	80
110250	50	5	80
110350	60	5	80

SenSura® стомные мешки



Дренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
103640	40	30	360
103650	50	30	360
103660	60	30	360
103670	70	30	360



Недренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
101640	40	30	360
101650	50	30	360
101660	60	30	360
101670	70	30	360



Уростомные

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
118540	40	30	240
118550	50	30	240
118560	60	30	240

Alterna® калоприемники и уроприемники

Ассортимент средств ухода за стомой Alterna (Алтерна) представлен однокомпонентными и двухкомпонентными калоприемниками и уроприемниками Alterna для взрослых и детей и однокомпонентными и двухкомпонентными калоприемниками Alterna Free (Алтерна Фри), которые являются новым поколением средств ухода за стомой Alterna.

Адгезив Alterna - золотой стандарт

Адгезив Alterna имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов, и обладает надежными защитными свойствами. Светлый адгезивный слой является абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH. Темный адгезивный слой обеспечивает надежное приклеивание. Такое сочетание адгезивов позволяет надежно защитить кожу от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также безболезненно отклеивать калоприемники или уроприемники.

Адгезив Alterna имеет несколько модификаций для различных видов стомы и типов кожи. Адгезив калоприемников Alterna Free имеет овальную форму.

Многослойный встроенный угольный фильтр калоприемников Alterna и Alterna Free эффективно нейтрализует запах, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур. Усовершенствованный фильтр калоприемников Alterna Free имеет различные модификации: для недренируемых и дренируемых калоприемников.

Мягкая нетканая подложка калоприемников и уроприемников Alterna, прилегающая к коже, и **двустороннее мягкое нетканое покрытие калоприемников** Alterna Free обладают абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами.

Калоприемники Alterna Free имеют **анатомическую форму**, что делает их удобными и незаметными под одеждой.

Гибкий клеящийся зажим дренируемых калоприемников Alterna надежен, удобен, гигиеничен и незаметен под одеждой. Зажим позволяет легко и быстро дренировать калоприемник.

Встроенная скрытая застежка однокомпонентных и двухкомпонентных дренируемых калоприемников Alterna Free удобна, гигиенична, легко закрывается и фиксируется с помощью липучек. Застежку можно убрать под нетканое покрытие мешка.

Удобный сливной клапан уроприемников Alterna из мягкого пластика обеспечивает уникальную надежность. Клапан гигиеничен и удобен в применении.

Эффективный **антирефлюксный клапан** предотвращает обратный заброс мочи в уростому.

Съемное окно для визуального наблюдения за стомой послеоперационных калоприемников Alterna позволяет ухаживать за стомой, не отклеивая калоприемник. Окно легко открывается и закрывается, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку.

Механическое фланцевое соединение с замком-защелкой двухкомпонентных калоприемников и уроприемников Alterna и Alterna Free позволяет установить мешок на пластине, не оказывая при этом давления на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение стомного мешка и пластины. Кроме того, мешок можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины.

Дренируемые и недренируемые стомные мешки Alterna Free совместимы со всеми пластинами Alterna, при этом фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины.

Однокомпонентные калоприемники
Alterna® \ Alterna® Free и уроприемники Alterna®



Дренаруемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
138700	12 - 75	30	360



Недренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
463160	20 - 75	30	480



Дренаруемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
059850	10 - 70, прозрачный	30	480
058850	10 - 70	30	480



Недренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
057870	10 - 70	30	480



Уроприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
055850	10 - 55	30	200



Мини кап

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
058760	20 - 55	30	200



Послеоперационный калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
128020	10 - 100	6	72



Детский дренаруемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
080020	10 - 35	30	480



Детский уроприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
080090	10 - 35	30	320

Двухкомпонентные калоприемники
Alterna® \ Alterna® Free и урприемники Alterna®
Alterna® пластины




Alterna® (Wear Life)			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
017710	40	5	150
017760	50	5	150
017790	60	5	150



Alterna Extra			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
028310	40	5	150
028320	50	5	150
028330	60	5	150



Alterna (Long Wear)			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
131710	40	5	150
131810	50	5	150
131910	60	5	150

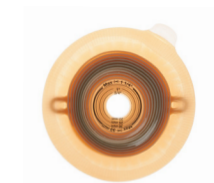

Alterna конвексные (Deerp, Wear Life)			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
467590	50	4	120
467690	60	4	120



Alterna Extra конвексные (Light)			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
142820	50	5	150
142830	60	5	150



Alterna Extra конвексные (Deerp)			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
142460	50	5	150
142490	60	5	150

Alterna® Free стомные мешки



Дренируемые			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
139840	40	30	360
139850	50	30	360
139860	60	30	360



Недренируемые			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
464480	40	30	360
464580	50	30	360
464680	60	30	360

Alterna® стомные мешки



Дренируемые			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
016910	40	30	480
016920	50	30	480
016930	60	30	480



Недренируемые			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
016810	40	30	480
016820	50	30	480
016830	60	30	480



Уростомные			
Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
017570	40	20	200
017580	50	20	200
017590	60	20	200

Новинка

Двухкомпонентные калоприемники с адгезивным фланцевым соединением Easiflex®

Ассортимент средств ухода за стомой Easiflex (Изифлекс) представлен двухкомпонентными калоприемниками Easiflex для взрослых и детей с адгезивным фланцевым соединением. Калоприемниками Easiflex для взрослых предназначены для ухода за большими осложненными стомами.

Калоприемниками Easiflex для детей показаны для ухода за стомами у новорожденных детей.

Адгезив Alterna

Пластины двухкомпонентных калоприемников Easiflex имеют адгезив спиралевидной структуры Alterna состоящий из двух чередующихся адгезивов. Светлый адгезивный слой является абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH. Темный адгезивный слой обеспечивает надежное приклеивание.

Такое сочетание адгезивов позволяет защитить кожу от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также безболезненно отклеивать калоприемники или урприемники.

Встроенная скрытая застежка

Встроенная скрытая застежка одно- и двухкомпонентных дренируемых калоприемников Easiflex удобна, гигиенична, легко закрывается и фиксируется с помощью липучек. Застежку можно убрать под нетканое покрытие мешка.

Многослойный встроенный фильтр

Многослойный встроенный угольный фильтр калоприемников Easiflex эффективно нейтрализует запах, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур.

Нетканая подложка и двустороннее нетканое покрытие

Двустороннее мягкое нетканое покрытие калоприемников Easiflex обладают абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами.

Easiflex® калоприемники



Easiflex® пластины

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
14303	70	10-68	10	280
14309	90	15-88	5	280



Easiflex® недренируемые стомные мешки

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
14319 непрозрачный	70	30	360
14355 непрозрачный, XXL	90	20	160



Easiflex® дренируемые стомные мешки

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
14344 прозрачный	70	30	360
14378 прозрачный, XXL	90	30	360
14349 непрозрачный	70	30	360
14379 непрозрачный, XXL	90	30	360

Новинка

Easiflex® калоприемники педиатрические

Easiflex® пластины педиатрические

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
14307	17	0–15	10	560
14308	27	0–25	10	560

Easiflex® дренажные стомные мешки, педиатрические

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
14681 прозрачный	17	30	480
14682 прозрачный	27	30	480
14691 с рисунком	17	30	480
14692 с рисунком	27	30	480

мс2000 и мс2002 калоприемники

Продукция мс2000 представляет собой ассортимент однокомпонентных калоприемников, а продукция мс2002 - двухкомпонентных калоприемников.

Адгезив Curagard

Адгезив Curagard (Курагард) калоприемников мс2000 и мс2002 – это тонкий, эластичный, гибкий гидроколлоидный адгезив. Он является хорошим абсорбентом, защищает кожу от раздражения, обладает высокими адгезивными свойствами, полностью и легко удаляется. Адгезив Curagard имеет кольцо из микропористой пленки для дополнительной фиксации.

Мягкая нетканая подложка калоприемников мс2000 и мс2002 из антистатического, гипоаллергенного материала не только создает дополнительное удобство при ношении калоприемника, но и позволяет коже под мешком дышать.

Гибкий встроенный зажим однокомпонентных и двухкомпонентных калоприемников мс2000 и мс2002 позволяет легко и надежно закрывать дренажный конец мешков.

Стомные мешки и пластины двухкомпонентных калоприемников мс2002 герметично крепятся друг к другу с помощью [фланцевого соединения](#).

Новинка

Двухкомпонентные калоприемники Coloplast

Адгезивная пластина Coloplast имеет двухслойный гипоаллергенный гидроколлоидный адгезив импрессионной структуры с защитным покрытием, фланец с креплениями для пояса.

Дренажный стомный мешок Coloplast, прозрачный, оснащен двусторонним мягким нетканым покрытием, встроенной застежкой на липучке, фильтром, фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине.

Coloplast пластина

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
100451	70	5	160

Coloplast дренажный стомный мешок

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
103871	70	30	360

Однокомпонентные калоприемники мс2000

Дренажный калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
063000	15 - 60	30	360

Дренажный калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
061000	10 - 80	30	480

Пластины мс2002



Для больших стом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
068300	120	5	100

мс2002 стомные мешки



Дренируемые для больших стом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
068200	120	10	200

АКСЕССУАРЫ

Alterna® Conseal® тампон для стомы

Тампон для стомы Alterna Conseal (Алтерна Консил) используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон покрыт растворимой пленкой и установлен на адгезивную пластину Alterna. Пластина оснащена фильтром, нейтрализующим запах и выпускающим воздух. Тампон не следует применять пациентам с илеостомами. Перед использованием посоветуйтесь со специалистом.



Alterna® Conseal тампон для стомы

Код товара	Диаметр стомы / Длина тампона, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
014350	20-35	10	100
014850	35-45	10	100

Alterna® ирригационная система

Ирригационная система Alterna применяется для проведения процедуры промывания кишечника через стому у людей с колостомой, что позволяет регулярно опорожнять кишечники контролировать его перистальтику.

Система состоит из резервуара для воды со шкалой и встроенным термометром, дренажной трубки с регулятором подачи воды и воронкой для стомы, ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого и прижимной пластины с поясом для фиксации ирригационного рукава. Набор упакован в сумочку.



Alterna® ирригационная система

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
128300*	1	12

* В наборе: резервуар для воды с регулятором — 1 шт.; воронка — 1 шт.; ирригационные рукава, 60 мм — 2 шт.; прижимная пластина — 1 шт.; пояс — 1 шт.; упаковочная сумка — 1 шт.; инструкция по применению.

Alterna® пояс для калоприемников и уроприемников

Пояс Alterna применяется для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируется по длине.



Alterna® пояс для калоприемников и уроприемников

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
004210	10	100

Coloplast® стержень для стомы

Стерильный стержень для стомы Coloplast (Колопласт) используется для временной фиксации петлевой стомы.



Coloplast® стержень для стомы		
Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
128140	10	160

Filtrodor® фильтр

Угольный фильтр Filtrodor (Филтродор) эффективно нейтрализует запах и выпускает воздух из калоприемника. Угольный фильтр Filtrodor на адгезивной основе предназначен для использования с калоприемниками, не имеющими фильтра.



Filtrodor® угольный фильтр		
Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
005090	300	3000

Coloplast® нейтрализатор запаха

Нейтрализатор запаха Coloplast – это бесцветный концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течение нескольких часов.



Coloplast® нейтрализатор запаха		
Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
615230	10	80

СРЕДСТВА УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Средства ухода за кожей вокруг стомы предназначены для ухода за здоровой, чувствительной и поврежденной кожей вокруг стомы, а также для профилактики и лечения перистомальных кожных осложнений.

Coloplast® паста

Паста Coloplast (Колопласт) в тубике и в полосках применяется для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также для выравнивания кожи вокруг стомы и герметичного приклеивания пластины. Паста Coloplast в полосках не содержит спирта, поэтому может наноситься на чувствительную или поврежденную кожу.



Coloplast® паста			
Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
026500	Тюбик 60г	12	120



Coloplast® паста			
Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
026550	Полоска 6г	10	640

Comfeel® защитный крем

Защитный крем Comfeel (Комфил) для кожи вокруг стомы – это профилактическое увлажняющее средство, восстанавливающее нормальный pH кожи, способствующее заживлению кожи.



Comfeel® защитный крем			
Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
047200	Туба 60мл	1	60

Comfeel® очиститель (клинзер)

Очиститель для кожи вокруг стомы Comfeel (Комфил) заменяет мыло и воду, эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей.



Comfeel® очиститель (клинзер)

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
047100	Флакон 180мл	1	60

Comfeel® очиститель (клинзер)

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
047150	Салфетки	30	600

Coloplast® абсорбирующий порошок

Абсорбирующий порошок Coloplast предназначен для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы, эффективно впитывает экссудат, образуя защитный гидроколлоидный гель, способствует заживлению поврежденной кожи.



Coloplast® абсорбирующий порошок

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
019070	Флакон 25г	1	192

Conveen® защитная пленка «Преп»

Защитная пленка Conveen (Конвин) Преп предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей, для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала.



Conveen® защитная пленка «Преп»

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
620420	Салфетки	54	648

Conveen® защитный крем «Протакт»

Защитный крем Conveen (Конвин) «Протакт» применяется при легкой степени повреждения кожи, оказывает увлажняющее и заживляющее действие, быстро впитывается, делая кожу гладкой и мягкой, создавая защитную антисептическую пленку, которая эффективно предохраняет кожу от раздражающего действия мочи и кала.



Conveen® защитный крем “Протакт”

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
650500	Туба 50г	1	12
651000	Туба 100г	1	12

Conveen® заживляющий крем «Критик Барьер»

Крем Conveen (Конвин) «Критик Барьер» обладает заживляющими свойствами и применяется при выраженной мацерации кожи, возникшей в результате длительного контакта с мочой и калом. Уникальный состав крема позволяет накладывать его даже на мокнущую и изъязвленную поверхность кожи, предохраняя ее от дальнейшего повреждения.



Conveen® заживляющий крем “Критик Барьер”

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
661020	Туба 50г	1	96
661030	Туба 100г	1	12

Conveen® очиститель для кожи «ИзиКлинз»

Очиститель Conveen (Конвин) «ИзиКлинз» быстро и легко удаляет с поверхности кожи остатки мочи, кала, а также других средств ухода за кожей. Не содержит спирта, является мягкой альтернативой мылу и воде.



Conveen® очиститель для кожи “ИзиКлинз”

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
660010	Флакон 250мл	1	12

Средства ухода за кожей Brava®

Аксессуары Brava представляют собой высоко эффективные средства защиты от протекания и ухода за кожей нового поколения.

Моделируемое защитное кольцо Brava®

Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи.

Эластичная пластина-полукольцо Brava®—это эластичная гидроколлоидная полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника).

Очиститель Brava® для удаления адгезивов

спрей и салфетки) на силиконовой основе, для безболезненного и легкого отклеивания пластин калоприемников (уроприемников), а также для удаления остатков адгезивов.

Защитная пленка Brava® (спрей, салфетки)

Защитная пленка—прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирт, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений.

Защитный крем Brava®

Увлажняющее водоотталкивающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или фистулы для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, увлажняет и способствует заживлению сухой раздраженной кожи, восстанавливает нормальный pH кожи.

Пудра абсорбирующая Brava®

Пудра абсорбирующая для ухода за поврежденной мацерированной кожей, защиты кожи вокруг стомы от дальнейшего раздражения и повреждения, эффективно поглощает избыточную влагу.

Паста Brava®

Моделирующая паста, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы, улучшает состояние кожи вокруг стомы.



Моделируемое защитное кольцо Brava®

Код товара	Толщина	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120305	2.0 мм	30	180
120425	4.2 мм	30	180



Эластичная пластина-полукольцо Brava®

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120700	20	480



Очиститель Brava® для удаления адгезивов

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120105	Спрей, 50 мл.	1	48
120115	Салфетки	30	960



Защитная пленка Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120205	Спрей, 50 мл.	1	48
120215	Салфетки	30	960



Защитный крем Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120005	Туба, 60 мл.	1	48



Пудра абсорбирующая Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
019075	Флакон, 25гр.	1 (16)	192



Паста в полоске Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
026555	Полоска, 6г.	10	



Пояс Brava®

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
004215	1 (15)	120

СРЕДСТВА УХОДА ПРИ НАРУШЕНИИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ И ДЕФЕКАЦИИ

Ассортимент средств ухода при нарушении мочеиспускания и дефекации Колопласт включает в себя технические средства реабилитации при задержке мочи, недержании мочи у мужчин, недержании кала.

СРЕДСТВА ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧИ

Ассортимент средств при задержке мочи включает в себя лубрицированные катетеры и наборы для интермиттирующей катетеризации и самокатетеризации.

Интермиттирующая катетеризация представляет собой метод отведения мочи с помощью многократных (4 – 6 раз в сутки) катетеризаций мочевого пузыря через мочеиспускательный канал с использованием специальных катетеров.

Многолетний международный опыт применения интермиттирующей катетеризации доказал, что данный метод отведения мочи наиболее эффективен и безопасен в сравнении с другими методами. Согласно рекомендациям Европейского общества урологов, интермиттирующая катетеризация является «золотым стандартом» при хронической задержке мочи вследствие неврологических заболеваний.

Чтобы еще больше снизить возможные риски со стороны мочеиспускательного канала, для интермиттирующей катетеризации применяют специальные лубрицированные катетеры EasiCath. Безопасность и легкость использования лубрицированных катетеров EasiCath позволяет осуществлять интермиттирующую катетеризацию самостоятельно, без привлечения медицинского работника. Это значительно повышает качество жизни, обеспечивая независимость от ухаживающего персонала, незаметность существующей интимной проблемы, максимальные возможности для двигательной, социальной, семейной и бытовой реабилитации.

EasiCath® катетеры для самокатетеризации лубрицированные




Катетеры EasiCath (Изикет) изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), имеют на своей поверхности прочно зафиксированный гидрофильный лубрикант, поливинилпирролидон, который активируется при контакте с водой.

Катетеры EasiCath являются стерильными и предназначены для однократного применения.

В ассортименте представлены катетеры EasiCath мужские, женские, детские с прямым или изогнутым наконечником, различных размеров по Шарьеру.

EasiCath® катетеры для самокатетеризации лубрицированные

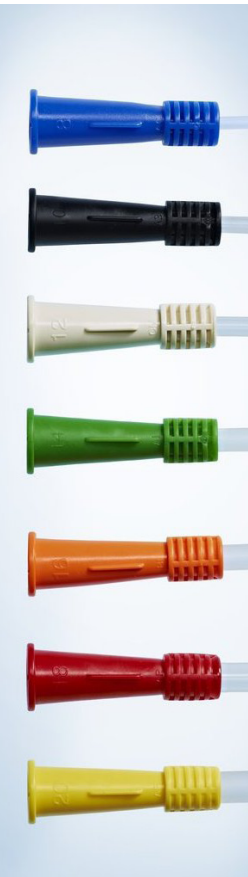

Мужские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
053480	08	25	300
053500	10	25	300
053520	12	25	300
053540	14	25	300
053560	16	25	300
053580	18	25	300

Женские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
053680	08	25	300
053700	10	25	300
053720	12	25	300
053740	14	25	300
053760	16	25	300

Детские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050080	08	25	300
050100	10	25	300

Мужские, тип Тиманн*

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
053800	10	25	300
053820	12	25	300
053840	14	25	300
053860	16	25	300

*По предварительному заказу

EasiCath® Set наборы для интермиттирующей самокатетеризации

Набор-мочеприемник EasiCath Set (Изикет Сет) – комплексная система «3 в 1», содержащая в себе лубрицированный катетер EasiCath, ампулу со стерильным раствором для активации лубриканта катетера и мочеприемник. Набор EasiCath Set особенно удобен во время путешествий, когда нет доступа к чистой воде и туалету.

Объем мочеприемника в наборе EasiCath Set составляет 700мл, катетер мужской с наконечником Нелатон различного размера по Шарьеру.



Мужские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
280060*	10	20	80
280070	12	20	80
280080	14	20	80
280090*	16	20	80
280100*	18	20	80

*По предварительному заказу

Новинка

SpeediCath® катетеры для самокатетеризации лубрицированные



Катетеры SpeediCath® (Спидикет) — это новое поколение лубрицированных катетеров для интермиттирующей катетеризации и самокатетеризации.

Лубрицированный катетер SpeediCath находится в стерильном физиологическом растворе, не требует дополнительной активации и готов к использованию сразу после вскрытия упаковки. Инновационная запатентованная технология нанесения лубриканта значительно снижает риски, связанные с катетеризацией. Лубрицированный катетер SpeediCath предназначен для однократного применения.

Эргономичная упаковка, разработанная учетом особых требований пациентов с ограниченной ловкостью рук, позволяет выполнять самостоятельную катетеризацию быстро, легко и безболезненно. Катетеры SpeediCath изготовлены из материалов не содержащих фталатов.

В ассортименте представлены катетеры SpeediCath мужские, женские и детские различных размеров по Шарьеру.



Мужские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
284080*	8	30	300
284100	10	30	300
284120	12	30	300
284140	14	30	300

Женские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
285080*	8	30	300
284100	10	30	300
284120	12	30	300
284140	14	30	300

Детские, тип Нелатон

Код товара	Размер, Ch	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
287060*	6	30	300
287080*	8	30	300
287100*	10	30	300

*По предварительному заказу

СРЕДСТВА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ

К средствам при недержании мочи относятся уропрезервативы Conveen (Конвин), мочеприемники Conveen и аксессуары Conveen: ремешки Conveen и вешалка-крючок Conveen, которые используются совместно в составе мочеприемной системы Conveen для мужчин с недержанием мочи, либо для людей с цистостомой, нефростомой, уро-стомой.

Conveen® уропрезервативы

Уропрезервативы Conveen (Конвин) предназначены для мужчин с недержанием мочи и используются только совместно с мочеприемниками Conveen в составе мочеприемной системы Conveen.

В ассортименте представлены уропрезервативы, изготовленные из различных материалов.

Уропрезервативы Conveen латексные изготовлены из гипоаллергенного латекса и подходят большинству пользователей.

Уропрезервативы Conveen Секьюрити+ изготовлены из материала, не содержащего латекс, и предназначены для мужчин с повышенной чувствительностью к натуральному латексу.

В зависимости от способа фиксации различают уропрезервативы Conveen с пластырем и уропрезервативы Conveen самоклеящиеся.

Уропрезерватив Conveen с пластырем состоит из уропрезерватива и адгезивного пластыря в единой упаковке. Гидроколлоидный адгезивный пластырь сохраняет физиологическое состояние кожи, находящейся под ним, а свойства эластичности и «памяти» формы обеспечивают защиту от сдавления кровеносных сосудов, протекания и спада-ния уропрезерватива.

Уропрезерватив Conveen самоклеящийся имеет адгезив, нанесенный на внутреннюю по-верхность, и фиксируется на половом члене при раскручивании с помощью раскручи-вающей ленты.



Самоклеящиеся Security+*

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
052210	21	30	180
052250	25	30	180
052300	30	30	180
052350	35	30	180
052400	40	30	180

*По предварительному заказу

С пластырем

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
051200	20	30	480
051250	25	30	480
051300	30	30	480
051350	35	30	480
051400	40	30	480

Самоклеящиеся

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
052120	20	30	180
052000	25	30	180
052050	30	30	180
052100	35	30	180
052150	40	30	180



С пластырем Security+*

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050210	21	30	180
050250	25	30	180
050300	30	30	180
050350	35	30	180
050400	40	30	180

*По предварительному заказу

Conveen® мочеприемники

Мочеприемники (мешки для сбора мочи) Conveen изготовлены из особо прочного материала, надежно предохраняющего от разрыва и протекания. На обратной поверхности мочеприемников Conveen имеется специальная подложка, обеспечивающая комфортное ношение на ноге и защиту от раздражения кожи. Все мочеприемники Conveen имеют антирефлюксный клапан, предотвращающий поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку, а также удобный сливной клапан.

Ножные мочеприемники предназначены для использования в активное (дневное) время суток, имеют относительно небольшой объем и анатомическую форму для комфортного и незаметного ношения на ноге под одеждой.

Ножные мочеприемники Conveen Секьюрити+ отличаются наличием защищенной от перегибания гофрированной дренажной трубки.

Ножные мочеприемники Conveen контурные имеют множество внутренних вертикальных полостей для равномерного распределения мочи.

Прикроватные мочеприемники Conveen имеют большой объем, более длинную дренажную трубку и предназначены для использования ночью или во время постельного режима, когда нет возможности опорожнить мочеприемник в течение длительного времени.



Ножные Security+

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
051650	350	50	10	100
051610	500	50	10	100
051670	750	50	10	100



Ножные контурные

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
051700	600	45	10	100
051740	800	45	10	100



Прикроватные

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050620	1500	90	10	100
050630 *	1500	90	10	60

* стерильный



Прикроватные Basic

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
218040	2000	100	10	100

Conveen® аксессуары

Conveen® ремешки для крепления мочеприемника на ноге.

Ремешки Conveen предназначены для крепления мочеприемника Conveen на ноге, обеспечивая его комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. В упаковке находятся 2 ремешка для фиксации верхней и нижней частей мочеприемника.

Conveen® вешалка-крючок.

Вешалка-крючок Conveen предназначена для фиксации мочеприемника Conveen на боковине кровати. Вешалка-крючок позволяет полностью развернуть мочеприемник и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.



Conveen® ремешки для крепления мочеприемника на ноге

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050501	10	100



Conveen® вешалка-крючок

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050700	10	100

СРЕДСТВА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ КАЛА

Колопласт предлагает эффективное и гигиеничное средство для решения проблемы недержания кала легкой и средней степени тяжести – анальные тампоны Peristeen (Перистин).

Peristeen® анальный тампон

Анальный тампон Peristeen имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой. Для введения тампона в задний проход используется водорастворимый гель. После введения анального тампона Peristeen в прямую кишку, покрывающая его пленка растворяется под воздействием естественного тепла и влаги, анальный тампон Peristeen расширяется и эффективно удерживает каловые массы.

Анальный тампон предназначен для однократного применения. В ассортименте представлены анальные тампоны Peristeen двух размеров: большой и маленький.



Peristeen® анальные тампоны

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
014510	45 *	20	200
014500	37 *	20	200

* В активированном состоянии

СРЕДСТВА УХОДА ЗА РАНАМИ

Средства ухода за ранами Колопласт – это инновационные перевязочные средства для «влажного заживления» ран различной этиологии, разработанные совместно с ведущими специалистами в области лечения ран

Перевязочные средства Колопласт эффективно контролируют экссудат, защищают рану от вторичного инфицирования, обеспечивают газообмен и термоизоляцию раны, атравматично и безболезненно удаляются.

Применение новейших технологий в области лечения ран позволяет значительно сократить сроки заживления, уменьшить частоту перевязок, улучшить косметический результат, обеспечить более высокое качество жизни пациента.

Biatain® губчатые повязки

Губчатые повязки Biatain (Байтэйн) на основе трехмерного полимерного материала (вспененного полиуретена) обладают высокими сорбционными свойствами, создают идеальные условия для влажного заживления и обеспечивают эффективный уход за экссудирующими ранами.

Губчатые повязки Biatain представлены в адгезивном и неадгезивном исполнении, имеют различные размеры и формы, в т.ч. на крестец и на пятку.



Адгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334200	12 x 12	10	240
334210	15 x 15	5	120
334230	18 x 18	5	80



Неадгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334100	10 x 10	10	240
334130	15 x 15	5	80
334160	20 x 20	5	80



На крестец

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334850	23 x 23	5	80



На пятку

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334880	19 x 20	5	80

Biatain® Ag губчатые повязки с серебром

Губчатые повязки с серебром Biatain Ag (Байтэйн Ag), разработанные на основе губчатых повязок Biatain, обладают превосходной способностью контролировать и абсорбировать экссудат и обеспечивают эффективное заживление инфицированных ран, а также ран с риском инфицирования со средним и высоким уровнем экссудации.

Губчатые повязки с серебром Biatain Ag представлены в адгезивном и неадгезивном исполнении.



Адгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334640	15 x 15	5	120



Неадгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
396220	10 x 10	10	240
396250	15 x 15	5	80

Biatain® альгинатные повязки

Альгинатная повязка Biatain™ — это абсорбирующая повязка, состоящая из альгината и гидроколлоида (натрий карбоксиметилцеллюлозы), формирующая мягкий когезивный гель при контакте с раневым экссудатом, обеспечивающая оптимальные условия для влажного заживления раны.

Альгинатная повязка Biatain показана для лечения ран со средним и сильным уровнем экссудации, включая язвы нижних конечностей, пролежни, диабетические язвы и ожоги 2-й степени.

Biatain альгинатная повязка применяется для ускорения лечения ран на стадии экссудации и для местного гемостаза, как поверхностная повязка при лечении пролежней, венозных язв нижних конечностей, артериальных язв, диабетической стопы, мест забора трансплантатов или травматических ран.

Альгинатная повязка Biatain в виде ленты применяется и при лечении глубоких ран



Альгинатные повязки

Код товара	Размер, см.	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
37102	10x10	10	240
37152	15x15	10	240



Альгинатная повязка в виде ленты

Код товара	Размер, см.	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
37402	3x44	6	120

Comfeel® Plus гидроколлоидные повязки

Гидроколлоидные повязки Comfeel Plus (Комфил Плюс) – это новое поколение гидроколлоидных повязок из влагоабсорбирующих частиц целлюлозы с добавлением альгината, инкапсулированных в синтетическую эластичную массу.

Гидроколлоидные повязки Comfeel Plus эффективно регулируют влажную среду в ране, применяются для лечения ран различной этиологии со слабым и умеренным уровнем экссудации.

Гидроколлоидные повязки Comfeel Plus представлены в нескольких модификациях, в т.ч. прозрачные, контурные для перевязки в области крестца, пяток, локтей, коленей.



Гидроколлоидные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
031100	10 x 10	10	240
031150	15 x 15	5	240
031200	20 x 20	5	80
031460	4 x 6	30	720



Прозрачные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
035330	10 x 10	10	240
035390	15 x 15	5	240
035450	20 x 20	5	80
035420	15 x 20	5	120
035480	5 x 25	5	140



Контурные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
032800	6 x 8	5	240
032830	9 x 11	5	80

Physiotulle® Ag сетчатые повязки с серебром

Сетчатая повязка с серебром Physiotulle Ag (Физиотуль Ag) – это неприлипающая контактная сетка из полиэстера, импрегнированная карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), включенной в вазелин, что придает повязке свойства гидроколлоидов. Сульфадиазин серебра равномерно распределен в вазелине.

Сетчатая повязка с серебром Physiотulle Ag показана для лечения ран с любым уровнем экссудации и может быть использована для прогрессирования лечения ран с замедленным заживлением, вызванным бактериальной колонизацией, или ран, имеющих риск инфицирования.

Сетчатые повязки

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
039260	10 x 10	10	360
039272	15 x 15	10	170

Purilon® гель

Purilon (Пурилон) гель – это гидрогель, обладающий уникальными абсорбирующими и гидратирующими свойствами, которые способствуют естественному аутолическому очищению раны. Purilon гель создает условия влажной среды.

Purilon гель преимущественно показан для сухих и влажных некротических ран, а также для смешанных ран с участками некротической и грануляционной ткани. Гель также используется для создания условий влажного заживления раны.



Гелевая повязка

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
039000	Аппликатор, 15 г	10	180

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined area for notes on page 40.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Blank lined area for notes on page 41.

ВНУТРЕННЯЯ
СТРОНА
ОБЛОЖКИ

Наша миссия

Облегчить жизнь людей с деликатными
медицинскими потребностями

Наши ценности

Близость... чтобы лучше понимать

Стремление... чтобы изменять

Уважение и ответственность... чтобы направлять нас

Наше видение

Установление глобального стандарта
«слышать и реагировать»

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



ООО «Колопласт»
Ленинградский пр-т, 72, корп. 2
Москва, 125315, Россия
Тел.: +7 495 937 53 90
Факс: +7 495 937 53 91
info@coloplast.ru

www.coloplast.ru