

NEOQI®

Niagara

Niagara Simple

RUS

Благодарим Вас за выбор продукции NeoQi®

Основные характеристики NeoQi® Niagara

Креативность

Вы можете скомбинировать целый ряд возможностей и создать себе небольшой СПА-салон.



Сенсорные кнопки

Функция запускается в работу путём лёгкого касания кнопки.



Эргономичный дизайн

Каждая часть ванны создана для максимального удовлетворения Ваших потребностей в расслаблении.

Основные функциональные возможности ванны Niagara



ZONE I

Водный массаж *

при помощи водных струй из боковых форсунок различной направленности, силы и температуры. Оказывает на организм человека общеукрепляющее оздоровительное, расслабляющее, болеутоляющее действия.



ZONE II

Водный массаж *

при помощи водных струй на зону спины и ног различной направленности, силы и температуры. Оказывает на организм человека общеукрепляющее оздоровительное, расслабляющее, болеутоляющее действия.



ZONE III

Подводный массажный шланг

обеспечивает терапевтический эффект за счёт выбираемой вручную небольшой зоны для мощного водного массажа.



BOTTOM AIR

Массаж воздушными пузырьками *

нежно воздействует на множество нервных окончаний и рецепторов, улучшает периферическое кровообращение, насыщает ткани и органы кислородом.



OZONE

Озон *

эффективен в широком диапазоне показателей pH, быстро реагирует на бактерии, вирусы и обладает лучшими бактерицидными свойствами, чем хлорирование.



CHROMOTHERAPY

Светодиодный свет

представляет собой активную энергию, оказывающую воздействие на наши психоэмоциональные процессы.

Содержание

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. УСТАНОВКА.

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ	11
Предварительные условия для установки	15
Подключение к электрической сети	20
Подсоединение к водопроводу	20
Цикл первоначального прогрева	21
Обслуживание	21
Очистка водной системы	22
Прочие технические детали	22
Условия гарантии	22
Обозначения на оборудовании	22

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ	27
Философия NeoQi®	28
Важные меры предосторожности.	29
Безопасность пользователя	29
Медицинские противопоказания	30

ПРИСТУПАЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕЙ КАПСУЛЫ.

Основные компоненты Вашей ванны	37
ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ Ванна для гидротерапии	38
Водный массаж для боков (ZONE I)	38
Водный массаж для спины и ног (ZONE II)	39
Шланг для подводного массажа (ZONE III)	40
Аэромассаж	40
Хромотерапия	41
Озон	42
Ручной душ	42

ПРОЦЕДУРЫ. ТЕРАПИИ. ВЛИЯНИЯ.

АРОМАТЕРАПИЯ	45
ГИДРОМАССАЖ	46
АЭРОМАССАЖ	47
ХРОМОТЕРАПИЯ	48

1

**Предварительные условия.
Установка.**

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ

СПА-ванна NeoQi®

Серийный номер: _____

Проверка перед поставкой

Проверка перед приёмкой

Дата: _____

Физическое состояние

поверхности корпуса _____

компоненты _____

техническое состояние _____

Функциональные испытания

панели управления _____

ванна для гидротерапии _____

функция ручного массажа _____

ручной душ _____

светодиодные светильники _____

Проверил: _____

До начала эксплуатации устройства просим Вас заполнить данный формуляр и отправить его по электронной почте service@neoqi.com обратно в NeoQi AS.

Тел.: +372 688 9100 Адрес: Пийримяэ 15, Тянассильма, волость Саку 76401, Эстония
(Piirimäe 15, Tännassilma, Saku vald 76401, Estonia)

NeoQi AS.
Piirimäe 15, Tännassilma
76406 Saku vald
Эстония
Тел. +372 699 9100

ЗАПРОС НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДАТА:
НОМЕР:

ИМЯ ДИСТРИБЬЮТОРА:

ИМЯ КЛИЕНТА:

Серийный номер изделия: **Niagara:**

Дата получения изделия:

Дата отправки изделия:

Дата начала эксплуатации изделия:

Дата возникновения неполадки:

Описание проблемы:

Отчёт представил

NeoQi AS.
Piirimäe 15, Tännasilma
76406 Saku vald
Эстония
Тел. +372 699 9100

ЗАПРОС НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДАТА:
НОМЕР:

ИМЯ ДИСТРИБЬЮТОРА:

ИМЯ КЛИЕНТА:

Серийный номер изделия: **Niagara:**

Дата получения изделия:

Дата отправки изделия:

Дата начала эксплуатации изделия:

Дата возникновения неполадки:

Описание проблемы:

Отчёт представил

Предварительные условия для установки

Помещение

Оборудование предназначено для использования в помещении.

Помещение, предусмотренное для установки оборудования, должно быть водонепроницаемым. Помещение должен быть оснащены принудительным вентиляцией, поскольку работа оборудования связана с повышением уровня влажности.

Рекомендуется также организовать водоотвод в полу (трап).

Ширина дверного проёма должна составлять не менее 80 см.

Электропитание

В качестве питающего кабеля следует использовать медный кабель с сечением жил **3 x 2,5 мм²**.

Силовой кабель должен быть соединен напрямую в соединительной водонепроницаемой коробке, которая находится на раме ванны.

Максимальная потребляемая мощность:

Модель Niagara - **4,6 кВт/ч**

Модель Niagara Simple - **1,6 кВт/ч**

Ток срабатывания защитного устройства на кабеле питания оборудования должен составлять **20А (10А для Niagara Simple)**.

Водоснабжение

Подключение к водопроводу представляет собой два напорных шланга, один для горячей и один для холодной воды с резьбой 3/4" на одном конце, длина которых зависит от расстояния до точек подключения воды.

Канализационный сток - диаметр сливного шланга должен составлять 50 мм, а его длина зависит от расстояния до сливного отверстия в полу.

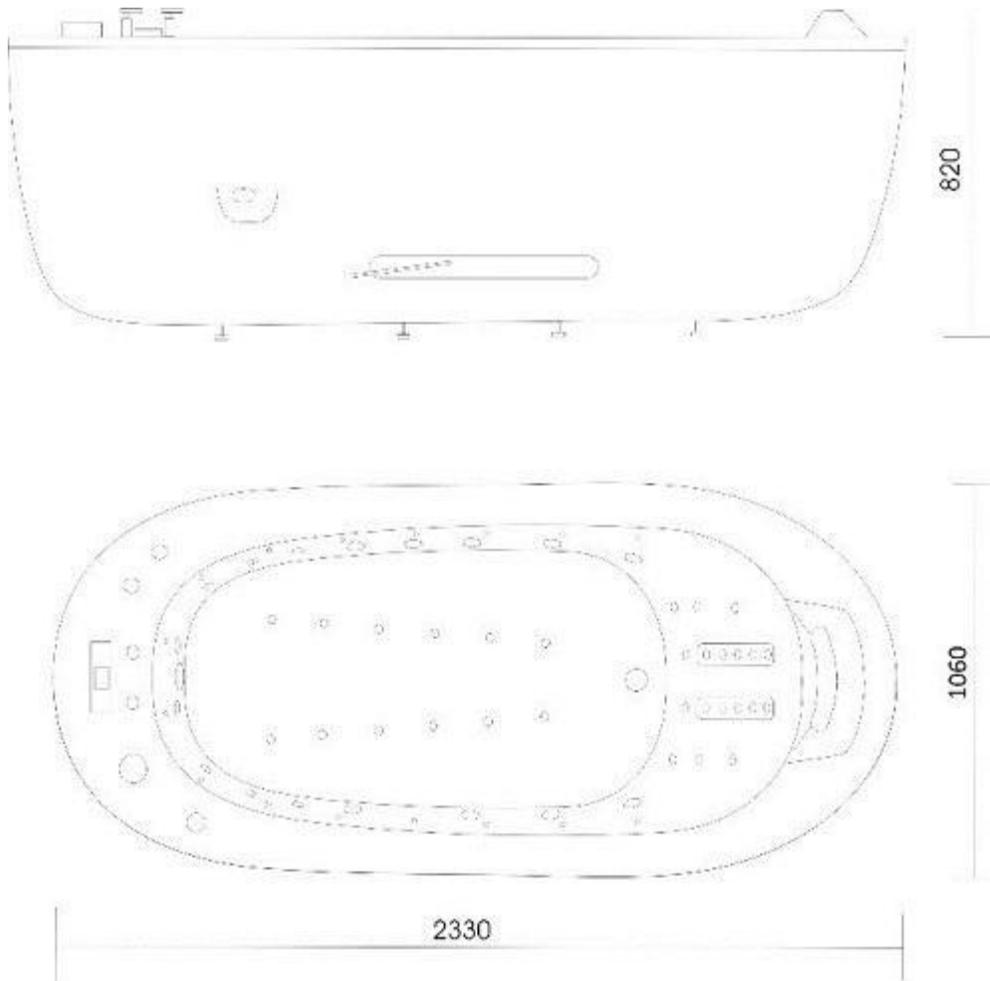


Figure 2 (Niagara)

Подключение к электрической сети

Подключение оборудования NeoQi® Niagara к электрической сети должно осуществляться квалифицированными специалистами или официальными представителями АО NeoQi®.

NeoQi® Niagara относится к ОБОРУДОВАНИЮ КЛАССА 1, в котором защита от удара электрическим током реализована не только за счет ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, но также включает дополнительные меры безопасности, которые подразумевают подключение оборудования к проводнику защитного заземления в фиксированной электропроводке, чтобы в случае повреждения основной изоляции доступные металлические части не оказались под напряжением.

NeoQi® Niagara относится к ОБОРУДОВАНИЮ ТИПА В, которое обеспечивает определенную степень защиты от удара электрическим током, что подразумевает:

- допустимый ток утечки (10 мА);
- надёжность подключения защитного заземления.

Оборудование NeoQi® Niagara соответствует уровню защиты от опасного проникновения воды класса IPX5.

NeoQi® Niagara нельзя использовать, если в воздухе содержатся ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ АНЕСТЕТИКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КИСЛОРОД или ОКИСЛЫ АЗОТА.

Подсоединение к водопроводу

Подключение труб холодной и горячей воды, а также сливной трубы к СПА-капсуле NeoQi® должно осуществляться квалифицированными специалистами или официальными представителями АО NeoQi®.

Для нормальной работы оборудования следует использовать только чистую водопроводную воду. В случае, если в водопроводной воде присутствует значительное количество абразивных примесей и ржавчины, рекомендуется установить фильтр для воды.

Цикл первоначального прогрева

Откройте краны холодной и горячей воды.

* Когда уровень воды достигнет уровня ~ 1 см над задними форсунками, закройте подачу воды. Теперь включите ZONE I и ZONE II и функцию аэромассажа на 5 минут. Удерживайте Ваш палец на каждой кнопке не менее 2 секунд для включения и отключения функции.



Техническое обслуживание

Длительный срок службы и бесперебойную работу Вашего изделия обеспечивает его регулярное обслуживание, которое подразумевает чистку от загрязнений, дезинфекцию и визуальный контроль общего состояния оборудования после каждого использования.

Плановое техническое обслуживание заключается в очистке водной системы ванны.

ВАЖНО: Перед использованием оборудования и составлением плана технического обслуживания, выясните общее качество и жесткость воды.

В случае плохого качества воды (высокое содержание известковых отложений, железа и т.д.), установите соответствующий фильтр для воды.

Если техническое обслуживание оборудования осуществляется не систематически и по мере необходимости, гарантия будет аннулирована.

Старайтесь избегать царапин акриловой поверхности твердыми предметами (песок, ювелирные изделия, аксессуары, и т.д.). Избегайте падения тяжелых и твердых предметов на акриловую поверхность изделия.

Очистка водной системы

Очистка массажной системы ванны (форсунки, насосы, трубы) важно очищать в зависимости от потребности, но не реже чем после каждых 50 сеансов использования.

Прочие технические детали

Для стационарно установленного оборудования номинал установленного во внешней цепи электропитания предохранителя составляет:

-Автоматические выключатели: 20А

-Предохранитель от тока утечки 10мА

Используемое оборудование нельзя перевозить или хранить при температурах ниже 0°C.

Минимально допустимый уровень воды в гидротерапевтической ванне при её использовании должен быть выше самой верхней форсунки как минимум на 1 см.

Условия гарантии

Производители гарантируют, что СПА-капсула NeoQi® не имеет дефектов в использованных материалах и в сборке деталей. Гарантийный срок на изделия исчисляется с даты выдачи счета-фактуры,

длительностью в 1 (один) год. Гарантия на детали, заменённые по гарантийному ремонту, действует до конца гарантийного срока самого изделия.

- Основой гарантии служит надлежащим образом заполненный счёт-фактура.
- Гарантия распространяется только на замену или ремонт дефектных деталей бесплатно и не распространяется на другие прямые, косвенные расходы или ущерб, вызванные дефектом изделия или его неисправностью. NeoQi® оставляет за собой право заменить неисправные детали оборудования по собственному усмотрению.
- Гарантия действительна, если оборудование регулярно обслуживали (см. пункт техническое обслуживание руководства пользователя) и использовали в соответствии с указаниями производителя согласно руководству пользователя.
- Необоснованный вызов обслуживающего персонала – затраты на транспорт покрываются клиентом.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- При отсутствии оформленных документов о покупке-продаже.
- Неправильное или небрежное использование изделия (см. Руководство по использованию конкретной модели), обычный износ, повреждения или дефекты, полученные во время несоответствующего требованиям подключения изделия к водопроводной системе, электропитанию, канализации, вентиляции, а также при установке в помещении.
- Повреждение/неполадка, возникшая из-за плохого качества используемой воды (например, известковый налёт, абразивная взвесь, железо).
- Механические повреждения (например, инфракрасные лампы) вызванные неправильной транспортировкой и/или использованием изделия.
- Прямые и/или косвенные повреждения и/или расходы вызванные непреднамеренными/ преднамеренными действиями или бездействиями клиента (например, отсутствие фильтра для достижения адекватного качества воды).
- Причины, не зависящие от производителя (вандализм, молния, потоп, пожар, изменения сетевого напряжения, короткое замыкание, замораживание и т.д.).
- Если используются абразивные, сильно действующие моющие вещества, а также вещества, способные вызвать химическое повреждение деталей из акрила и поликарбоната. Попытка осуществления ремонта и/или разборки и/или изменения неквалифицированными лицами, не являющимися квалифицированным персоналом NeoQI или поставщиком.

Гарантия не распространяется на следующие работы и детали:

- В список гарантийных работ не входит:
 - Стоимость транспорта до ремонтируемого изделия/ объекта
 - Устранение повреждений оборудования, вызванные авариями электропроводки, водопровода и канализации.
 - Работы связанные с расчисткой зоны работы (0,5 метров от изделия) для обслуживания изделия.
 - Подвод необходимых коммуникаций к изделию.
- Ремонт незначимых дефектов (например, царапины), которые не влияют на исправность работы оборудования.
- Расходные материалы (например, паровой генератор, кварцевые инфракрасные лампы, фильтры, насадки для душа, напорные шланги и др.).
- Устранение транспортных повреждений, нанесённых изделию транспортным средством, не принадлежащим производителю.
- Устранение повреждений, вызванных несоответствующими действиями покупателя (хранение и складирование изделия).
- Стоимость работ и деталей, выполнение и замена которых вызвана целевым использованием и обычным износом изделия, например:
 - Чистка парогенератора от накипи, замена нагревательных элементов.

- Работы по обслуживанию изделия, очистка от загрязнений.
- Устранение дефектов и/или неполадок вызванных игнорированием требований для установки изделия и руководства по эксплуатации изделия
- Работы по уходу за изделием (очистка изделия, регулирование, обслуживание и т.д.), которые перечислены в руководстве по использованию.


Иные претензии, в частности требования компенсации за повреждения, не касающиеся самого оборудования или возникшие в результате необоснованной задержки ремонта или замены деталей, не принимаются.

Обозначения на оборудовании

Вся продукция NeoQi соответствует требованиям Европейского Союза.

1. КЛАСС ЗАЩИТЫ 1Б

Продукция NeoQi относится к классу защиты 1Б, который обеспечивает пользователя электрической безопасности. В оборудовании класса защиты 1Б защита от поражения электрическим током обеспечивается изоляцией и соединением открытых проводящих частей с защитным проводником стационарной проводки. Максимальная допустимая утечка тока 10мА

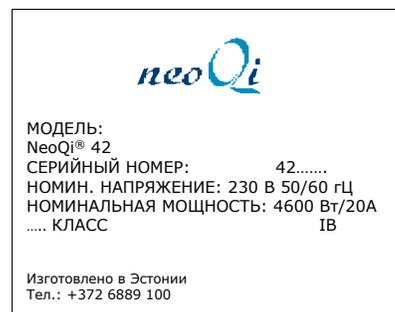

2. IPX5

Изделия NeoQi относятся к классу безопасности IPX5, который защищает электрические приборы оборудования от водяных струй.

Маркировка находится на заводской наклейке на опорной алюминиевой раме в нижней части оборудования.

3. CE-маркировка соответствия

Маркировка CE подтверждает соответствие оборудования требованиям Директивы 2006/95 / CE и 2004/108 / CE



4. ВНИМАНИЕ:

Изучите приложенную документацию!

Маркировка располагается на кожухе оборудования.



2

Введение.

Предостережения.

Введение

Поздравляем! Вы стали владельцем последней новинки в серии СПА-оборудования NeoQi® — СПА-ванны NeoQi Niagara.

В основу методов NeoQi® легли древняя философия и наука о жизни, благодаря которым у Вас есть возможность восстановить равновесие вашего организма.

СПА-ванны NeoQi® предлагают широкий ассортимент терапевтических процедур, соответствующих всевозможным личным потребностям, и разработанных с целью найти решение для конкретных проблем каждого клиента. NeoQi® реагирует на новые требования рынка, объединяя терапевтические практики с подходом, характеризующимся здоровым образом жизни.

Процедуры NeoQi® направлены на осуществление универсальной комплексной терапии. Данный метод затрагивает не только красоту, но также самочувствие и полное расслабление тела. Вдохновением для разработки метода послужили практики энерготерапии, которая снимает мышечное и сосудистое напряжение и освобождает жизненные энергии (стимулирующую, успокаивающую, питающую).

СПА-ванна NeoQi® относится к многофункциональному оборудованию высшего класса, которое может одновременно выполнять несколько комплексных действий, что помогает:

- снизить стресс, восстановив эмоциональное равновесие

- стимулировать чувства, чтобы позволить Вам почувствовать себя здоровыми и отдохнувшими,
- предупреждать и лечить заболевания
- регулировать обмен веществ в организме, контролировать вес
- добиться единства души, тела и разума

СПА-ванна NeoQi® объединяет в одном устройстве следующую уникальную комбинацию функций:

- Водный (гидро) массаж
- Аэромассаж (воздушными пузырьками)
- Подводный душ массаж
- Ручной душ
- Хромотерапия
- Озонатор

Ванна NeoQi® способствует омоложению, долголетию и хорошему здоровью всего организма.

Терапевтические практики подходят для всех — мужчин и женщин всех возрастов и уровней физического развития.

СПА-ванна NeoQi® была разработана на основе высочайших стандартов качества и безопасности. Пользуйтесь капсулой только по назначению, как описано в данном руководстве. Оборудование СПА-капсулы NeoQi® следует использовать только согласно инструкции по эксплуатации.

Для упрощения процедуры обслуживания устройства запишите модель и серийный номер капсулы. Номер находится на задней части крышки оборудования. Сооб-

щайте эти цифры каждый раз, когда Вы звоните в службу поддержки клиентов или

местному дистрибьютору.

Философия NeoQi®

Невидимая жизненная энергия **Qi** (Ци) протекает через все живое. Это энергия, «дыхание» и основная одушевляющая жизненная сила во всей вселенной.

Свободный поток энергии позволяет почувствовать полноту жизни. Вы можете сохранить хорошую физическую форму и здоровье — душевное и физическое. Каждый момент своей жизни Вы чувствуете, что полны сил.

Однако, если энергия застоится, заблокируется, станет нестабильной и неуправляемой (из-за неправильного образа жизни или какого-либо больного органа), Вы скорее всего заболите. Заблокированная или подавленная энергия Ци служит причиной расстройства работы систем организма.

Мы, люди, способны понять, что в нас самих отсутствует равновесие, и предпринять меры для его восстановления, не обращаясь к помощи профессионалов. Это станет высшей точкой профилактической медицины — мягкое исцеление эмоциональной травмы. Мы сможем обнаруживать психо-эмоциональные травмы, которые лежат в основе большинства современных заболеваний, прежде чем они станут психологической проблемой.

Терапевтические практики NeoQi® помогут Вам восполнить энергию Ци и освободить

ее течение, вернуть здоровье и найти новый источник жизненной силы. Каждый сеанс дарит Вам ощущение благоденствия, расслабления и спокойствия. Душевное состояние улучшается за счет снижения стресса.

СПА-капсула NeoQi® - это также мощный инструмент профилактической медицины, ценность которого в сохранении здоровья.

Капсула NeoQi® - уникальное устройство, которым Вы можете пользоваться индивидуально в безопасной, комфортабельной и успокаивающей обстановке.

NeoQi® позволит Вам поддерживать душевное равновесие.

Понимание и принятие энергии станет привычной и обыденной частью нашей повседневной жизни. Как только Вы почувствуете жизненную энергию, Вы сможете начать с ней работать — направлять ее по наиболее благоприятному пути.

Секрет заключается в исследовании и укреплении своей физической, эмоциональной и духовной энергии.

Терапевтические практики NeoQi® - это шаг навстречу пониманию концепции энергии.

Выбрать понимание концепции энергии — означает открыть для себя бесконечный источник собственной силы и радости.

Это стиль жизни нового тысячелетия — он влияет на все сферы повседневной жизни самым значимым образом.

Важные меры предосторожности.

Безопасность пользователя

Используя оборудование, необходимо всегда принимать во внимание следующие условия:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте Часть 2 данного руководства «Общие указания и медицинские противопоказания» - чтобы исключить факторы риска для здоровья или избежать неблагоприятных последствий использования ванны!

Лица, использующие ванну впервые должны сначала привыкнуть к системе и лишь затем переходить к более длительным сеансам. Наблюдайте за клиентами во время процедур.

В целях соблюдения гигиены всем пользующимся ванной непосредственно перед использованием установки рекомендуется принять душ и тщательно вымыть всё тело.

Чтобы исключить риск получения увечий не позволяйте детям, пожилым людям, а также людям с ограниченными физическими и умственными возможностями использовать оборудование без постоянного

контроля со стороны квалифицированного персонала.

Безопасность, надежность и исправное функционирование оборудования NeoQi® гарантируется только в том случае, если:

- установка и иные операции, включающие доработку и ремонт, выполняются квалифицированными специалистами или официальными представителями NeoQi®.
- установка выполняется согласно действующим нормам и правилам, перечисленным в части «УСТАНОВКА» данного руководства.

Не используйте оборудование, если шнур питания поврежден, если оно неправильно функционирует, если оно падало или было повреждено. Свяжитесь с сервисным центром NeoQi® АО для осуществления проверки и ремонта. Избегайте контакта шнура питания с горячими поверхностями.

Используйте только чистую водопроводную воду.

Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия оборудования.

Длительное пребывание в горячей воде может вызвать гипертермию.

Лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено использование системы, так как значительно повышается риск наступления летальной гипертермии.

Лицам, принимающим медикаменты или имеющим неблагоприятный анамнез, следует проконсультироваться с врачом перед использованием системы.

Беременным женщинам, а также женщинам с подозрением на беременность следует проконсультироваться с врачом перед использованием системы.

В целях соблюдения гигиены поверхность ванны необходимо очищать после каждого использования.

Используйте дезинфицирующую жидкость и тщательно смывайте ее чистой водой из душа.

Медицинские противопоказания

Процедуры в ванне NeoQi® противопоказаны, в перечисленных ниже случаях:

- Серьёзная травма, воспаление
- Жар
- Острое воспалительное и аллергическое заболевание кожи, раны
- Сердечно-сосудистая недостаточность, заболевания сердца, повышенное кровяное давление
- Нарушения циркуляции
- Геморрагический диатез
- Прогрессирующий диабет, особенно 1-го типа
- Отёки
- Большие рубцы
- Нарушения восприятия
- Злокачественные образования
- Дефицит коммуникабельности, препятствующий обратной связи в случае ощущения дискомфорта или боли
- Беременность

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом в случае, если Вы сомневаетесь по поводу какого-либо состояния или реакции

!! Период отдыха после процедур После процедур, связанных с нагреванием всего тела, организму требуется не менее получаса, чтобы вернуться к нормальной температуре.

!! Если Ваше состояние ухудшится, немедленно прекратите использование СПА-ванны NeoQi®.

Сердечно-сосудистая недостаточность, заболевания сердца - Горячие и холодные процедуры, повышающие сердечный ритм и давление, противопоказаны при сердечных заболеваниях, поскольку они могут перегрузить больное сердце.

Повышенное кровяное давление - Горячие и холодные процедуры, повышающие сердечный ритм, противопоказаны ввиду нагрузки на сердце.

Рак — Процедуры для клиентов с раковыми заболеваниями необходимо проводить с осторожностью. Настоятельно рекомендуется работать с клиентом только с согласия врача.

Кровотечение - Процедуры для клиентов с предрасположенностью к кровотечениям необходимо проводить с осторожностью. Горячие и холодные процедуры, вызывающие расширение кровеносных сосудов, повышают риск развития кровотечения. **Больным гемофилией и лицам с предрасположенностью к кровотечениям следует избегать** любого перегревания, которое может привести к расширению сосудов и спровоцировать кровотечение.

Пониженная чувствительность — При любом состоянии, в котором клиент имеет пониженную чувствительность кожных покровов, проведение процедур противопоказано, поскольку клиент не сможет почувствовать перегрев или переохлаждение кожи.

Слабость — Горячая терапия может быть противопоказана клиентам, чувствующим слабость, поскольку процедуры могут ухудшить это состояние.

Анемия — Горячие процедуры для всего тела повышают клеточную потребность в кислороде, которая не может быть удовлетворена при анемии.

Кожные заболевания (повреждения) - Процедуры противопоказаны в случае наличия кожных повреждений или раздражений, которые могут усложниться под воздействием холода или тепла.

Такие заболевания кожи, как пустулы, папулы, инфицированные волдыри могут вскрыться из-за расширения сосудов и являются противопоказаниями для проведения процедур.

Беременность — Горячие процедуры для всего тела противопоказаны беременным женщинам, поскольку они могут повлиять на возникновение врожденных пороков. Противопо-

казаны горячие процедуры для всего тела с постоянной высокой температурой (ванны, сауны и т.д.), а также местные процедуры, связанные с воздействием тепла в области живота. Если Вы беременны или подозреваете, что можете быть беременны, прекратите посещать сауну.

Связь посещения низкотемпературной сауны с врожденными пороками не доказана.

Заболевания периферийной сосудистой системы - подводный массаж противопоказан при проблемах с венами, тромбозы и варикозном расширении вен. У клиентов, страдающих артериосклерозом могут быть ослабленные или заблокированные артерии. Тепловые процедуры повышают метаболизм тканей и потребность в кислороде, поэтому термические процедуры противопоказаны.

Пульс - Сердечный ритм не должен превышать 140 ударов в минуту. В противном случае наступит перегрузка сердца. Контроль сердечного ритма осуществляется на внутренней поверхности запястья.

Сахарный диабет - Прогрессирующий диабет, особенно 1-го типа (ювенальный диабет), может снизить способность больного чувствовать повреждение тканей, особенно в нижних конечностях.

Повреждения сосудов, являющиеся последствием заболевания, снижают приток крови к поврежденным тканям.

Перегревание этих областей противопоказано. Необходима консультация врача.

Чувствительность кожи – Процедуры с применением холодной воды противопоказаны клиентам, ранее пострадавшим от обморожения или страдающие повышенной чувствительностью к холоду в результате болезни Рейно или по другим причинам, например, ввиду низкого артериального давления.

Гипотиреоз — Холодные водные аппликации противопоказаны клиентам с гипотиреозом, который вызывает замедление основного обмена веществ.

Заболевания почек — Холод также противопоказан при дисфункции и заболеваниях почек.

Воспаления — Горячие процедуры противопоказаны при острых воспалительных заболеваниях, таких как бурсит, артрит, тендинит и различных видах растяжений. Интенсивное нагревание строго противопоказано в случаях наличия **локализованных инфекций, будь то зубные, суставные или иные инфекции.**

Если у Вас недавно была **травма (или острая инфекция) сустава**, его нельзя нагревать в течение первых 48 часов после травмы или до тех пор, пока не спадут жар и отек. При


хронических воспалениях суставов возможны болезненные реакции на интенсивное нагревание любого вида.

Не рекомендуется повышать температуру тела лицам с дисфункцией надпочечников, системной красной волчанкой или с рассеянным склерозом.

3

**Приступаем к использованию.
Эксплуатация Вашей капсулы.**


Основные компоненты Вашей ванны

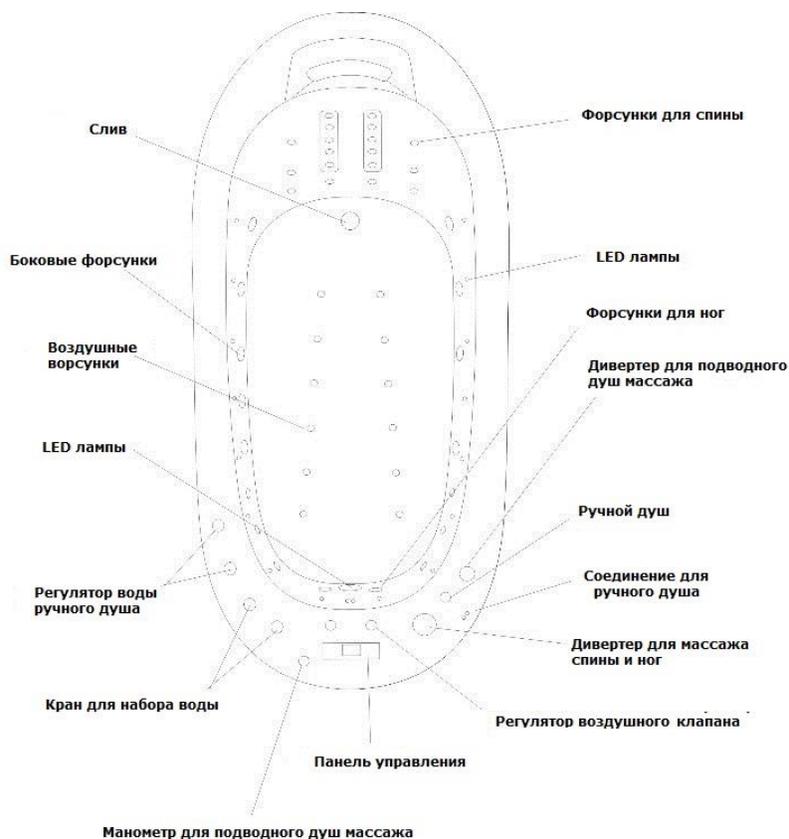

Ванна NeoQi® Niagara управляется с цифровой панели управления. **Панель управления** находится на ванне у переключателей воды.

Панель управления и связанные с ней функции отсутствуют на модели NeoQi® Niagara Simple. Шланг для подводного массажа включается с помощью крана и дивертора, Хромотерапия – с помощью пневмокнопки.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

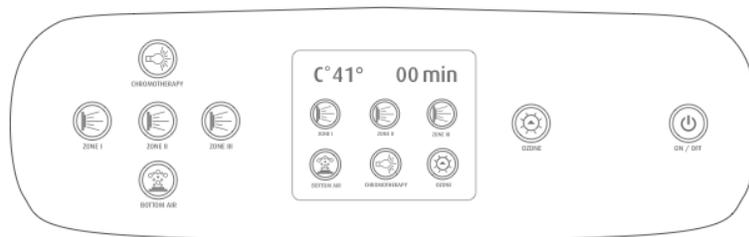

Ванна для гидротерапии

Закройте сливное отверстие ванны, сдвинув сливной клапан в левое положение.

Для быстрого заполнения ванны, Niagara оснащена отдельными кранами для горячей и холодной воды. Откройте краны вращая рукоятки кранов против часовой стрелки. Через несколько минут после частичного заполнения ванны Вы сможете увидеть примерную температуру воды на дисплее температуры на панели ванны.

При необходимости, отрегулируйте температуру воды.

NB! Для запуска некоторых функций ванны достаточно, чтобы уровень воды был на 1 см выше задних массажных форсунок!

Водный массаж для боков (ZONE I)

Для использования функции подводного массажа из боковых форсунок удерживайте свой палец не менее 2 секунды на кнопке **ZONE I** на панели управления В.

Для выключения функции удерживайте кнопку ZONE I не менее 2 секунды.



Для получения большего давления воды откройте воздушный вентиль для водного массажа. Он расположен около ног

находящегося в ванне клиента и Вы можете проникнуть к нему через небольшую панель обслуживания.



Водный массаж для спины и ног (ZONE II)

Для использования функции подводного массажа для спины и ног удерживайте свой палец не менее 2 секунд на кнопке **ZONE II** на панели управления В.

Zone II имеет две позиции. Одну для массажа спины и вторую для массажа ног. Вы можете установить позицию массажа с помощью регулятора, обозначенным **Zone II**. Вы можете выбрать и направить полную мощность на спину, полную мощность

Для выключения функции удерживайте кнопку ZONE II не менее 2 секунды.



на ноги или поделить мощность между спиной и ногами.

Для получения большего давления воды откройте воздушный вентиль для водного массажа.

Шланг для подводного массажа (ZONE III) *

Для использования шланга для подводного ручного массажа возьмите шланг в руку и убедитесь в том, что давление с ответвителя установлено на минимум. После этого удерживайте Ваш палец на кнопке **ZONE III** не менее 2 секунд. Из подводного шланга начнёт вытекать вода, теперь можно добавить давление на дивертере. На краю ванны у Вас имеется манометр. Он показывает давление в массажном шланге.

Для регулировки напора воды, поступающего из шланга, поворачивайте дивертер в желаемое направление (+/-) до нужного давления.

После использования массажного шланга уменьшите с помощью дивертера давление до минимума. Выключите функцию и зафиксируйте массажный шланг в предусмотренных фиксаторах (2 шт.). Убедитесь в том, что массажный шланг зафиксирован должным образом.

*** На Niagara Simple включается с помощью крана и дивертора.**

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ФУНКЦИЮ ZONE III, ЕСЛИ ВЫ НЕ ДЕРЖИТЕ ШЛАНГ В РУКЕ.

Аэромассаж

Для использования функции подводного воздушного массажа удерживайте свой палец не менее 2 секунд на кнопке **BOTTOM AIR**.

Для выключения функции удерживайте кнопку **BOTTOM AIR** не менее 2 секунды.



Хромотерапия *


Для использования функции хромотерапии нажмите на кнопку **CHROMOTHERAPY**. Хромотерапия активируется автоматически. Индикатор хромотерапии появится на экране в кружке. (Вы увидите светящиеся светодиоды).

Хромотерапия активирует автоматически первую программу – мягкая смена цветов. У вас есть возможность установить опре-

деленный цвет, для этого нажимайте на кнопку Chromotherapy несколько раз, пока не увидите желаемый цвет.

Для выключения функции снова нажмите кнопку **CHROMOTHERAPY**.

*** На Niagara Simple управляется с помощью пневмокнопки.**

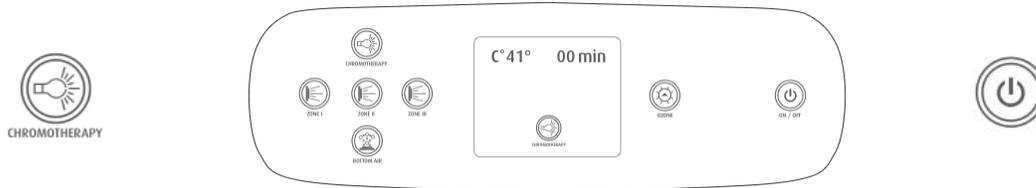

Порядок цветов в функции хромотерапии:

1. Мягкая смена разных цветов
2. Красный
3. Зелёный
4. Синий
5. Жёлтый
6. Индиго
7. Оранжевый
8. Фиолетовый
9. Белый

Озон

Для использования функции озона, нажмите на кнопку **OZONE** и активируйте ZONE II (удерживайте свой палец не менее 2 секунд на кнопке). Озон включится автоматически.

Для выключения функции нажмите на кнопку **OZONE** и деактивируйте ZONE II

(удерживайте кнопку не менее 2 секунд или нажмите однократно кнопку ON/OFF).

Используйте озон для очистки воды от микроорганизмов. Дайте воде поциркулировать в течение 5 минут до и после процедур. Это позволит очистить воду до и после клиента.

NB! Не используйте озон, когда клиент находится в ванне.



Ручной душ

Шланг душа следует подключить к специальному быстроразъемному соединению, вставив соответствующий шланг в нужное гнездо.

Температуру воды можно отрегулировать с помощью термостата смесителя.

Если Вы больше не используете ручной душ, отключите его от быстроразъемного соединителя.

4

Процедуры.

Терапии.

Влияния.

Ароматерапия

Ароматерапия способствует оздоровлению организма и улучшению самочувствия путем использования 100% чистых и натуральных эфирных масел, получаемых из растений и трав. Ароматерапия воздействует на организм двумя путями:

- через обоняние (при вдыхании аромат возбуждает в головном мозге рецепторные зоны системы гипоталамуса, который контролирует эмоциональную сферу человека);
- через кожу (активные компоненты аромасел, пройдя трансдермальный барьер, попадают в кровоток и оказывают стимулирующее влияние на иммунную систему).

Применяя специальные композиции аромасел можно снизить аппетит, снять симптомы стресса и усталости, улучшить состояние кожи (повысить тонус и эластичность, снять воспаление при угревой

болезни, стимулировать выработку собственных структурных белков и т.д.).

Эфирные масла добавляются в наполненную ванну, растворяясь оказывают воздействие на тело и дыхательную систему.

Комплексы эфирных масел от NeoQi®:

1. **Расслабление** (Сладкий апельсин, грейпфрут, майоран, иланг-иланг)
2. **Тонизация** (Розмарин, мята, апельсин, лимон).
3. **Циркуляция** (Розмарин, мята, лаванда, кипарис)
4. **Похудение** (Грейпфрут, орегано, кипарис, розмарин)

Хранение ароматических эмульсий:

Комплексы эфирных масел должны храниться в прохладном, темном месте для обеспечения их эффективности.

Гидромассаж

Гидромассаж, т.е. массаж при помощи водных струй различной направленности, силы и температуры, является одним из самых любимых и приятных.

Гидромассаж – отличное средство для снятия усталости, расслабления и избавления от стрессов. Принятие гидромассажных ванн оказывает на организм человека общеукрепляющее оздоровительное действие, способствует восстановлению тонуса, улучшению структуры и цвета кожи. Во время гидромассажа убираются мёртвые клетки, живые насыщаются кислородом: кожа снова становится молодой и красивой. Также гидротерапевтический массаж в ванне поможет снять мышечные боли, ускорить восстановительные процессы, активизировать иммунную систему организма, он способствует уменьшению жировых отложений и целлюлита, выводит

из организма шлаки и токсины, восстанавливает правильный водный баланс в тканях и клетках. Принятие гидромассажных ванн рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нарушениях обмена веществ, при нервных расстройствах и многих других заболеваниях. При этом принимать гидромассажные ванны могут практически все: и взрослые, и дети.

Гидротерапевтические ванны NeoQi® имеют эргономичную форму, наиболее подходящую для человеческого тела и способствующую расслаблению и снятию напряжения. Ванна не имеет так называемых «точек давления», что делает процедуру гидромассажа наиболее комфортной и приятной.

Аэромассаж

Система аэромассажа воздействует на тело очень деликатно, несмотря на большой запас мощности воздушной помпы. Во время процедуры человек испытывает гамму неповторимых ощущений, как будто тело окутывает мягкое облако теплых, движущихся пузырьков.

Аэромассаж это не просто массаж мышц и тканей тела. Благодаря тому, что пузырьки воздуха одновременно воздействуют на множество нервных окончаний и рецепторов, усиливается приток крови, улучшается периферическое кровообращение, ткани и органы насыщаются кислоро-

дом. Кроме того, устраняются различные застойные явления, кожа увлажняется и приобретает здоровый, красивый вид, а регулярные процедуры аэромассажа способствуют избавлению от целлюлита. Кроме того, аэромассаж показан тем, кто страдает функциональными расстройствами психики, а также испытывают частые стрессы и умственное перенапряжение.

Аэромассаж поможет снять некоторые болевые ощущения, невротические состояния, успокоит, расслабит мускулатуру и станет активным помощником в борьбе против бессонницы, в нормализации кровообращения.

Хромотерапия

Хромотерапия – это уникальная методика лечения и оздоровления, которая заключается в бесконтактном лечении электромагнитным излучением световой энергии различных цветовых оттенков.

При хромотерапии видимое световое излучение, действующее на сетчатку глаза, носит сигнальный характер, избирательно действует на корковые и подкорковые центры, влияет через центральную нервную систему на процессы обмена, усиливая поглощение кислорода и выделение углекислоты, модулирует психоэмоциональные процессы.

При хромотерапии применяются шесть основных цветов и их сочетания:

- красный – оказывает стимулирующее действие, повышает активность, работоспособность, способствует ускорению микроциркуляции и регенерации тканей, устранению возрастных изменений;
- зеленый – обладает успокаивающим действием, расслабляет, показан при гипертонии, заболеваниях сердца и сосудов,
-

способствует снижению воспалительных процессов;

- желтый – способствует активизации мозговой деятельности, повышению настроения, благотворно влияет на пищеварительную систему, улучшает память;
- синий – оказывает противовоспалительное действие, показан при ревматизме, а также при заболеваниях и повреждениях кожи, угревой сыпи, стимулирует энергетический обмен в тканях;
- оранжевый – благоприятно воздействует на пищеварительную и кровеносную системы, повышает настроение, показан при спазмах;
- фиолетовый – способствует улучшению психического состояния, снижает кровяное давление, оказывает благотворное влияние на сердце и легкие, стимулирует творческое мышление.
- белый – это сумма всех компонентов спектра цвета, который близок к дневному цвету.