

6 Comenzi

6.1 Panou de control

Atât pe suportul mobil cât și pe carul monitorului există câte un panou de control. Afișajul de pe ambele panouri este identic, astfel încât să puteți opera dispozitivul de pe oricare din panouri. În funcție de funcția selectată, pe panoul de control vor apărea diverse butoane, indicatoare și câmpuri de introducere de date.

Panoul de control **Vision Center** este conceput ca un ecran tactil. Pentru a opera aparatul, apăsați tasta dorită direct pe ecran.



Ilustr. 24: Vision Center



Vision Center are integrate în plus și un buton de iradiere (1), un buton pentru oprirea de urgență (2) și o lampă de control al radiației (3). În acest manual, simbolul din imagine apare de fiecare dată când este necesară iradierea folosind butonul aferent.

6.1.1 Elemente ale panoului de control

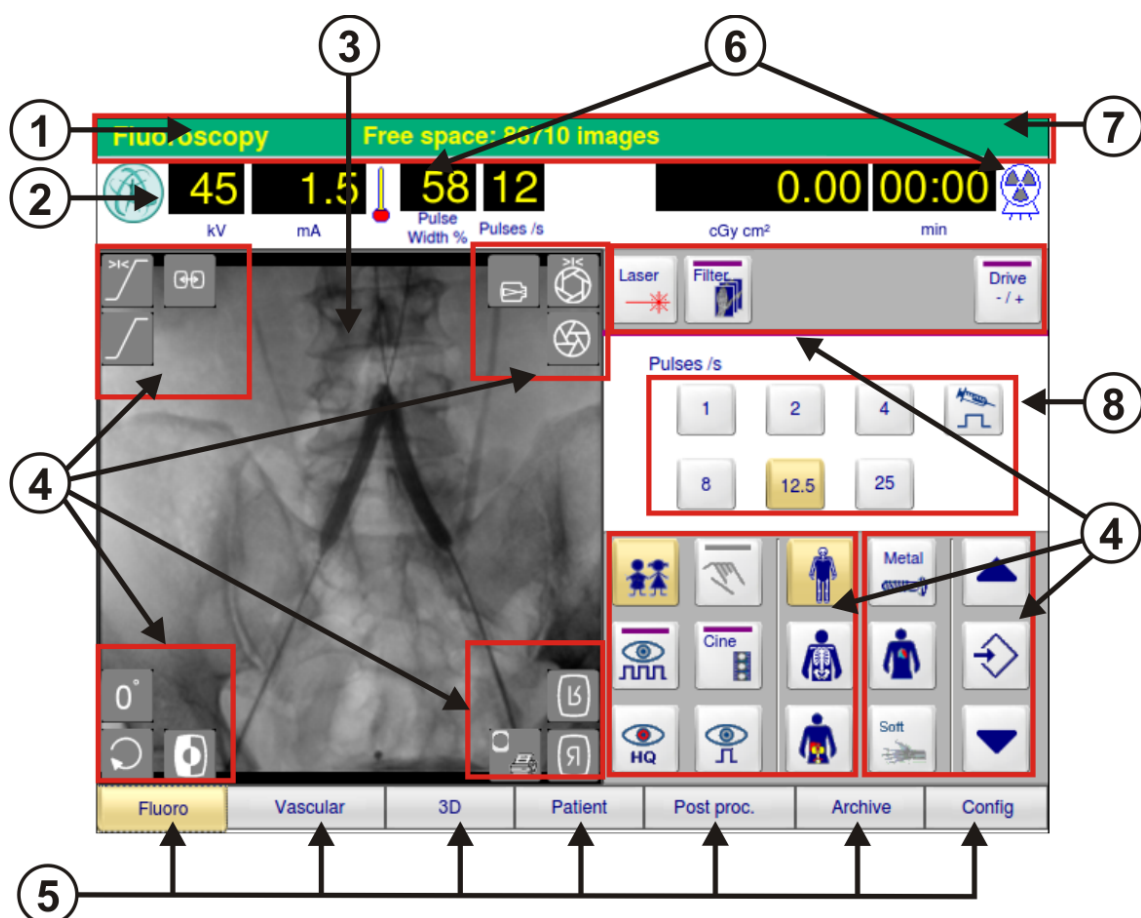


INDICIU

Reprezentarea butoanelor de pe panoul de comandă depinde de prevederile naționale ale fiecărei țări.

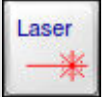


6 Comenzi

Panou de control > Elemente ale panoului de control



Ilustr. 25: Elemente ale panoului de control (exemplu)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Mod de operare selectat | 6 Simboluri de avertizare |
| 2 Indicator | 7 Bară de titlu |
| 3 SmartEye | 8 Câmp variabil introducere date |
| 4 Taste | |
| 5 Taste pentru selectarea modului de operare | |

Simbol(uri)	Explicație
	Taste pe fundal gri: Când apăsați una din aceste taste, pe ecran se derulează imediat o acțiune sau se activează un mod. Dacă o anumită funcție este activă, tasta este colorată galben.
	Taste pe fundal gri, cu bară mov deasupra: Când apăsați una din aceste taste se introduc taste noi în câmpul variabil de introducere a datelor, putând astfel să efectuați noi setări.
	Taste pe fundal gri, cu bară verde deasupra: Când apăsați una din aceste taste activați o altă funcție.