



Accesorii PowerPro®

ROMÂNĂ/ INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Accesorii PowerPro®

DESCRIERE

Accesoriile PowerPro sunt accesorii cu conectare rapidă care facilitează funcțiile de găurire, alezare, filetare, tăiere și conducere a firelor / știfturilor atunci când sunt utilizate cu piesele de mână din seria PRO5000 și PRO6000.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Accesoriile PowerPro sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu toate piesele de mână PowerPro, PowerProMax™, MPower® și MPower® 2 pentru a efectua tăierea oaselor, alezarea, găurirea, înfiletarea șuruburilor și tăierea. Majoritatea accesoriilor de găurire, alezare și tăiere sunt interschimbabile între PowerPro, PowerProMax, MPower și piese de mână MPower 2 cu acționare la baterie, pneumatică și electrică, cu excepția accesoriului de ferăstrău oscilant PRO2045 și conducere a firelor / știfturilor. Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni asociat pentru accesoriul Hall® PowerPro.

Domeniile de aplicare pentru accesoriile utilizate cu piesele de mână asociate PowerPro, PowerProMax, MPower și MPower 2 includ: ortopedie, osteotomie, artroplastie articulară totală, traume, sternotomie medială, reconstrucție ACL și intervenții chirurgicale la oasele mici.

AVERTISMENTE

1. Protecția ochilor este întotdeauna necesară la operarea echipamentului. Fără protecție poate rezulta rănirea ochilor. 
2. Verificați continuu toate piesele de mână și accesoriile pentru supraîncălzire. Dacă se simte supraîncălzirea, întrerupeți imediat utilizarea și returnați echipamentul pentru service. Supraîncălzirea poate cauza deteriorarea frezei, a burghiului sau a lamei și poate cauza necroza termică.
3. Nu atașați, nu introduceți sau scoateți accesoriile sau atașamentele în timp ce piesa de mână funcționează. Pot apărea vătămări grave. **Puneți piesa de mână în modul sigur înainte de instalarea sau îndepărtarea articolelor.**
4. Instrumentele sunt furnizate nesterile și trebuie sterilizate înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare. 

PRECAUȚII

1. Acest echipament este conceput pentru a fi utilizat de către profesioniștii din domeniul medical care sunt familiarizați cu tehnicile și instrucțiunile necesare pentru utilizarea echipamentului. Citiți și urmați toate avertismentele, precauțiile și instrucțiunile inscripționate pe produs și incluse în acest prospect. 
2. Folosiți doar accesorii și atașamente asociate Hall Surgical și CONMED, așa cum sunt definite în descrierea fiecărui atașament din manual.
3. Manipulați cu atenție toate echipamentele. Dacă un accesoriu este scăpat pe jos sau deteriorat în vreun fel, returnați-l imediat pentru service.