

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

Периодическую реализацию кресла пациента должен проводить авторизованный сервисный специалист в регулярных промежутках времени в 6 месяцев.

Эта реализация состоит из следующих шагов:

- проверка контроля стоматологического кресла пациента и его функциональных частей
- контроль наклонного механизма опоры спины
- контроль в случае потребности настройки предфронтальных элементов кресла пациента
- контроль чистоты электрической цепи и установки
- реализация электрической безопасности соответственно инструкциям страны, в которой стоматологическое кресло пациента установлено.

i Сиденье стоматологического кресла может быть в дизайне с прошитой обивкой. Поскольку в данном случае сиденье кресла изготовлено технологией, когда шитье обивки не приклеено к мягкой пене подушки сиденья, после определенного периода времени, может происходить небольшой сдвиг обивки. Однако, это не является дефектом изделия и не влияет на его качество.

i Подробные сведения, схемы и инструкции по обслуживанию приведены в инструкции для сервиса, который доступен каждому авторизованному сервисному центру обученному в DIPLOMAT DENTAL s r o

10 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ

- Для очистки поверхности кресла, достаточно использовать влажное полотенце.
- Производитель рекомендует чистящее средство Incidin™ Foam - спрей, (HENKEL – ECOLAB)
- Поверхность необходимо очищать не реже одного раза в день, а также в случае загрязнения поверхности прибора биологическим материалом.

Предупреждение - запрещенные средства очистки

- Запрещается очищать обивку кресла нарушающими структуру искусственной кожи очистителями (ацетон, трихлор, перхлор, алкоголь содержанием более 10%, абразивные очистители, полировальные вещества)
- Запрещается проводить очистку остальных частей кресла веществами, разрушающими структуру лака и пластика (средства на базе фенола и альдегидов)

i Проводя очистку напольного покрытия (поливинилхлорид/ PVC) с помощью дезинфицирующего средства, запрещается ставить педальное управление на непрочный пол.

i Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования других дезинфицирующих и чистящих средств, кроме рекомендованных.



11 УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Часть	Основной материал	Рециклируемый материал	Хранимый материал	Опасный материал
Металл	Сталь	X		
	Алюминий	X		
	Резина		X	
Пластмассы	РА/полиамид	X		
	РЕ/полиэтилен	X		
	Стеклопластик		X	
Двигатели		X		
Электроника		X		
Кабели	Медь	X		
Трансформатор		X		
Упаковка	Дерево	X		
	Картон	X		
	Бумага	X		
	PUR/полиуретан		X	

Не утилизировать вместе с коммунальными отходами. Отдельные части (например, электроника) необходимо сдать в специальные приемные пункты. При утилизации стоматологического оборудования необходимо соблюдать местные нормы и требования. Непосредственно перед демонтажем необходимо произвести дезинфекцию установки - очистить поверхность, прочистить аспирационную и водосточную системы, извлечь амальгаму из сепаратора и сдать ее в соответствующий пункт приема. Утилизацию оборудования желательно поручить специализированной организации.

12 РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА

В случае расстройства стоматологического кресла пациента попросите ближайший сервисный центр или Вашу торговую организацию информации по сети сервисных центров.

Предупреждение

i Возникшие в результате небрежного обслуживания или несоблюдения приведенных в руководстве по использованию расстройств не будут признаны предметом рекламации в рамках гарантийного срока.

13 ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет на стоматологическое кресло пациента гарантию соответственно гарантийному свидетельству.

Риск повреждения товара переходит из продающего на покупателя:

- с момента сдачи его первому перевозчику с целью транспорта к покупателю,
- или же с момента сдачи - приема товара прямо покупателем.

i Расстройства на стоматологической установке, возникшие вследствие халатности обслуживания или несоблюдения приведенных в Руководстве по эксплуатации инструкций не будут признаны в качестве предмета рекламации в течение гарантийного срока.

Изготовитель закладывает за собой право на изменения в рамках возобновления изделия.

14 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

Содержимое обозначение	ДЕ 20, Программируемое кресло ДЕ 20	ДМ 20
Клинический пациент	1 шт	
Сиденье	1 шт	
Сиденье для ребенка	2 шт	
Подлокотник 1022 12	3 шт	4 шт
Подлокотник 12 AL 250V / DINAKU	2 шт	
Шуруп Bx80	3 шт	4 шт
Прокладка B	3 шт	8 шт

Обивка кресла пациента	ДЕ 20, Программируемое кресло ДЕ 20	ДМ 20
Заголовник	1 шт	
Подлокотник левый	1 шт	
Обитый стеклопластик сиденья	1 шт	
Обитый стеклопластик заголовника	1 шт	

В комплектации для	ДЕ20	Программируемое кресло ДЕ 20	ДМ20
Стоматологическое кресло	*	*	*
Педаль для управления	*	*	*
Сиденье для ребенка	*	*	*
Сиденье кресла - широкая	*	*	*
Сиденье кресла - узкая	*	*	*
Детское сиденье	*	*	*
Педальный переключатель	*	*	*
Обивка кресла - искусственная кожа	*	*	*
СТАНДАРТ	*	*	*
Обивка кресла - искусственная кожа (СПЕЦИАЛ СПЕЦИАЛ ПЛЮС)	*	*	*

* комплектующие, входящие в стандартный комплект поставки

* комплектующие по предварительному заказу

Сервисная документация

- Руководство по использованию
- Гарантийный бланк

15 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

- Упаковки предназначены для перевозки в закрытых транспортных средствах сохранены максимум в 3 слоя.
- Упаковки должны быть плотно зафиксированы и защищены от движения.
- При загрузке и выгрузке не опрокидывать и не перекачивать.

Условия перевозки	От	До
Параметр		
диапазон температуры окружающей среды	-25 °C	+50 °C
диапазон относительной влажности	5 %	95 % не-конденсирующая влажность
диапазон атмосферного давления	700 hPa	1060 hPa


16 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Стоматологическое оборудование следует хранить в сухих помещениях без резких перепадов температур
- Хранить детали необходимо защищать от коррозии
- Запрещено хранить совместно с химическими веществами.


Условия хранения	От	До
Параметр		
диапазон температуры окружающей среды	-25 °C	+50 °C
диапазон относительной влажности	5 %	95 % не-конденсирующая влажность
диапазон атмосферного давления	700 hPa	1060 hPa

Приложение - Габаритные Размеры


Стоматологическое кресло ДЕ 20, Программируемое кресло ДЕ 20

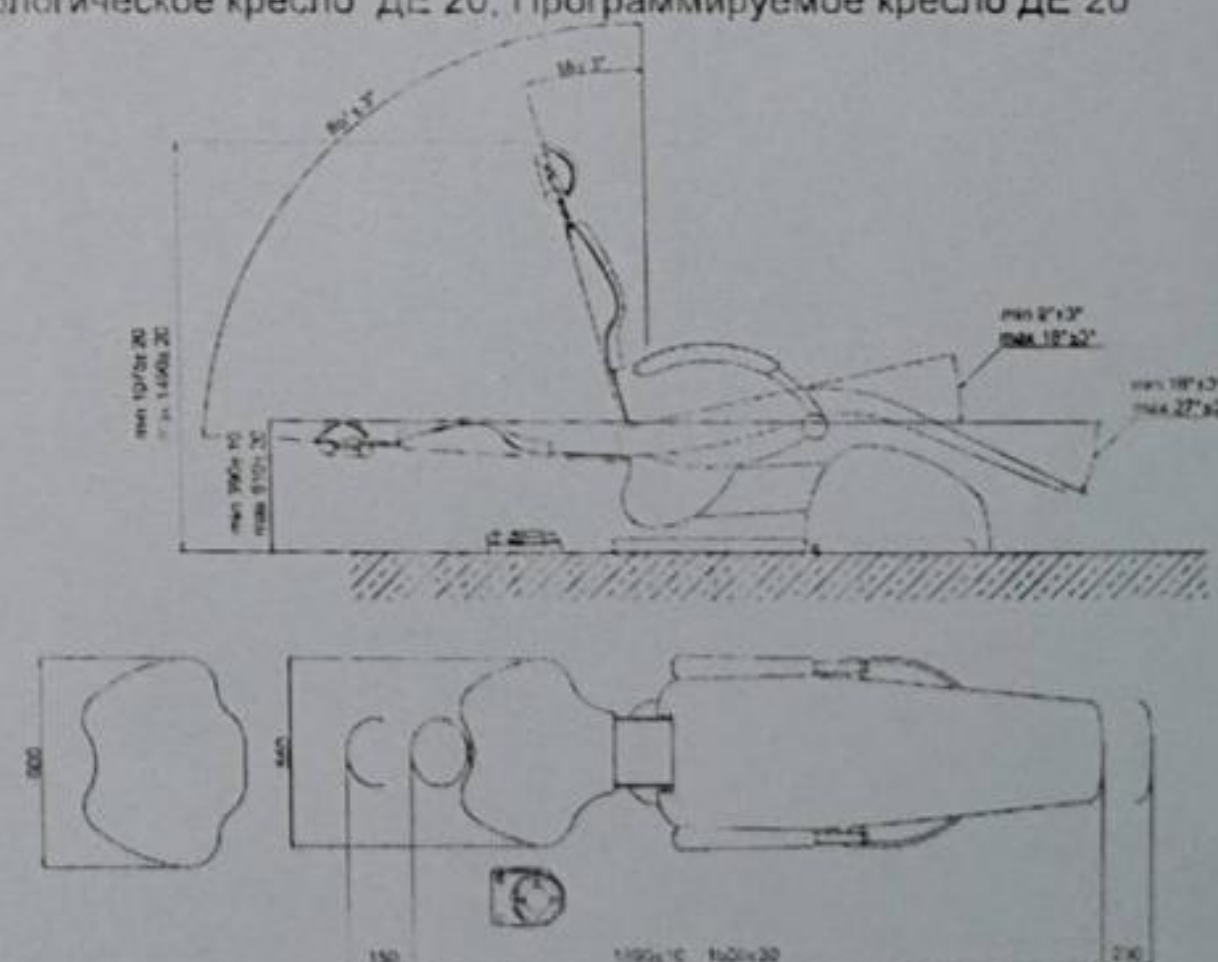


Стоматологическое кресло ДМ 20

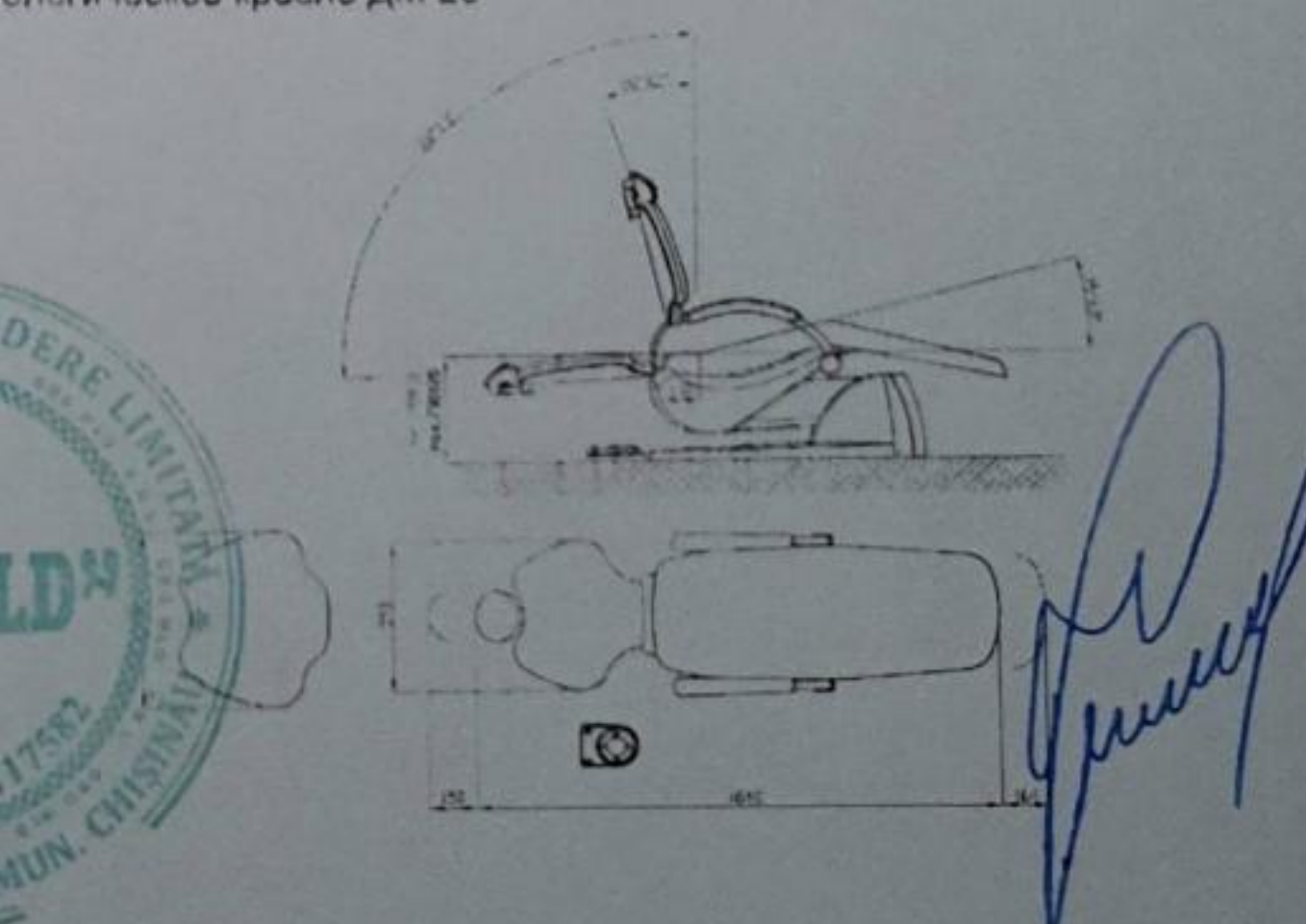

Стоматологическое кресло ДЕ 20. Программируемое кресло ДЕ 20

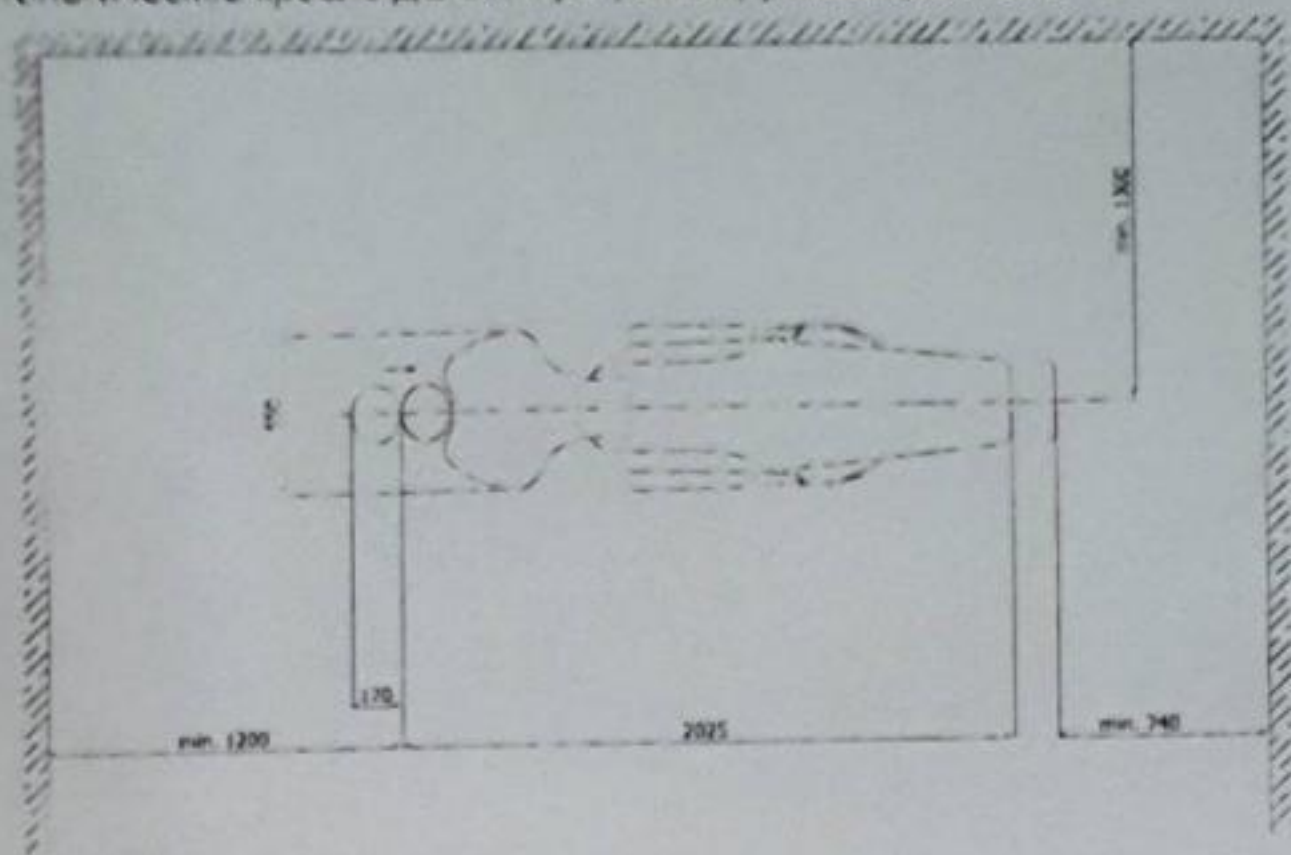

Стоматологическое кресло ДМ 20

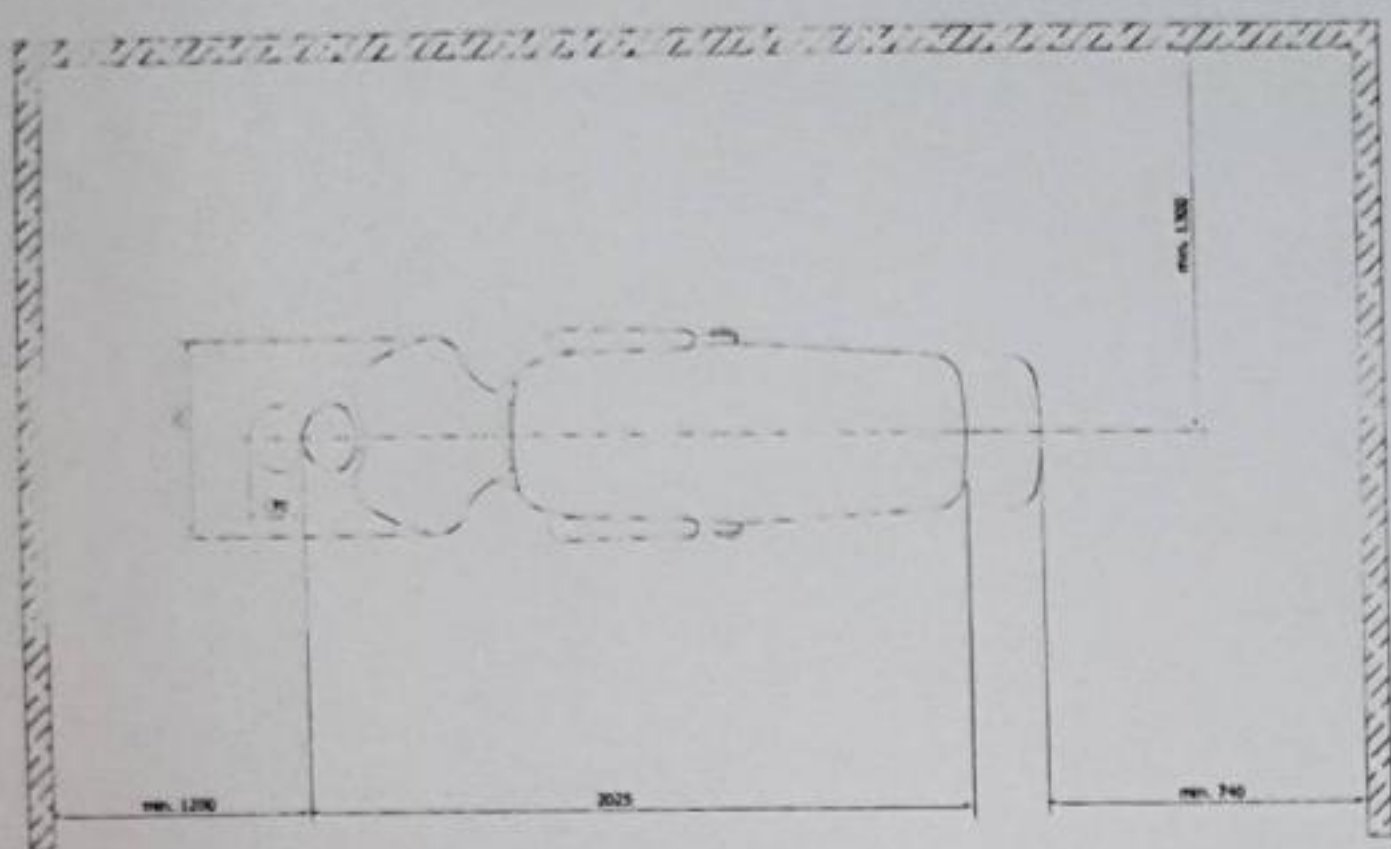

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
VRIHOVSKÁ CESTA 17
921 01 PÍŠŤANY
SLOVAK REPUBLIC

