



	Ieșire monopolară controlată manual: Conectare pentru accesorii monopolare controlate manual.		Nu operați în medii îmbogățite cu oxigen.
	Ieșire bipolară: Conexiune pentru accesorii bipolare.		Conector întrerupător -pedală bipolar.
	Atenție: Ieșire de înaltă tensiune.		Conector întrerupător -pedală monopolar.
	Tip CF: Conexiunile pacientului sunt izolate de pământ și rezistă efectelor descărcării defibrilatorului. RF izolată: Conexiunile pacientului sunt izolate de pământ la frecvențe ridicate.		Conector releu de activare.
	Atenție		Bornă de împământare echipotențială.
	Alimentare pornită: conectat la rețea.		Atenție - înaltă tensiune înăuntru - Service-ul trebuie efectuat de personal calificat.
	Alimentare oprită: deconectat de la rețea.		Conector de interfață serială.
	Consultați Manualul de instrucțiuni / Broșura (pentru instrucțiuni importante privind siguranța). Culoarea simbolului este albastră.		Controlul volumului: Ton de activare bipolar
	Consultați Manualul de instrucțiuni / Broșura (pentru instrucțiuni importante privind siguranța). Culoarea simbolului este albastră.		Controlul volumului: Ton de activare.
1.3.4 Panoul din spate			Creșterea/scăderea volumului.
IPX1	Carcasa rezistă la intrarea apei care cade vertical.		Echipament electric medical: În ceea ce privește șocurile electrice, incendiile și pericolele mecanice numai în conformitate cu IEC/AAMI ES60601-1 / CAN / CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2008)
	Acest echipament furnizează intenționat energie non-ionizantă RF pentru efect fiziologic.		Consultați documentele însoțitoare înainte de punerea în funcțiune a echipamentului.
	Risc de explozie dacă este utilizat în prezența anesteziei inflamabile.		

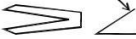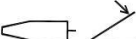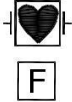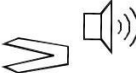