

Pentru a detașa o piesă atașată:

1. Plasați maneta pentru modul de operare în poziția „siguranță”.
2. Răsuciți mandrina de blocare a piesei atașate. Scoateți piesa atașată.



### 2.1.3 Utilizarea piesei de mână cu baterie și declanșator individual PRO9100B HALL® Titan™

Pentru a folosi piesa de mână, puneți maneta pentru modul de operare a piesei de mână în poziția „înainte” sau „înapoi” și apăsați declanșatorul.

1. Cu maneta pentru modul de operare în poziția „înainte”, apăsarea pe declanșator acționează piesa de mână în sensul acelor de ceasornic, așa cum este văzut din spatele piesei de mână. Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului.
2. Cu maneta pentru modul de operare în poziția „înapoi”, apăsarea pe declanșator acționează piesa de mână în sens invers acelor de ceasornic, așa cum este văzut din spatele piesei de mână. Viteza este controlată în mod variabil cu ajutorul declanșatorului.



### 2.1.4 Piesa de mână cu baterie și declanșator dual PRO9200B HALL® Titan™



1. **Mandrină de blocare a piesei atașate** – răsuciți pentru a debloca și a scoate piesele atașate din piesa de mână. Răsucirea nu este necesară pentru introducerea piesei atașate. Pentru fixarea acesteia în poziție, introduceți și împingeți piesa atașată.
2. **Declanșator de activare superior** – utilizat pentru activarea piesei de mână. Declanșatorul nu va putea fi apăsat atunci când maneta de mod este în poziția „siguranță”. Consultați secțiunea „2.1.5 Utilizarea piesei de mână cu baterie și declanșator dual PRO9200B HALL® Titan™” pentru informații detaliate despre funcționalitatea acestui declanșator.
3. **Declanșator de activare inferior** – utilizat pentru activarea piesei de mână. Declanșatorul nu va putea fi apăsat atunci când maneta pentru modul de operare este în poziția „siguranță”. Consultați secțiunea „2.1.5 Utilizarea piesei de mână cu baterie și declanșator dual PRO9200B HALL® Titan™” pentru informații detaliate despre funcționalitatea acestui declanșator.
4. **Manetă pentru modul de operare** – pentru a utiliza piesa de mână, setați butonul în poziția „găurire/alezare” sau „înșurubare/burghiu”. Înainte de montarea sau demontarea unei piese atașate sau unui accesoriu, precum și atunci când nu utilizați piesa de mână, puneți maneta în poziția „siguranță”.
5. **Receptacul pentru baterie** – aici se atașează bateria.
6. **Manetă de eliberare a bateriei** – apăsați această manetă pentru a scoate bateria din piesa de mână.
7. **Baterie** – pentru bateriile compatibile, consultați secțiunea „4.3 Accesorii”.

Consultați secțiunea 2.1.2 pentru informații despre conectarea și scoaterea părților atașate.

