
2.5.4 Configurarea sistemului

Selectarea acestei opțiuni afișează meniul SYSTEM CONFIGURATION (CONFIGURARE SISTEM). Opțiunile sunt:


CAMERA HEAD BUTTONS (Butoanele capului camerei)

LIGHT SOURCE (Sursa de lumină)

SERVICE MENU (Meniul de service)

SHOW SOFTWARE VERSION (Arată versiunea software-ului)

Butoanele capului camerei

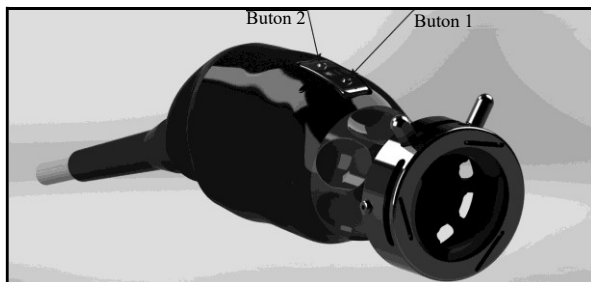

Prin selectarea acestei opțiuni se intră în meniul CAMERA HEAD BUTTONS (Butoanele capului camerei). Butonul situat distal este desemnat ca Buton 1, butonul proximal este Butonul 2.

Ambele butoane au două moduri de operare: PRESS (Apăsă) și HOLD (Menține apăsă). Modul PRESS are două versiuni care pot fi selectate de către utilizator. Modul HOLD are o singură versiune și este activat apăsând și menținând apăsă butonul timp de aproximativ 3 secunde. Fiecare buton poate fi programat de utilizator pentru o acțiune specifică în fiecare mod (PRESS și HOLD).

2.5.4.1.1 TIP APĂSARE BUTON n

Prin selectarea **BUTTON 1 sau BUTTON 2** PRESS TYPE se va afișa meniul BUTTON n PRESS TYPE cu opțiunile:

SHORT (SCURT)

DOUBLE (DUBLU)

Selectați SHORT pentru a activa o singură apăsare scurtă atunci când este utilizat butonul. Selectați DOUBLE pentru a activa o apăsare dublă scurtă.

2.5.4.1.2 ACȚIUNE DE APĂSARE BUTON n

Odată ce tipul de mod PRESS a fost selectat pentru fiecare buton, apăsați MENU pentru a reveni la ecranul meniului CAMERA HEAD BUTTONS (Butoanele capului camerei). Selectați BUTTON n PRESS ACTION (n=1 sau 2), apoi ecranul de selecție BUTTON n PRESS ACTION va fi afișat. De acolo selectați acțiunea dorită pentru acțiunea BUTTON n PRESS, opțiunile sunt:

ZOOM (zoom in/out Camera) (ZOOM (creștere/scădere zoom camera))

BRIGHTNESS (brightness can be adjusted) (LUMINOZITATE (luminozitatea poate fi reglată))

LIGHT SOURCE STANDBY (puts the light source on/off Standby) (SURSA DE LUMINĂ ÎN AȘTEPTARE

(activează/dezactivează sursa de lumină în standby))

PROCEDURE (selects a medical procedure comparable to the PROCEDURE button) (PROCEDURĂ (selectează o procedură medicală comparabilă cu butonul PROCEDURE))

RECORD (activate/deactivate video recording device) (ÎNREGISTRARE (activare/dezactivare dispozitiv de înregistrare video))

CAPTURE (activate still image or print) (CAPTURARE (activare imagine statică sau imprimare))

OFF (no function) (OPRIT (nicio funcție))