


2.4 Panoul posterior

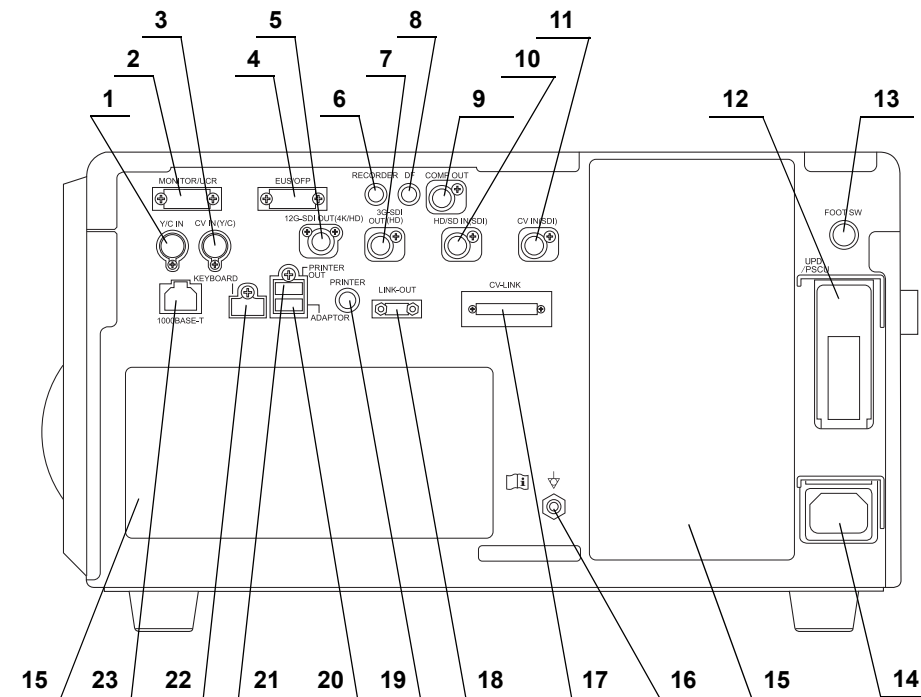

Cap. 2

Nr.	Nomenclatură	Descriere
1	Terminal Y/C IN	Conectează următorul dispozitiv. <ul style="list-style-type: none"> • Unitatea de control PowerSpiral • Centru endoscopic ultrasonic EVIS EUS
2	Terminal MONITOR/UCR	Conectează următoarele dispozitive: <ul style="list-style-type: none"> • Monitor • Unitate endoscopică de reglare a CO₂
3	Terminal CV IN (Y/C)	Conectează următoarele dispozitive: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem video central extern
4	Terminal EUS/OPF	Conectează următoarele dispozitive: <ul style="list-style-type: none"> • Centru endoscopic ultrasonic EVIS EUS • Pompă de spălare OLYMPUS
5	Terminal 12G-SDI OUT (4K/HD)	Conectează următorul dispozitiv. <ul style="list-style-type: none"> • Monitor
6	Terminal RECORDER	Conectează următoarele dispozitive: <ul style="list-style-type: none"> • Înregistrator video
7	Terminal 3G-SDI OUT (HD)	Conectează următoarele dispozitive: <ul style="list-style-type: none"> • Monitor • Înregistrator video

4.9 Configurarea setărilor imaginilor și caracterelor afișate pe monitor

■ Setarea formatului imaginii afișate pe monitor

În această operațiune, setați formatul imaginii afișate pe monitor.

Valoare de setare	Descriere
16:9	Setați formatul imaginilor HDTV și 4K la 16:9.
4:3	Setați formatul imaginilor HDTV și 4K la 4:3.

Tabelul 4.18

NOTĂ

Când utilizați un endoscop din seria 180/260, nu puteți schimba formatul imaginii pentru 4K.

- 1 Atingeți butonul de derulare în jos pentru „Format img (HD/4K)” în Presetări utilizator > Editare presetări utilizator pagina 4/6 > Preferințe afișare pagina 1/3, apoi selectați o valoare de setare.



Figura 4.95

- 2 Valoarea setată selectată este afișată la status.

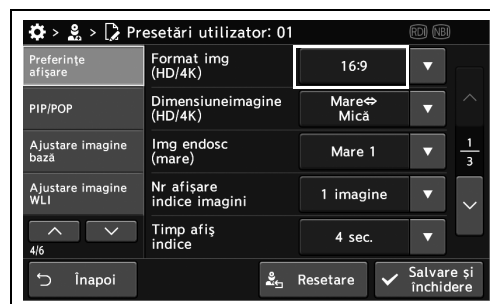


Figura 4.96

■ Setarea metodei de comutare a dimensiunii imaginii endoscopice

În această operațiune, setați metoda de comutare a dimensiunii imaginii endoscopice.

Valoare de setare	Descriere
Mare↔Mică	Mărimea ecranului imaginii endoscopice HDTV și 4K comută în modurile „Mare↔Mică”. Dimensiunea mare este aplicată atunci când este pornit acest instrument.
Mică↔Mare	Mărimea ecranului imaginii endoscopice HDTV și 4K comută în modurile „Mică↔Mare”. Dimensiunea mică este aplicată atunci când este pornit acest instrument.

Tabelul 4.19

NOTĂ

Când utilizați un endoscop din seria 180/260, nu puteți schimba mărimea imaginii endoscopice pentru 4K.

- 1 Atingeți butonul de derulare în jos pentru „Dimensiuneimagine (HD/4K)” în Presetări utilizator > Editare presetări utilizator pagina 4/6 > Preferințe afișare pagina 1/3, apoi selectați o valoare de setare.



Figura 4.98

- 2 Valoarea setată selectată este afișată la status.



Figura 4.99

- 3 Atingeți butonul „Salvare și închidere”. Pentru a seta celelalte elemente în mod continuu, nu atingeți butonul „Salvare și închidere” și setați un alt element.



Figura 4.100

4.22 Configurați setările de sistem pe acest instrument

Utilizați „Meniu lateral” și „Butoane pagină” pentru a afișa articolele de setare.



Cap. 4

Meniu lateral	Buton	Descriere
Limbă/ afișaj	Limbă	Consultați „■ Setarea limbii” la pagina 256.
	Format dată	Consultați „■ Setarea formatului de afișare a datei” la pagina 258.
	Data	Consultați „■ Setarea datei” la pagina 260.
	Oră	Consultați „■ Setarea orei” la pagina 261.
	Oră vară (DST)	Consultați „■ Setarea orei de vară” la pagina 262.
	Ajustare oră DST	Consultați „■ Setarea orei conform orei de vară” la pagina 264.
	Mod afiș date pacnt	Consultați „■ Setarea literei vizibile și a caracterului de sfârșit de linie când informațiile pacientului sunt afișate.” la pagina 266.
	Coment implic	Consultați „■ Setarea comentariului la pornirea acestui instrument” la pagina 268.
	Luminozitate ecran tactil	Consultați „■ Setarea luminozității ecranului tactil” la pagina 269.
Ieșire video	12G-SDI OUT (4K/HD) Semnal	Consultați „■ Setarea semnalului de ieșire al 12G-SDI OUT (4K/HD)” la pagina 270.
	3G-SDI OUT(HD) Semnal	Consultați „■ Setarea semnalului de ieșire al 3G-SDI OUT (HD)” la pagina 271.
	Corecție curcubeu	Consultați „■ Setarea ON/OFF pentru reducerea schimbării de culoare de pe imaginea endoscopică” la pagina 272.

■ Setarea semnalului de ieșire al 12G-SDI OUT (4K/HD)

În această operațiune, setați ieșirea de semnal video de la terminalul 12G-SDI OUT (4K/HD).

Valoare de setare	Descriere
4K	Ieșire semnal video 4K.
HD: 1080p	Ieșire semnal video 1080p.
HD: 1080i	Ieșire semnal video 1080i.
SD	Ieșire semnal video SDTV.

Tabelul 4.94

Cap. 4

- 1 Atingeți butonul de derulare în jos pentru „12G-SDI OUT (4K/HD) Semnal” în Setare sistem pagina 1/2 > pagina Ieșire video, apoi selectați o valoare de setare.

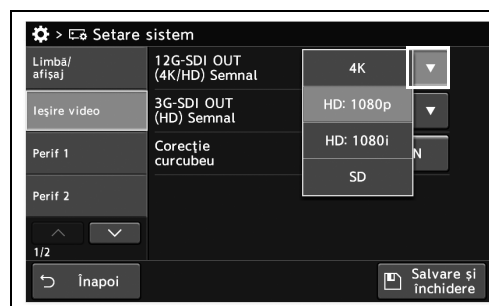


Figura 4.364

- 2 Valoarea setată selectată este afișată la status.

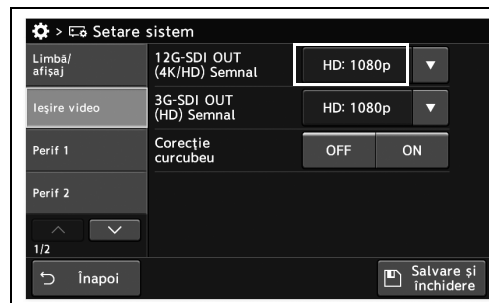


Figura 4.365

- 3 Atingeți butonul „Salvare și închidere”. Pentru a seta celelalte elemente în mod continuu, nu atingeți butonul „Salvare și închidere” și setați un alt element.

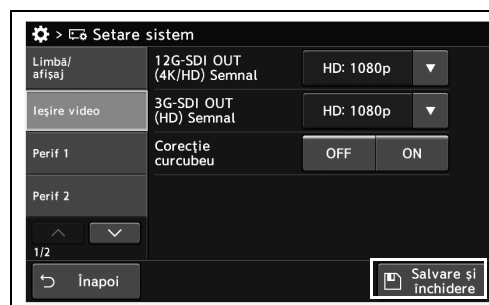


Figura 4.366

■ Setarea semnalului de ieșire video atunci când sistemul video central este conectat la două monitoare sub observare ultrasonică

În această operațiune, setați semnalul de ieșire video atunci când sistemul video central este conectat la două monitoare sub observare ultrasonică.

Valoare de setare	Descriere
Comut EVIS/US	În funcție de schimbarea de setare pentru „■ Afișarea imaginii ultrasonice pe monitor” din manualul de instrucțiuni, comutați ieșirea de imagine la imagine endoscopică și imagine ultrasonică.
EVIS fix	Ieșire numai pentru imagini endoscopice.

Tabelul 4.117

NOTĂ

Când setarea „■ Setarea numărului de monitoare la observarea ultrasonică” la pagina 300 este „Activare”, această funcție poate fi setată.

- 1 Atingeți butonul de derulare în jos fie pentru „12G-SDI OUT(4K/HD)”, fie pentru „3G-SDI OUT(HD)” în Setare sistem pagina 1/2 > Perif. 2 pagina 2/2, apoi selectați o valoare de setare.

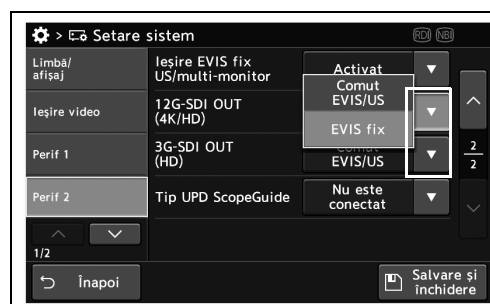


Figura 4.444

- 2 Valoarea setată selectată este afișată la status.

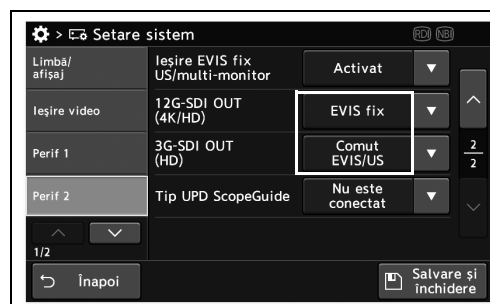


Figura 4.445