


Pungă de recoltare pentru sânge de unică folosință

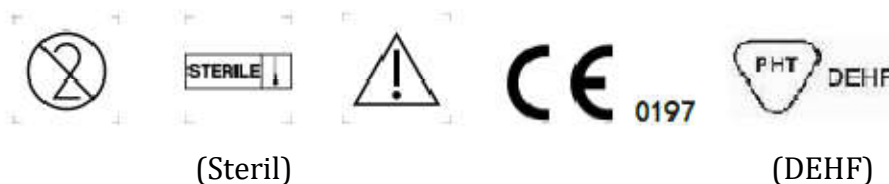

Destinația produsului:

Produsul este destinat pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea concentratului eritrocitar **MT450**.

Modelul produsului: Pungi de sânge triple cu filtru de celule roșii

Parametri tehnici:

- Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu filtru de leucocite integrat pentru eritrocite
- STERIL, NON-TOXIC, FĂRĂ PIROGENI
- Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă cu volum de 63 ml.
- Containerul pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml;
- Container pentru transferul sângelui deleucocitat și produsului finit după centrifugare concentrat eritrocitar cu un volum de 500 ml
- Materiale de bază ale plasticului – polivinilclorid și dietilftalat;

Desenul 1: Sistem convențional al unei pungi de recoltare pentru sânge



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

- Doar pentru o singură utilizare. Soluțiile sterile și nepirogene. Sterilizat cu abur.
- Acest produs nu conține latex de cauciuc natural.

PRECAUȚII

• Nu utilizați dacă soluțiile nu sunt limpede. • Evitați căldura excesivă și lumina directă a soarelui. A nu se îngheța. • Condiții de depozitare recomandate: Temperatura camerei (15-30 ° C / 59-86 ° F).

INSTRUCȚIUNI PENTRU FILTRAREA Sângelui (Vezi Fig. 2)

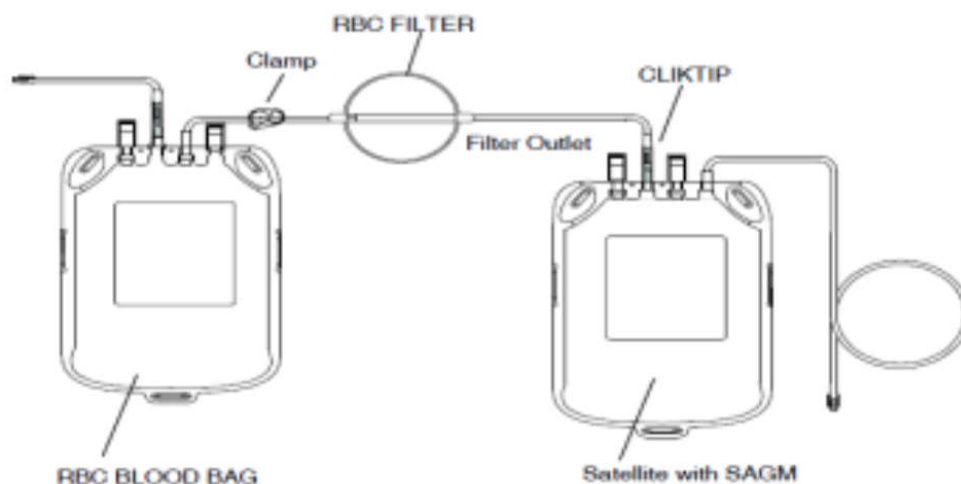


Fig. 2

NOTĂ: Filtrarea poate fi realizată atunci când sângele este stocat la temperatura camerei (22 ± 2 °C) timp de până la șase ore după colectare. Îndepărtați ghidajele tubului (neimaginat) din tubulatură înfășurată înainte de filtrare.

1. Colectați 450 ml de sânge integral în CPDA. Se amestecă bine în timpul și după colectare. Separarea sângelui întreg în concentrat de eritrocite (RCC).
2. Deschideți supapa de ieșire de pe punga de colectare și apăsați Plasma pe punga de satelit.
3. Agățați punga de colectare deasupra pungii de transfer; scoateți clema de etanșare permițând eritrocitelor să curgă liber prin gravitația prin filtru în punga de transfer.
4. Odată ce conținutul de eritrocite a fost filtrat sigilați tubulatură între filtru și punga de transfer. Aruncați punga de colectare și filtrul conform procedurilor stabilite.

ATENȚIE Nu strângeți punga de colectare în timpul filtrării. Nu strângeți și nu aplicați presiune pe filtru cât timp este atașat la punga care conține sângele filtrat. Dacă din orice motiv sângele integral trece prin supapa unidirecțională, opriți filtrarea imediat și considerați produsul ca fiind redus fără leucocite.

INSTRUCȚIUNI PENTRU TRANSFUZAREA SÂNGELUI

1. Păstrați sângele sau componentele sângelui la temperatura specificată.
2. Verificați compatibilitatea înainte de transfuzie.
3. Nu adăugați medicamente în acest sânge.

4. Agitați și amestecați bine sângele înainte de transfuzie.
5. Îndepărtați mecanismul de protecție și inserați setul de transfuzie.
6. Transfuzati tot sângele - setul de transfuzie trebuie să fie dotat cu filtru.
7. Nu aerisiți.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PĂSTRARE

1. Păstrați containerele neutilizate la temperatura camerei (mai mică de 30°C) într-un mediu curat, uscat (umiditatea aerului <60%), bine aerisit.
2. Pungile de recoltare pentru sânge trebuie păstrate în cutiile din carton originale.
3. Este interzisă păstrarea pungilor de recoltare pentru sânge direct pe podea.
4. Utilizarea paletilor sub cutii este recomandată.

PRECAUȚII

1. Doar personalul medical calificat, echipat cu măsuri de protecție (mănuși, etc.) poate utiliza acest produs.
2. Extrageți produsul din ambalajul original individual strict înainte de utilizare.
3. Nu utilizați decât dacă soluția anticoagulantă este transparentă.
4. Nu utilizați în caz de scurgeri.
5. Nu utilizați dacă ambalajul individual este deteriorat.
6. Pungile de recoltare pentru sânge utilizate sau cele cu termenul de valabilitate expirat trebuie eliminate conform regulamentului pentru materiale medicale după contact cu sânge.
7. Acest produs conține Di (2-etilhexil)ftalat (DEHF). Nou-născuții ce primesc exsangvinotransfuzie și adulții ce primesc transfuzie de substituție cu ECMO trebuie supravegheați de către un medic.
8. Doar de unică folosință. Reutilizarea va cauza infectare.
9. După utilizare, eliminați conform instrucțiunilor de eliminare a deșeurilor medicale.

	Producător		Păstrați în locuri ferite de lumina solară
	De unică folosință		Păstrați în locuri uscate
	Utilizați până la AA/LL/ZZ		Nu resterilizați
	Codul lotului		Poziție verticală în sus

	Numărul de catalog		Se aplică limite de umiditate (de la 8% până la 80%)
	Sterilizat prin autoclavare		Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	Conține ftalați		Număr maxim de 6 niveluri de cutii la aranjare
	Limite de temperatură (de la 2°C până la 30°C)		