

Panel „Vezi acum” destinat pentru detectarea calitativă a prezenței 12 DOA (BZO,COC,K2,KET,MET,MDMA,MOP,MTD, OXY, PCP, THC, TML) - Urina

Pentru diagnosticul in vitro

Codul produsului: SN 7.X.12

INTRODUCERE

Panelul „Vezi acum” 12DOA (BZO,COC,K2, KET,MET,MDMA,MOP,MTD,OXY,PCP,THC,TML) este destinat pentru detectarea calitativă a prezenței BZO,COC,K2, KET, MET,MDMA,MOP,MTD,OXY,PCP,THC,TML și metabolizii lor în urină la sau peste nivelul limită de:

300 ng/mL BZO; 300ng/mL COC; 50 ng/mL K2: 1000 ng/mL KET: 1000 ng/mL MET; 500 ng/mL MDMA; 300 ng/mL MOP; 300 ng/mL MTD;100 ng/mL OXY;25 ng/mL PCP;50 ng/mL THC, 200 ng/mL TRA.

Aparatul este conceput pentru uz profesional.

Acest test oferă doar un rezultat preliminar. Considerația clinică și raționamentul profesional ar trebui aplicate oricărui rezultat al testului de abuz de droguri, în special în evaluarea unui rezultat preliminar pozitiv. Pentru a obține un rezultat analitic confirmat, este necesară o metodă chimică alternativă mai specifică. RECOLECTAREA ȘI DEPOZITAREA PROBELOR

- Proba de urină poate fi colectată în orice moment într-un recipient curat, uscat, fără conservanți.
- Dacă specimenul nu poate fi testat imediat, ele pot fi păstrate la 2-8 °C timp de până la 72 de ore înainte de testare sau congelate la -20 °C pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Specimenele trebuie echilibrate la temperatura camerei înainte de testare dacă au fost refrigerate sau congelate.

PROCEDURA DE TESTARE

- Scoateți dispozitivul de testare din pungă când sunteți gata să efectuați testul Etichetați dispozitivul de testare cu identificarea pacientului sau a controlului.
- Scoateți partea inferioară a dispozitivului de plastic pentru a elibera benzile.
- Cufundați benzile în urină și aveți grijă la instrucțiunile de pe eticheta dispozitivului din plastic.
- Scoateți banda după 10 secunde. Așezați benzile panoului pe o suprafață plană, curată, uscată, neabsorbantă.
- Citiți rezultatele la 5 minute. Asigurați-vă că fundalul zonei de testare este alb înainte de a interpreta rezultatul

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Pozitiv

Numai o bandă de culoare apare în regiunea de control. Nicio bandă aparentă în regiunea de testare. Aceasta indică faptul că prezența medicamentului este peste concentrația limită.

Negativ

Două benzi de culoare distincte apar în regiunile de control și de testare. Acest lucru indică faptul că nu există niciun medicament

prezența probei sau a medicamentului este sub concentrația limită.

Invalid

Nicio bandă vizibilă în regiunea de control. Repetați cu un nou kit de testare. Dacă testul eșuează în continuare, vă rugăm să contactați distribuitorul cu numărul de lot.

Notă: O linie slabă în regiunea de testare indică faptul că medicamentul din eșantion este aproape de nivelul limită pentru test. Aceste probe ar trebui să fie re-testate sau confirmate cu o metodă mai specifică înainte de a se face o determinare clinică.

DEPOZITARE ȘI STABILITATE

Trusa de testare poate fi păstrată la temperatură (2 până la 30°C) în punga sigilată până la data expirării. Trusa de testare trebuie ținută departe de lumina directă a soarelui, umiditate și căldură.

PRECAUȚIE

- NUMAI PENTRU UTILIZARE DIAGNOSTIC IN VITRO.
- Nu-l utilizați după data de expirare.
- Dispozitivul de testare nu trebuie reutilizat.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚA

- Sensibilitate BZO

Benzodiazepinele Benzodiazepine Urinary Test Strips detectează benzodiazepina și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 300 ng/ml, ceea ce este sugerat de Institutul Național pentru Abuzul de Droguri (NIDA) pentru metoda imunologică.

- Sensibilitate COC

Testul urinar pentru cocaină „Vezi acum” detectează cocaina și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 300 ng/ml.

- Sensibilitatea K2

Testul K2 „Vezi acum” Este conceput pentru determinarea calitativă a metaboliților majori ai canabisului sintetic JWH-18 și JWH-73 în probele de urină umană la un nivel limită de 50 ng/ml.

- Sensibilitate KET

Testul „Vezi acum” Testul urinar „Vezi acum” pentru ketamina detectează prezența ketaminanului și a metaboliților săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 1000 ng/ml.

- Sensibilitate MET

Benzile de testare pentru metamfetamina „Vezi acum” detectează metamfetamina și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 1000 ng/ml.

- Sensibilitate MDMA

Benzile de testare pentru metilendioximet-amfetamina „Vezi acum” detectează MDMA și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 500 ng/ml.

- Sensibilitate MTD

Benzile de testare pentru metadonă „Vezi acum” detectează metadona și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 300 ng/ml.

- Sensibilitate MOP

Benzile de testare pentru morfină „Vezi acum” detectează opiaceele și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 300 ng/ml.

- Sensibilitate OXY

Testul „Vezi acum” Oxicononă detectează prezența oxicononei și a metaboliților săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 100 ng/ml.

- Sensibilitate PCP

Testul Fenciclidină „Vezi acum” detectează prezența PCP și a metaboliților săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 25 ng/ml.

- . Sensibilitate THC (Marijuana)

Benzile de testare THC „Vezi acum” detectează THC și metaboliții săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 50ng/ml.

- . Sensibilitate TML

Testul „See Now” Tramadol (TML) detectează prezența tramadolului și a metaboliților săi în urină la concentrații egale sau mai mari de 200 ng/ml.