

## **Masă de manipulare medicală model: MP -002**

Masa este proiectată pentru utilizarea în instituții medicale (camere medicale, săli de operație, săli de proceduri etc.

Masa este fabricată din metal vopsit de înaltă calitate, astfel încât este potrivită pentru utilizarea în încăperi cu cerințe ridicate pentru tratarea și dezinfectarea mobilierului.

Domeniul de aplicare plasarea instrumentelor medicale, preparatelor și consumabilelor utilizate în timpul operațiilor chirurgicale, examinărilor și altor manipulări.

Trei rafturi din oțel inoxidabil, cu care este echipată masa, au o margine pe toate părțile. Aceasta previne căderea obiectelor așezate pe suprafață în timpul deplasării produsului.

Masa are o mobilitate mare datorită prezenței a 4 roți.

Diametrul fiecărei roți este de 75 mm. Două roți sunt echipate suplimentar cu frâne, ceea ce vă permite să fixați masa dacă este necesar.

**Indicații de utilizare:** pentru amplasarea în saloane, săli de tratament și de examinare.

**Contraindicații:** niciuna atunci când este utilizată în conformitate cu documentația de operare.

**Nu mișcați masa în timpul procedurilor, puneți frâne pe roți!**

Denumirea principalilor parametri și dimensiuni	MP- 002
Înălțimea mesei	960 mm
Lățimea mesei	430 mm
Lungimea mesei	600 mm
Sertar cu glisare	2 buc

## **Reguli de funcționare a echipamentului**

1. Transportul, depozitarea și exploatarea produsului trebuie efectuate în conformitate cu parametrii din tabel.
2. Masa medicală trebuie să fie exploatată în încăperi închise uscate, cu o temperatură nu mai mică de +2°C și nu mai mare de +40°C și o umiditate relativă de 45 - 70%.
3. Nu permiteți expunerea directă la lumina soarelui, deoarece dăunează aspectului produselor, poate schimba culoarea suprafeței.
4. Masa trebuie să fie instalată la o distanță de cel puțin 0,5 m de dispozitivele de încălzire.

5. Echipamentul trebuie protejat de deteriorări mecanice și de expunerea la substanțe chimice agresive.

6. Este interzisă utilizarea pentru curățare a obiectelor ascuțite, a acizilor, a soluțiilor alcaline, precum și a agenților abrazivi destinați îngrijirii veselei și a obiectelor sanitare.

## **Îngrijirea suprafețelor din metal vopsit și oțel inoxidabil**

1. Produsele necesită puțină întreținere și sunt practice de utilizat.
2. Produsul poate fi curățat cu orice agent de curățare pe bază de alcool, cu excepția celor cu un principiu de acțiune abraziv.
3. O perie moale poate fi utilizată pentru curățarea murdăriei dificile.



## **Înregistrarea AMDM: DM000620032**

Producător: Caravan Express SRL  
Republica Moldova  
or. Cimișlia, MD-4101

