


# КАММЕР




## БАНКА УВЛАЖНИТЕЛЬ КИСЛОРОДА ПУЗЫРЬКОВОГО ТИПА

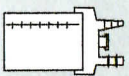

Банка используется для подачи увлажненного кислорода больным, находящимся на искусственной вентиляции легких. Увлажнение осуществляется при прохождении пузырьков газа через налитую в емкость воду.

## КЛАПАН СЪРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

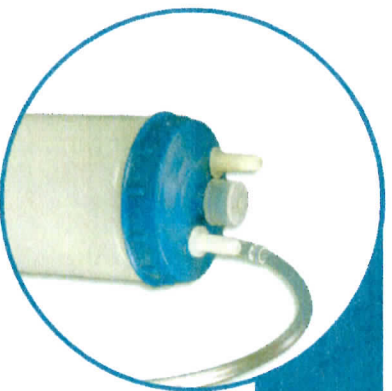

- Полимерная емкость объемом 600мл.
- Адаптер Жанс для подключения кислородного катетера
- Клапан сброса избыточного давления
- Шкала наполненности банки
- Трубка-удлиннитель длиной 2000мм.

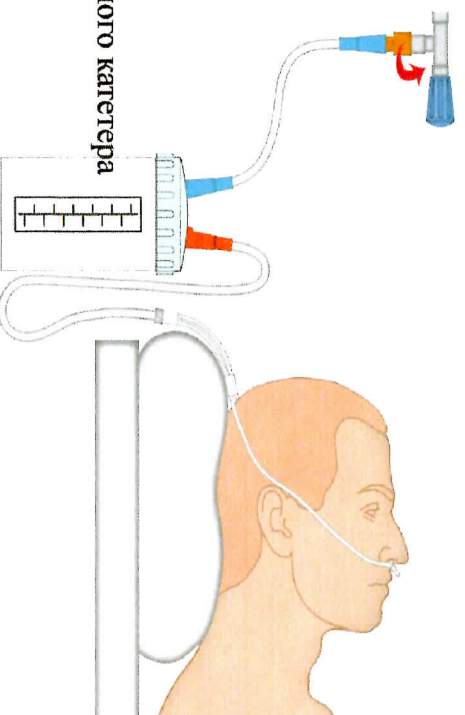


Рис. 1. Подключение катетера к системе подачи кислорода.

## ЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА

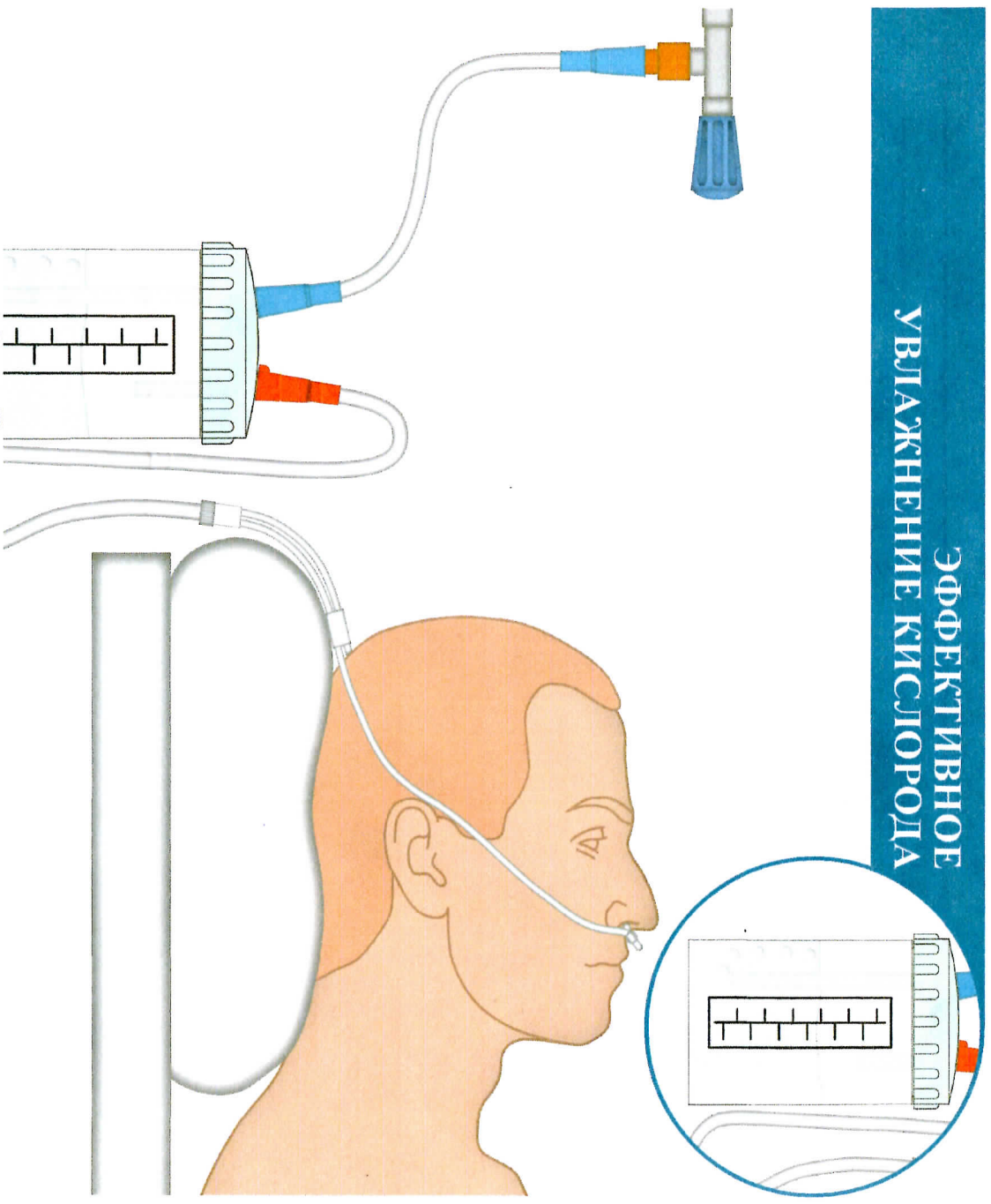


Рис. 2. Подана увлажненного кислорода пациенту.

*Полимерную емкость на треть заполняют очищенной водой.*

*К адаптеру Жанэ подключают удлиняющую трубку кислородного катетера.*

*Открывают вентиль редуктора кислородного баллона, соединенного с балкой-увлажнителем, регулируют скорость подачи кислорода до 4 - 5 л/мин.*

*Кислород сброса избыточного давления на крышке балки-увлажнителя регулирует равномерность подачи кислорода.*

| Код товара    | Диаметр, мм | Размер | Длина, мм | Цветовой код |
|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 0232.04040000 |             |        |           |              |