

Manual de utilizare

VIDEOSCOP GASTROINTESTINAL

OLYMPUS GIF-XP170N
OLYMPUS GIF-H170

COLONOVideoscop

OLYMPUS CF-H170L/I

Simboluri 1

Informații importante – vă rugăm să le citiți înainte de utilizare 2

Capitolul 1 Verificarea Conținutului Pachetului 13

Capitolul 2 Terminologia și specificațiile instrumentului 17

Chapter 3 Pregătirea și inspecția 29

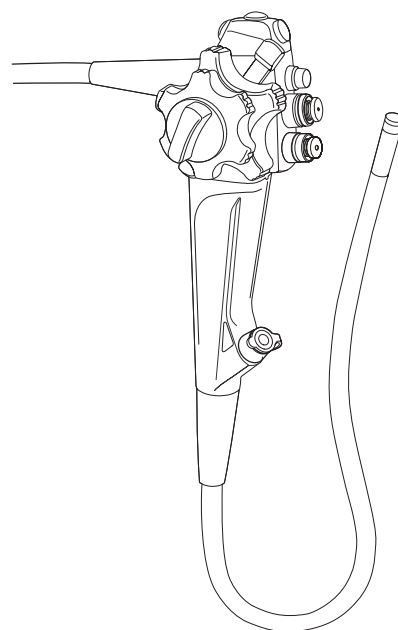
Chapter 4 Funcționarea 63

Chapter 5 Remedierea problemelor 89

Anexă 101



Număr articol: RO-8602332
Versiunea 1.0 – 04/2013



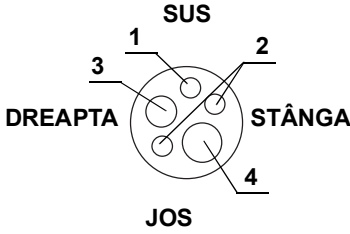
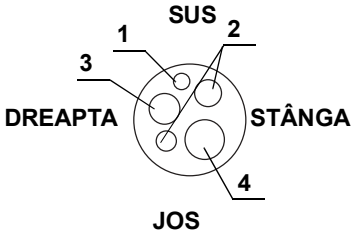
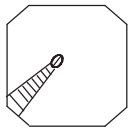
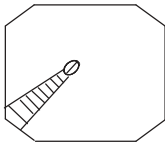
Pentru informații referitoare la reprocesare consultați manualul endoscopului „MANUAL DE REPROCESARE”, care are modelul endoscopului dvs. pe copertă.



Specificații tehnice

Funcția endoscopului

Cap.2

Model		GIF-XP170N	GIF-H170
Sistem optic	Câmp vizual	140°	140°
	Direcția de vedere	Vizualizare frontală	Vizualizare frontală
	Adâncimea câmpului	3 – 100 mm	2 – 100 mm
Secțiunea de inserție	Diametrul exterior al capătului distal	ø 5,4 mm	ø 9,2 mm
	Capătul distal extins 1 Duză aer/apă 2 Lentilele luminii de direcționare 3 Lentila obiectivului 4 Ieșirea canalului pentru instrumente		
	Diametrul exterior al tubului de inserție	ø 5,8 mm	ø 9,2 mm
	Porțiune de inserție lungime de lucru	1100 mm	1030 mm
Canalul pentru instrumente	Diametru interior canal	ø 2,2 mm	ø 2,8 mm
	Distanța vizibilă minimă*1	2 mm	3 mm
	Direcția din care accesoriile de endoterapie intră și ies din imaginea endoscopică		
Debit aer*2		20 cm ³ /s	25 cm ³ /s
Secțiunea de flexie	Interval de angulație	SUS 210° JOS 90° DREAPTA 100° STÂNGA 100°	SUS 210° JOS 90° DREAPTA 100° STÂNGA 100°
Lungimea totală		1420 mm	1350 mm

*1 Distanța de la capătul distal al endoscopului.

*2 Standard atunci când este utilizată CV-170 (presiune înaltă a aerului).