

Instrucțiune Tampon Veronal

Tampon CFT concentrat 20X

Pentru diagnostic veterinar in vitro

Cod produs: CFTB

Introducere:

Tamponul pentru testul de fixare a complementului pH 7,2 este utilizat pentru a dilua serurile și reactivii pentru testul de fixare a complementului.

Permite obținerea unor condiții precise de pH și reducerea numărului de seruri anti-complement. Prezența ionilor de Ca^{++} și Mg^{++} întărește activitatea complementului.

Compoziția reactivului:

Tampon Hepes de calciu-magneziu	1 flacon 20X de 50 ml Q.S pentru 1L de apă distilată
<u>Stabilitate la 2-8°C:</u> • 3 ani în formă concentrată 20X (data de expirare indicată pe etichetă). • 2 luni în formă 1X gata de utilizare (nu contaminați).	

Reactivi necesari, dar nu sunt furnizați:

<u>Reactivi:</u> Complement (ref CPLT) Ser hemolitic (ref: HS). Globule roșii de oaie 50 %. Antigen pentru testul de fixare a complementului	<u>Material:</u> Material de laborator si consumabile mentionate in standardul CFT în vigoare.
---	--

Precauții de utilizare:

- Numai pentru diagnostic in vitro.
- Nu utilizați reactivii după data de expirare.
- Nu amestecați reactivi din loturi diferite.
- Nu introduceți pipeta în gură.

Condiții de depozitare:

- A se păstra la 2 – 8°C.
- Reactivul este stabil, în forma sa concentrată de 20X, până la data de expirare indicată pe etichetă, dacă este depozitat în condițiile prescrise.

Protocol:

- Fiecare sticlă de tampon concentrat 20X trebuie diluată cu o cantitate de apă distilată suficientă pentru 1 litru.
- Amestecați bine.
- Nu contaminați.

Eliminarea deșeurilor:

- Reactivii neutilizați pot fi eliminați ca deșeuri nepericuloase.