

# Clino'wipes

ȘERVEȚELE IMPREGNATE CU O SOLUȚIE DE DETERGENT ȘI DEZINFECTANT



## ■ BENEFICIILE PRODUSULUI

- Activ de la 2 min. (EN 16615)
- Curățarea și dezinfectia dispozitivelor medicale într-o singură operațiune
- Activitate virucidă completă (virusuri simple și încapsulate)
- Formulă pentru contactul cu alimentele
- Activ împotriva Clostridium difficile (soluție de impregnare)

# Clino'wipes

## ȘERVEȚELE IMPREGNATE CU O SOLUȚIE DE DETERGENT ȘI DEZINFECTANT

### Instrucțiuni de utilizare

- Când folosiți șervețelele umede pentru prima dată:
- Puneți mănuși și scoateți capacul cutiei
- Scoateți capacul și scoateți primul șervețel (din centrul rolei)
- Treceți șervețelul prin deschiderea capacului cutiei

### 1- ■ Utilizare:

- 1- Curățați temeinic prin ștergere mecanică a suprafeței materialului care urmează să fie tratat
  - 2- Timp de contact: în funcție de activitatea antimicrobiană dorită
  - 3- Nu clătiți\*
- \* Nu necesită clătire, cu excepția cazului în care producătorul stratului de acoperire specifică altfel sau pentru suprafețele care intră în contact cu alimente, piele și mucoase.

- 4- Aruncați suportul
- 5- Închideți capacul după fiecare utilizare
- 6- Repetați operațiunea dacă este necesar

### PROPRIETĂȚI DEZINFECTANTE

Activitate	Standard	Contact	
<b>Bactericidal</b>	EN 16615	2 min.	
	EN 13727	5 min.	
	EN 1276		
	EN 13697		
	EN 14561		
<b>Levuricid</b>	EN 16615	2 min.	
	EN 13624	5 min.	
	EN 1650		
	EN 13697		
	EN 14562		
<b>Fungicidal</b>	EN 13624	10 min.	
	EN 14562		
<b>Virucidal</b>	EN 14476	Norovirus	5 min.
		Adenovirus	10 min.
		Poliovirus	
		Rotavirus	
<b>Tuberculocidal</b>	EN 14348	10 mi	
<b>Sporicidal</b>	EN 13704	15 min.	
	EN 17126	10 min.	
	<i>M.terrae</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i> <i>Bacillus subtilis</i>		

### PRECAUȚII DE UTILIZARE

Consultați Fișa cu Date de Securitate

### CARACTERISTICI

- Aspect: șervețele albe neșesute
- pH-ul soluției de impregnare: 7

### COMPOZIȚIE

- Dodecylamine
- Ethanol
- Isopropanol
- Surfactant
- Excipient

### AMBALAJ

- 1 Box of 12 canisters of 150 wipes ..... ref. **10795166**



CE  
0459

Dangerous product - follow the precautions for use. Read the label and product information before use. Class IIb medical device.