

# ADASPOR<sup>®</sup> PLUS

CONCENTRATO

Sol. B

## SOLUȚII DE STERILIZARE LA REȚE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE

**Descrierea soluției activate (A + B):** Soluție de sterilizare și dezinfectare de înaltă clasă, concentrată, cu acțiune rapidă, tuberculocidă, sporicidă, bactericidă, virucidă, fungicidă pentru sterilizare și dezinfectare a endoscoapelor și dispozitivelor medicale, atât invazive, cât și non-invazive (instrumente, catetere și sonde, anestezie, terapie de inhalare, hemodializă, endoscopie, urologie, stomatologie, inhalant, echipamente etc.). Poate fi utilizată pentru curățarea manuală și automată a dispozitivelor și echipamentelor medicale conform instrucțiunilor producătorului. **Compoziție:** Soluție activată (A + B); **substanțe active:** Acid peracetic g 0,180, Isazone® (C20H20ON2) 0,010 g; coformulanți și apă purificată q.s. la 100 ml.

**Eficiența produsului:** **Sterilizare: 10 minute. Acțiune puternic sporicidă și dezinfectantă: 5 minute** la temperatura ambientală (EP).

Stabilitate după activare/diluare: timp de 12 zile în țevi acoperite. Numărul de cicluri și stabilitatea după activare/diluare variază în funcție de modelul echipamentului de sterilizare-dezinfectare automat, de tipul de reprocesare a endoscoapelor, respectarea obligatorie și corectă a procedurilor de curățare cerute de liniile directe și de MRC (concentrație minimă recomandată). Benzile de testare „Adaspor Plus” pot confirma că produsul depășește întotdeauna concentrația minimă recomandată (MRC) de 0,05% a soluției de acid peracetic.

**Instrucțiuni de utilizare:** Utilizați diluție 1:5 în apă pentru utilizare manuală Pentru dezinfectarea manuală: scufundați dispozitivele medicale în soluția activată, după ce le-ați spălat și uscat, asigurându-vă că pătrunde în toate cavitățile acestora. Scoateți dispozitivele dezinfectate din tavă folosind o procedură aseptică și clătiți-le cu apă sterilă.

Pentru utilizare în echipamente automate de sterilizare și dezinfectare și reprocesare cu ultrasunete, umpleți recipientele cu cantitatea necesară de soluție activată Adaspor Plus conform instrucțiunilor producătorului. Configurați echipamentele automate de sterilizare și dezinfectare cu timpul de contact adecvat.

**Compatibilitate:** Soluția activată este compatibilă cu materialele dispozitivelor medicale, în special ale endoscoapelor și echipamentelor de dezinfectare automată. Datele sunt stocate la producător. **Avertisment:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Soluția A și soluția B nu pot fi utilizate separat. Produsul trebuie să fie manipulat de personal calificat în conformitate cu normele actuale de siguranță. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere pentru utilizatori profesioniști.

**Depozitare:** A se păstra într-un loc uscat, la temperatura camerei departe de sursele de căldură. Data de expirare se aplică pachetului nedeschis depozitat corespunzător. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate.

**Ambalare:** 2 fiocoane (sol. A: 180 ml, sol B: 820 ml) într-o cutie.

**SOL. B ȘI PRODUSUL ACTIVAT (A+B) NU NECESITĂ MĂSURI SPECIFICE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU PERSOANE SAU MEDIU. DUPĂ UTILIZARE, SOLUȚIILE TREBUIE ELIMINATE CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.**

Continut: (Soluția A+B) 1000 ml e

Urgență:: +39.069145399

CANTEL MEDICAL

CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.  
Via Laurentina, 169  
00071 POMEZIA (RM) - Italia  
Tel.: 39.06.9145399  
Fax: +39.06.9146099  
www.cantelmedical.it



0 5 4 6



LOT



Cod. 000000 Rev. 1 - 09/2019